

VITA ENAMIC® STAINS KIT: mayor naturalidad

Ahora podrá reproducir matices cromáticos naturales de forma rápida y sencilla



Toma del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 01.13

VITA shade, VITA made.

VITA

Descripción del producto

El VITA ENAMIC STAINS KIT incluye seis maquillajes más accesorios para la reproducción de matices cromáticos naturales de restauraciones confeccionadas a partir de cerámica híbrida. La unión de los maquillajes con la restauración se realiza mediante un proceso de polimerización. Para el sellado de la superficie está disponible el glaseado químico VITA ENAMIC GLAZE. De este modo se incrementa

la durabilidad y el brillo de los maquillajes en el medio bucal. La elaboración se basa en 5 pasos muy sencillos: acondicionar la superficie de la restauración, mezclar los maquillajes y aplicarlos, realizar una polimerización intermedia, aplicar el glaseado químico y realizar la polimerización final.

Véase el reverso

Ventajas del producto

Elaboración rápida

Solo hay que aplicar los maquillajes VITA ENAMIC en la restauración, polimerizar y listo. De este modo es posible una rápida caracterización cromática de las restauraciones de VITA ENAMIC.

Restauraciones personalizadas:

Con los seis maquillajes VITA ENAMIC pueden reproducirse los matices cromáticos y los defectos de los dientes naturales de forma totalmente personalizada.

Facilidad de manipulación:

La intensidad cromática de los maquillajes VITA ENAMIC puede controlarse fácilmente mediante la proporción de líquido y polvo. Esto permite una aplicación tanto puntual como fluida.

Gama de indicaciones

Los maquillajes VITA ENAMIC están indicados para la caracterización (oclusal/cervical) de restauraciones confeccionadas a partir de la cerámica híbrida VITA ENAMIC.

Datos del producto

Gama de colores: VITA ENAMIC STAINS están disponibles en seis matices cromáticos: white, corn, brown, khaki, blue y black.

Accesorios: Liquid, Glaze, Cleaner, Microbrush, pincel, paleta de mezclado, espátula

VITA ENAMIC® STAINS

VITA ENAMIC® STAINS KIT, ref. EENSTKIT

Denominación	Descripción	Contenido / color
VITA ENAMIC STAINS 1-6	6 frascos de 2 g	white, corn, brown, khaki, blue y black
VITA ENAMIC STAINS LIQUID	Frasco	20 ml
VITA ENAMIC GLAZE	Frasco	20 ml
VITA VM LC CLEANER	Frasco	50 ml
Aplicadores desechables Microbrush	Envase	20 unidades
Pincel n.º 1	–	2 unidades
Paleta de mezclado de porcelana, negra	8,5 x 11 mm	1 unidad
Espátula de mezclado de dos extremos	–	1 unidad

VITA ENAMIC® STAINS KIT: artículos individuales

Denominación	Descripción	Contenido / color	Ref.
VITA ENAMIC STAIN 1	Frasco de 2 g	white	EENST012
VITA ENAMIC STAIN 2	Frasco de 2 g	corn	EENST022
VITA ENAMIC STAIN 3	Frasco de 2 g	brown	EENST032
VITA ENAMIC STAIN 4	Frasco de 2 g	khaki	EENST042
VITA ENAMIC STAIN 5	Frasco de 2 g	blue	EENST052
VITA ENAMIC STAIN 6	Frasco de 2 g	black	EENST062
VITA ENAMIC STAINS LIQUID	Frasco	20 ml	EENSTL20
VITA ENAMIC GLAZE incl. aplicadores desechables Microbrush	Frasco/envase	20 ml / 20 unidades	EENSTG20
VITA VM LC CLEANER	Frasco	50 ml	CVMLC50
Aplicadores desechables Microbrush	Envase	20 unidades	EENSTMB20
Pincel n.º 1	–	1 unidad	B085
Paleta de mezclado de porcelana, negra	8,5 x 11 mm	1 unidad	C014
Espátula de mezclado de dos extremos	–	1 unidad	C013

Compatibilidad del sistema

Para las polimerizaciones intermedia y final se recomiendan los siguientes aparatos de polimerización de clínica y de laboratorio: Bluephase C8 (Ivoclar Vivadent), Astralis 10 (Ivoclar Vivadent), Valo (Ultradent), Speed Labolight (Hager & Werken), Heraflash (Heraeus Kulzer) y PolyLux PT (Dreve).

Encontrará más información sobre VITA ENAMIC en: www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com

VITA