

VITA ENAMIC® STAINS KIT: Za veću prirodnost

Sada se brzo i jednostavno reprodukuju prirodne nijanse boja



VITA određivanje boja

VITA komunikacija boja

VITA proizvodnja boja

VITA kontrola boja

Izdanje 12.14

VITA shade, VITA made.

VITA

Opis proizvoda

VITA ENAMIC STAINS KIT obuhvata šest boja za akcentiranje i pribor za reprodukciju nijansi prirodnih boja restauracija od hibridne keramike. Vezivanje boja za akcentiranje na restauracije vrši se procesom polimerizacije. Za pečačenje površine koristi se hemijska glazura VITA ENAMIC

GLAZE je dostupan. Zbog toga se trajnost i sjajnost boje povećava u ustima. Obrada se vrši po jednostavnom 5-koračnom principu: pripremiti površinu restauracije, pomešati boje i naneti, zatim izvršiti polimerizaciju, naneti hemijsku glazuru i izvršiti završnu polimerizaciju.

Prednosti proizvoda

Brza obrada

VITA ENAMIC boje za akcentiranje jednostavno nanosite na restauraciju, polimerizujte i gotovo! Toliko brzo se VITA ENAMIC nadoknade mogu individualizovati bojom.

Visoka individualnost:

Sa šest VITA ENAMIC boja za akcentiranje mogu se napraviti potpuno individualno nijansirani zubi i prirodne anomalije zuba.

Jednostavna obrada:

Promenom odnosa tečnosti i boje u prahu može se regulisati intenzitet boje VITA ENAMIC boja za akcentiranje. To omogućava nanošenje boje u tačkama i u tečnom premazu.

Spektar indikacija

VITA ENAMIC boje za akcentiranje su pogodne za karakterizaciju (okluzalnu/cervikalnu) restauracija od VITA ENAMIC hibridne keramike.

Podaci o proizvodu

Ponuda boja: VITA ENAMIC STAINS su dostupne u šest nijansi boja: white, corn, brown, khaki, blue i black.

Pribor: Liquid, Glaze, Cleaner, Microbrush, četkica, pločica za mešanje, špahtla

VITA ENAMIC® STAINS

VITA ENAMIC® STAINS KIT – Art. br. EC4STKIT

Oznaka	Opis	Sadržaj/Boja
VITA ENAMIC STAINS 1-6	6 x bočica od 2 g	white, corn, brown, khaki, blue i black
VITA ENAMIC STAINS LIQUID	Bočica	20 ml
VITA ENAMIC GLAZE	Bočica	20 ml
VITA VM LC CLEANER	Bočica	50 ml
Microbrush aplikatori za jednokratnu upotrebu	Pakovanje	à 20 kom.
Četkica br. 1	–	2 kom.
Porculanska ploča za mešanje, crna	8,5 x 11 mm	1 kom.
Dvostrana špahtla za mešanje	–	1 kom.

VITA ENAMIC® STAINS KIT – pojedinačni artikali

Oznaka	Opis	Sadržaj/Boja	Art. br.
VITA ENAMIC STAIN 1	Bočica od 2 g	white	EENST012
VITA ENAMIC STAIN 2	Bočica od 2 g	corn	EENST022
VITA ENAMIC STAIN 3	Bočica od 2 g	brown	EENST032
VITA ENAMIC STAIN 4	Bočica od 2 g	khaki	EENST042
VITA ENAMIC STAIN 5	Bočica od 2 g	blue	EENST052
VITA ENAMIC STAIN 6	Bočica od 2 g	black	EENST062
VITA ENAMIC STAINS LIQUID	Bočica	20 ml	EENSTL20
VITA ENAMIC GLAZE sa Microbrush aplikatora za jednokratnu upotrebu	Bočica / Pakovanje	20 ml / à 20 kom.	EENSTG20
VITA VM LC CLEANER	Bočica	50 ml	CVMLC50
Microbrush aplikatori za jednokratnu upotrebu	Pakovanje	à 20 kom.	EENSTMB20
Četkica br. 1	–	1 kom.	B085
Porculanska ploča za mešanje, crna	8,5 x 11 mm	1 kom.	C014
Dvostrana špahtla za mešanje	–	1 kom.	C013

Kompatibilnost sistema

Za među- i završnu polimerizaciju preporučuju se sledeći stomatološki i dentalni uređaji za polimerizaciju:

Bluephase C8 (proizvođač Ivoclar Vivadent), Astralis 10 (proizvođač Ivoclar Vivadent), Valo (proizvođač Ultradent), Speed Labolight (proizvođač Hager & Werken), Heraflash (proizvođač Heraeus Kulzer) i PolyLux PT (proizvođač Dreve).

Više informacija o proizvodu VITA ENAMIC naći ćete na adres: www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com

VITA