

Tableaux de cuisson VITABLOCS dans le VACUMAT

VITABLOCS

VITABLOCS

	Prés. °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min	Temp. env. °C	→ min.	VAC min.
Fixation des colorants	500	4.00	5.00	76	880	0.30	0.00
Cuisson des colorants	600	6.00	4.00	83	930	1.00	0.00
Cuisson de glaçage	600	6.00	6.00	58	950	1.00	0.00

VITA shade, VITA made.

VITA