

Tabelle di cottura VITABLOCS in VACUMAT

VITABLOCS

VITABLOCS

	Prees. °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min	Temp. ca. °C	→ min.	VAC min.
Cottura di fissaggio colori di caratterizzazione	500	4.00	5.00	76	880	0.30	0.00
Cottura colori caratterizzazione	600	6.00	4.00	83	930	1.00	0.00
Cottura finale	600	6.00	6.00	58	950	1.00	0.00

VITA shade, VITA made.

VITA