


## VITA Easyshade® Advance 4.0 Quick start



- 1
- D – Vor Gebrauch Gerät 5 Stunden laden.  
E – Charge unit for 5 hours before using it.  
F – Charger l'appareil 5 heures avant de l'utiliser.  
I – Prima dell'utilizzo tenere in carica l'apparecchio per 5 ore.  
POR – Antes do uso, carregar o aparelho por 5 horas.  
SP – Cargar el aparato durante 5 horas antes de su uso.  
TR – İlk kullanımdan önce aleti en az 5 saat şarj ediniz.  
Ar – شرح الجهاز كهربائيا 5 ساعات قبل الاستخدام

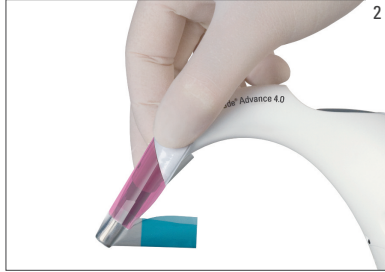

- 2
- D – Messspitze in die Folientasche stecken, Papier von Infektionsschutzfolie abziehen und Infektionsschutzfolie über Befestigungshaken ziehen.  
E – Insert the measuring probe into the cover pocket, remove the paper from the infection control shield and pull the infection control shield over the fastener.  
F – Insérer la pointe de la sonde dans la pochette, retirer le papier de la feuille de protection et tendre cette feuille sur le crochet de fixation.  
I – Inserire il puntale di misura nella tasca della protezione contro le infezioni, staccare la pellicola, tendere la protezione fissandola al perno di aggancio.  
POR – Colocar a ponteira no interior da capa protetora, remover o papel externo do protetor de biossegurança e puxar o protetor sobre o gancho de fixação.  
SP – Insertar la punta de medición en la funda protectora, retirar el papel de la funda protectora y tirar de la lámina hasta poder fijarla con el gancho de sujeción.  
TR – Ölçüm aletinin ucunu plastik kılıfın (enfeksiyon koruyucusu) içine geçirin ve üzerindeki kağıt kısmı çekiniz, plastik kılıfın uç kısmını ölçüm aletinin üzerindeki çengele geçirin.



- 3
- Ar – ادخل رأس جهاز القياس او المسبار في جيب الغطاء  
اسحب الورقة الواقية وعطي بهذه الورقة مشبك التثبيت



- 4
- D – Mit Messtaste einschalten.  
E – Start unit with the measurement button.  
F – Allumer avec la touche de mesure.  
I – Azionare il pulsante di misura per avviare l'apparecchio.  
POR – Ligar o aparelho acionando o botão de medição.  
SP – Conectar el aparato con el botón de medición.  
TR – Ölçüm aletinin üzerindeki tuşa basarak cihazı çalıştırın.  
Ar – أضيء الجهاز بالضغط على مفتاح القياس



- 5
- D – Gerät ist kalibrationsbereit.  
E – The unit is ready to be calibrated.  
F – L'appareil est prêt pour l'étalonnage.  
I – L'apparecchio è pronto per la calibrazione.  
POR – O aparelho está pronto para calibração.  
SP – El aparato está ahora listo para la calibración.  
TR – Cihazınız kalibrasyon yapmaya hazırdır.  
Ar – الجهاز اصبح حاضر للمعايرة

## VITA Easyshade® Advance 4.0 Quick start



- 6
- D – Messspitze auf Kalibrierblock drücken.  
E – Place the measuring probe on the calibration block.  
F – Enfoncer la pointe de la sonde sur le bloc d'étalonnage.  
I – Premere il puntale di misura sul blocco di calibrazione.  
POR – Pressionar a ponteira sobre o bloco de calibração.  
SP – Presionar con la punta de medición sobre el bloque de calibración.  
TR – Ölçüm ucunu kalibrasyon blokunun üzerine bastırın.  
Ar – ضع مسبار القياس على مجموعة المعايرة



- 7
- D – Grundfarbmessung auswählen und bestätigen.  
E – Select and confirm the basic shade measurement.  
F – Sélectionner le mode mesure couleur de base et confirmer.  
I – Selezionare determinazione colore base e confermare.  
POR – Seleccionar a função "Cor base" e confirmar.  
SP – Seleccionar el modo medir color dental base y aceptar.  
TR – Ana renk ölçümünü seçiniz ve onaylayınız.  
Ar – ختر مقياس اللون الأساسي وصادق عليه



- 8
- D – Messen im Dentinzentrum durch drücken der Messtaste.  
E – To measure the dentine center press the measurement button.  
F – Effectuer la mesure au centre de la dentine en appuyant sur la touche mesure.  
I – Eseguire la misura nel centro della dentina azionando il pulsante.  
POR – Pressionar o botão de medição para mensuração no centro da dentina.  
SP – Medición en el centro de la dentina pulsando el botón de medición.  
TR – Ölçüm cihazınızı rengin belirleneceği diş ekvatoruna dik bir açı oluşturacak şekilde yerleştirip ölçüm tuşuna basınız.  
Ar – ضع الآلة في منطقة وسط العاج واضغط على زر القياس



- 9
- D – Zahnfarbe ablesen.  
E – Read the tooth shade.  
F – Lire la teinte de dent.  
I – Leggere il colore del dente.  
POR – Ler a cor dentária.  
SP – Leer el color dental en la pantalla.  
TR – Ölçülen diş rengini ekrandan okuyun.  
Ar – اقرأ لون السن



- 10
- D – Gerät säubern und desinfizieren.  
E – Clean and disinfect the unit.  
F – Nettoyer et désinfecter l'appareil.  
I – Pulire e disinfettare l'apparecchio.  
POR – Limpar e desinfetar o aparelho.  
SP – Limpiar y desinfectar el aparato.  
TR – Cihazı temizleyin ve dezenfekte edin.  
Ar – نظف واطهر الجهاز

**VITA**