

## VITA VM 9 im Dekema Austromat 3001

NAME	BRENNPROGRAMME - EINTRAGSREIHE
Reinigungsbrand	C500 T120 T60.L9 T030.C700 T300 C0 L0 T2 C500
Regenerationsbrand	C500 L9 T080.C1000 T900 C0 L0 T2 C500
Base Dentine Washbrand	C500 T120.L9 V9 T060.C950 V0 T60 C0 L0 T2 C500
MARGIN Brand	C500 T180 T180.L9 V9 T050.C960 V0 T60 C0 L0 T2 C500
EFFECT LINER	C500 T180 T180.L9 V9 T050.C930 V0 T60 C0 L0 T2 C500
1.DENTINBRAND	C500 T180 T180.L9 V9 T050.C910 V0 T60 C0 L7 T300.C500 L0 T2 C500
2.DENTINBRAND	C500 T180 T180.L9 V9 T050.C900 V0 T60 C0 L7 T300.C500 L0 T2 C500
GLANZBRAND mit Glasur	C500 T120 T120.L9 T080.C900 T60 C0 L7 T300.C500 L0 T2 C500
GLANZBRAND	C500 T120.L9 T080.C900 T120 C0 L7 T300.C500 L0 T2 C500
CORRECTIVE	C500 T120 T120.L9 V9 T060.C760 V0 T60 C0 L7 T300.C500 L0 T2 C500

Die Angaben sind Brennwerte, welche uns von Kunden übermittelt wurden. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden.