

Brenntabelle VM 9

	Reini- gungs- brand YZ	Therm. Vorbe- hand- lung	Effect Bonder	Effect Bonder Paste	Wash Brand Basis dentin	Effect Liner	Dentin 1	Dentin 2	Glanz	Glanz mit Glasur	Correc tive
Vortrocknen °C				135	135	135	135	135	135	135	135
Vortrocknen Min.				1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00
Schliessen Min.	3:00	1:00	6:00	6:00	2:00	6:00	6:00	6:00	2:00	4:00	4:00
Vorwärmen °C	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Vorwärmen Min.	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Anstieg °C/Min.	30	80	80	80	60	50	50	50	80	80	60
Vakuum	-----	-----	On	On	On	On	On	On	-----	-----	On
Vakuum ein °C	-----	-----	500	500	500	500	500	500	-----	-----	500
Vakuum aus °C	-----	-----	980	980	950	930	910	900	-----	-----	760
Endtemperatur °C	700	1000	980	980	950	930	910	900	900	900	760
Halten Vak. Min.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Halten Min.	5:00	15:00	1:00	2:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00
Tempern	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kühlen Min.							5:00	5:00	5:00	5:00	5:00

Die hier angegebenen Werte sind Richtwerte und dienen als Anhaltspunkt. Abweichungen der Brennergebnisse sind möglich. Die Brennergebnisse hängen von der jeweiligen Ofenleistung ab und sind Hersteller – und alterungsbedingt. Die Richtwerte müssen individuell bei jedem Brand angeglichen werden. Diese Angaben sind sorgfältig erstellt und geprüft, werden aber ohne Gewähr weitergegeben.