

VITA VM 9 im Multimat MC II

Programme	Temp.°C Vorwärmen	Trocknen min	Vorw. min	Vac.	Brennen	Anstieg °C/min	Endtemp °C	Kühlen
Reinigungsbrand	500	2	1		5,0	030	700	
Regenerationsbrand	500	1	1		15,0	070	1000	
Wash Brand	500	2	1	1,0	2,0	050	950	
Margin Brand	500	5	1	1,0	2,0	050	960	
Effect Liner Brand	500	5	1	1,0	2,0	050	930	
1. Dentinbrand	500	5	1	1,0	2,0	050	910	-600°
2. Dentinbrand	500	5	1	1,0	2,0	050	900	-600°
Glanzbrand	500	1	1		2,0	080	900	-600°
Glanz mit Glasurmasse	500	3	1		1,0	080	900	-600°
Korrekturbrand COR	500	3	1	1,0	2,0	060	760	-500°

Die Angaben sind Brennwerte, welche uns von Kunden übermittelt wurden. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden.