

VITA VM 7 im Multimat MC II

Progr.	Temp.°C Vorwärmen	Trocknen	Vorw.	Vac.	Brennen	°C/min.	Endtemp.
Washbrand	500	1	1	1,0	2,0	060	950°
Margin Brand	500	5	1	1,0	2,0	060	960°
Effect Liner	500	5	1	1,0	2,0	055	950 °
1. Dentinbrand	500	5	1	1,0	3,0	055	910°
2. Dentinbrand	500	5	1	1,0	2,0	055	900°
Glanzbrand	500	1	1	0	2,0	080	910°
Glanz mit Glasurmasse	500	3	1	0	2,0	080	900°
VM 7 CORRECTIVE	500	3	1	1,0	2,0	055	830°

Die Angaben sind Brennwerte, welche uns von Kunden übermittelt wurden. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden.