

Brenntabelle VM 7 im Austromat

NAME	START		↑	→	VAC LEVEL	°C ↗ Min.	END	→ min. sec.	(V)	↘ 1	2 ↘
Washbrand	500	2	1	0	9	60	950	1:00		0	0
MARGIN Brand	500	3	3	0	9	60	960	1:00		0	0
EFFECT LINER	500	3	3	0	9	55	950	1:00		0	0
1. Dentinbrand	500	3	3	0	9	55	910	1:00		0	0
2. Dentinbrand	500	3	3	0	9	55	900	1:00		0	0
Glanzbrand	500	2	2	0	0	80	900	1:00		0	0
Corrective Brand	500	2	2	0	9	55	830	1:00		0	0

Die Angaben sind Brennwerte, welche uns von Kunden übermittelt wurden, eine Gewähr kann nicht
Übernommen werden.