

VITA VM 7 im Dekema Austromat 3001

NAME	BRENNPROGRAMME - EINTRAGSREIHE
Washbrand	C500 T120 T60.L9 T60 V9 T060.C950 V0 T60 C0 L0 T2 C500
Margin Brand	C500 T120 T120.L9 T120 V9 T060.C960 V0 T60 C0 L0 T2 C500
Effect Liner Brand	C500 T120 T120.L9 T120 V9 T055.C950 V0 T60 C0 L0 T2 C500
1.Dentinbrand	C500 T120 T120.L9 T120 V9 T055.C910 V0 T60 C0 L0 T2 C500
2. Dentinbrand	C500 T120 T120.L9 T120 V9 T055.C900 V0 T60 C0 L0 T2 C500
Glanzbrand mit Glasur	C500 T120 T120.L9 T080.C900 T60 C0 L0 T2 C500
Corrective Brand	C500 T60 L5 T120.L9 T60 V9 T055.C830 V0 T60 C0 L0 T2 C500

Die Angaben sind Brennwerte, welche uns von Kunden übermittelt wurden. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden.