

## VITA VM 15 im Dekema Austromat 3001

NAME	BRENNPROGRAMME - EINTRAGSREIHE
Oxid	Bitte Angaben des Legierungshersteller beachten !
Wash Pulver	C400 T120.L9 T60 V9 T070.C820 V0 T60 C0 L0 T2 C400
Wash Paste	C400 T180 T120.L9 T60 V9 T070.C820 V0 T60 C0 L0 T2 C400
Grundmasse Pulver	C400 T120.L9 T60 V9 T070.C820 V0 T60 C0 L0 T2 C400
Grundmasse Paste	C400 T180 T120.L9 T60 V9 T070.C820 V0 T60 C0 L0 T2 C400
MARGIN Brand	C400 T180 L5 T120.L9 T60 V9 T050.C810 V0 T60 C0 L0 T2 C400
EFFECT Liner Brand	C400 T120 T120.L9 T120 V9 T050.C810 V0 T60 C0 L0 T2 C400
1.Dentinbrand	C400 T120 T120.L9 T120 V9 T050.C800 V0 T60 C0 L0 T2 C400
2. Dentinbrand	C400 T120 T120.L9 T120 V9 T050.C790 V0 T60 C0 L0 T2 C400
Glanz mit Glasur	C400 T180 T60.L9 T080.C780 T60 C0 L0 T2 C400
Glanz	C400 T60.L9 T080.C790 T60 C0 L0 T2 C400
CORRECTIVE Korrekturbrand	C400 T120 T120.L9 T60 V9 T050.C750 V0 T60 C0 L0 T2 C400

Die Angaben sind Brennwerte, welche uns von Kunden übermittelt wurden. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden.