

Brenntabelle VM 15

	PASTE WASH	Paste	Pulver Wash	Pulver	Margin	Effect Liner	Dentin 1	Dentin 2	Glanz	Glanz mit Glasur	Correc tive
Vortrocknen °C	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
Vortrocknen Min.	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00
Schliessen Min.	6:00	6:00	2:00	2:00	6:00	6:00	6:00	6:00	4:00	4:00	4:00
Vorwärmen °C	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Vorwärmen Min.	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Anstieg °C/ Min.	70	70	70	70	50	50	50	50	80	80	50
Vakuum	On	On	On	On	On	On	On	On	-----	-----	On
Vakuum ein °C	400	400	400	400	400	400	400	400	-----	-----	400
Vakuum aus °C	820	820	820	820	810	810	800	790	-----	-----	750
Endtemperatur °C	820	820	820	820	810	810	800	790	790	790	750
Halten Vak. Min.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Halten Min.	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	2:00	1:00	1:00
Tempern	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kühlen NEIN											

Die hier angegebenen Werte sind Richtwerte und dienen als Anhaltspunkt. Abweichungen der Brennergebnisse sind möglich. Die Brennergebnisse hängen von der jeweiligen Ofenleistung ab und sind Hersteller – und alterungsbedingt. Die Richtwerte müssen individuell bei jedem Brand angeglichen werden. Diese Angaben sind sorgfältig erstellt und geprüft, werden aber ohne Gewähr weitergegeben.