

## Brenntemperaturen von VITA VM 15 im Multimat MC II

Progr.	Temp. °C Vorwärmen	Trocknen	Vorw.	Vac.	Brennen	°C/min.	Endtemp. °C
Washbrand Pulver	400	1	1	1,0	2,0	70	820
Washbrand Paste	400	5	1	1,0	2,0	70	820
Opaker Pulver	400	1	1	1,0	2,0	70	820
Opaker Paste	400	5	1	1,0	2,0	70	820
Margin Brand	400	5	1	1,0	2,0	50	810
Effect Liner	400	5	1	1,0	2,0	50	810
1. Dentinbrand	400	5	1	1,0	3,0	50	800
2. Dentinbrand	400	5	1	1,0	2,0	50	790
Glanz mit Glasurmasse	400	3	1	0	2,0	80	790
Corrective Brand	400	3	1	1,0	2,0	50	750

Die Angaben sind Brennwerte, die uns Kunden überlassen haben. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden.