

VITA VMK MASTER im Dekema Austromat 3001

(langsame Abkühlung)

NAME	BRENNPROGRAMME - EINTRAGSREIHE
Wash Pulver	C500 T120 T60.L9 V9 T080.C960 V0 T60 C0 L0 T2 C500
Wash Paste	C500 T180 T120.L9 T60 V9 T080.C960 V0 T60 C0 L0 T2 C500
Grundmasse Pulver	C500 T120 T60.L9 V9 T080.C950 V0 T60 C0 L0 T2 C500
Grundmasse Paste	C500 T180 T120.L9 T60 V9 T080.C950 V0 T60 C0 L0 T2 C500
Margin Brand, Luminary	C500 T120 T120.L9 T120 V9 T055.C940 V0 T60 C0 L7 T300.C500 L0 T2 C500
1.Dentinbrand	C500 T120 T120.L9 T120 V9 T055.C930 V0 T60 C0 L7 T300.C500 L0 T2 C500
2.Dentinbrand	C500 T120 T120.L9 T120 V9 T055.C920 V0 T60 C0 L7 T300 C500 L0 T2 C500
Glanz mit Glasur	C500 T120 T120.L9 T080.C920 T60 C0 L7 T300.C500 L0 T2 C500
Glanz	C500 T60.L9 T080.C920 T60 C0 L7 T300.C500 L0 T2 C500
Korrekturbrand mit COR	C500 T120 T120.L9T120 V9 T055.C860 V0 T60 C0 L7 T300.C500 L0 T2 C500

Die Angaben sind Brennwerte, welche uns von Kunden übermittelt wurden. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden.