

## Brenntabelle VMK MASTER

	PASTE WASH	Opaque Paste	Opaque Pulver Wash	Opaqu ePulver	Margin	Lumi naries	Dentin 1	Dentin 2	Glanz	Glanz mit Glaser	Correc tive
Vortrocknen °C	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
Vortrocknen Min.	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00
Schliessen Min.	6:00	6:00	2:00	2:00	6:00	6:00	6:00	6:00	1:00	4:00	4:00
Vorwärmen °C	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Vorwärmen Min.	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Anstieg °C/ Min.	80	80	80	80	55	55	55	55	80	80	55
Vakuum	On	On	On	On	On	On	On	On	-----	-----	On
Vakuum ein °C	500	500	500	500	500	500	500	500	-----	-----	500
Vakuum aus °C	960	950	960	950	940	940	930	920	-----	-----	900
Endtemperatur °C	960	950	960	950	940	940	930	920	920	920	900
Halten Vak. Min.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Halten Min.	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00
Tempern	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kühlen Min. Legierungsabhängig											

Die hier angegebenen Werte sind Richtwerte und dienen als Anhaltspunkt. Abweichungen der Brennergebnisse sind möglich. Die Brennergebnisse hängen von der jeweiligen Ofenleistung ab und sind Hersteller – und alterungsbedingt. Die Richtwerte müssen individuell bei jedem Brand angeglichen werden. Diese Angaben sind sorgfältig erstellt und geprüft, werden aber ohne Gewähr weitergegeben.