

Brenntemperaturen von VITA VMK Master im Multimat MC II

Progr.	Temp. °C Vorwärmen	Trocknen	Vorw.	Vac.	Brennen	°C/min.	Endtemp. °C
Washbrand Pulver	500	2	1	1,0	2,0	80	960
Washbrand Paste	500	5	1	1,0	2,0	80	960
Opaker Pulver	500	2	1	1,0	2,0	80	950
Opaker Paste	500	5	1	1,0	2,0	80	950
Margin Brand	500	5	1	1,0	2,0	50	940
Effect Liner	500	5	1	1,0	2,0	50	940
1. Dentinbrand	500	5	1	1,0	2,0	50	930
2. Dentinbrand	500	5	1	1,0	2,0	50	920
Glanz mit Glasurmasse	500	3	1	0	2,0	80	920
Corrective Brand	500	3	1	1,0	2,0	50	860

Die Angaben sind Brennwerte, die uns Kunden überlassen haben. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden.