

**Brenntabelle VITA TITANKERAMIK
im DEKEMA Austromat 3001**

PASTE BONDER	C400 T240 T180. L9 V9 T060. C800 T60 V0 C0 L0 T2 C400
Pulver BONDER	C400 T120 T120. L9 V9 T060. C800 T60 V0 C0 L0 T2 C400
Grundmasse	C400 T120 T120. L9 V9 T090. C790 T60 V0C0 L0 T2 C400
Marginbrand	C400 T180 T180. L9 V9 T050. C770 T60 V0 C0 L7 T300. C400 L0 T2 C400
1.Dentinbrand	C400 T180 T180. L9 V9 T050. C770 T60 V0 C0 L7 T300. C400 L0 T2 C400
2.Dentinbrand	C400 T180 T180. L9 V9 T050. C770 T60 V0 C0 L7 T300. C400 L0 T2 C400
Glanzbrand mit Glasur	C400 T120 T120. L9 V9 T060. C770 T60 V0 C0 L7 T300. C400 L0 T2 C400

Die Angaben sind Brennwerte, welche uns von Anwendern übermittelt wurden. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden.