

Brenntabelle VITA Titankeramik im Austromat M

NAME	START		↑	→	VAC LEVEL	°C ↗ Min.	END	→ min. sec.	(V)	↘ 1	2 ↘
PASTE BONDER	400	3	3	0	9	65	800	01:00	d	0	0
Pulver Bonder	400	2	2	0	9	65	800	01:00	d	0	0
Opaque Brand	400	2	2	0	9	80	790	01:00	d	0	0
Schulter Brand	400	3	3	0	9	50	770	01:00	d	2	3
1.Dentinbrand	400	3	3	0	9	50	770	01:00	d	2	3
2.Dentinbrand	400	3	3	0	9	50	770	01:00	d	2	3
Glanzbrand mit Glasur	400	2	2	0	9	80	770	01:00	d	2	3

Die Angaben sind Brennwerte, welche uns von Anwendern übermittelt wurden. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden.