

## Brenntabelle VITABLOCS

	Reinigungsbrand	Malfarbenfixierbrand	Glanzbrand mit Glasur	Indivi. mit VM9	2. Dentinbrand	Glanz mit Glasur
Vortrocknen °C	135	135	135	135	135	135
Vortrocknen Min.	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00
Schliessen Min.	4:00	4:00	4:00	6:00	6:00	4:00
Vorwärmen °C	500	500	500	500	500	500
Vorwärmen Min.	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Anstieg °C/ Min.	60	80	80	55	55	80
Vakuum	-----	-----	-----	On	On	-----
Vakuum ein °C	-----	-----	-----	500	500	-----
Vakuum aus °C	-----	-----	-----	930	920	-----
Endtemperatur °C	800	880	950	930	920	920
Halten Vac. Min.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Halten Min.	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00
Tempern	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kühlen Min.						

Die hier angegebenen Werte sind Richtwerte und dienen als Anhaltspunkt. Abweichungen der Brennergebnisse sind möglich. Die Brennergebnisse hängen von der jeweiligen Ofenleistung ab und sind Hersteller – und alterungsbedingt. Die Richtwerte müssen individuell bei jedem Brand angeglichen werden. Diese Angaben sind sorgfältig erstellt und geprüft, werden aber ohne Gewähr weitergegeben.