

VITA VM 9 auf VITABLOCS im Multimat MC II

Progr.	Temp.°C Vorwärmen	Trocknen	Vorw.	Vac.	Brennen	°C/min.	Endtemp.
Malfarben Fixierbrand	500	3	1		1,0	080	880°
Glanzbrand mit Akzent Glaser, Shading Paste	500	3	1		1,0	080	950°
Individualisierung mit VM9							
1.Dentinbrand	500	5	1	1,0	2,0	055	930°
2. Dentinbrand	500	5	1	1,0	2,0	055	920°
Glanz mit Glasurmasse	500	3	1		1,0	080	920°
VM 9 CORRECTIVE	500	3	1	1,0	2,0	055	780°

Die Angaben sind Brennwerte, welche uns von Kunden übermittelt wurden. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden.