

VITA VM 9 auf Vitablocs im P 90/95

Brand	B	°C/Min.	T	S	H	L	V1	V2
Malfarben Fixierbrand	500°	80°	880°	4	1			
Glasurbrand Shading Paste, Akzent Glaze	500°	80°	950°	4	1			
Individualisiern mit VM 9								
1. Dentinbrand	500°	55°	930°	6	1		500°	929°
2. Dentinbrand	500°	55°	920°	6	1		500°	919°
Malfarben Fixierbrand	500°	75°	880°	4	1			
Glanzbrand mit Glasurmasse	500°	55°	920°	4	1			

B	=	Bereitschaftstemperatur
°C/Min.	=	Anstiegszeit
T	=	Brenntemperatur
S	=	Schließzeit
H	=	Haltezeit bei Endtemperatur
L	=	Langzeitabkühlung
V1	=	Beginn des Vakuums
V2	=	Ende des Vakuums

Die Angaben sind Brennwerte, welche uns von Kunden übermittelt wurden. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden.