

Anleitung zur Durchführung eines Software-Update



VITA Vacumat 6000 M mit vPad easy

Software Update

VITA Vacumat 6000 M mit vPad easy

Sehr geehrte(r) VITA Vacumat 6000 M – Anwender(in),

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über das neue Software-Update für Ihren Vacumat 6000 M informieren und Sie bitten diese Software gemäß der nachstehenden Anleitung auf Ihrem Gerät zu installieren:

1. Neues Software Update aus dem Internet downloaden und auf USB-Stick speichern
2. Service-Software aus dem Internet downloaden und auf USB-Stick speichern
3. Software-Update installieren
4. Gerätedaten und –einstellungen prüfen bzw. eingeben
5. Registrierung im VITA Update-Messenger

Vorraussetzungen für Download und Installation:

- a) Internetanschluss bzw. -zugang
- b) 2 Stück USB-Stick (leer – darf keine weiteren Daten enthalten)
 - 1x für Software-Update
 - 1x für Service-Software

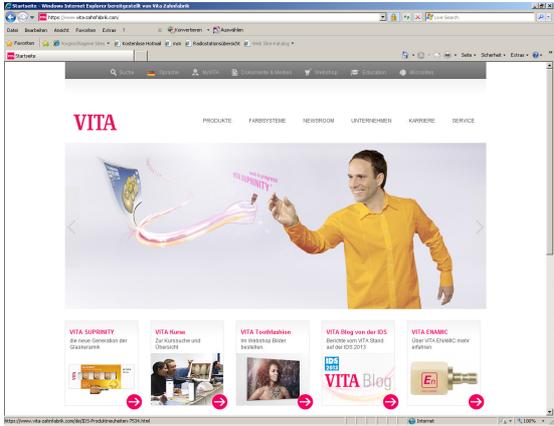
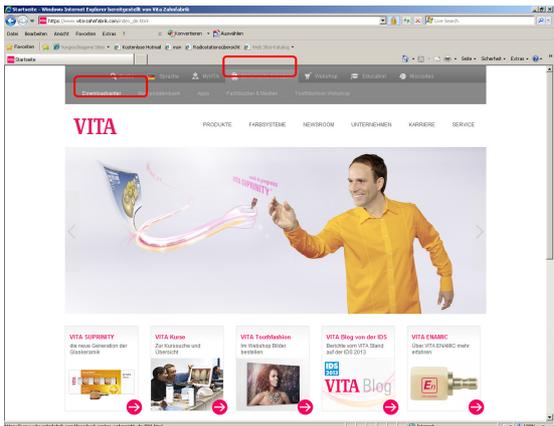
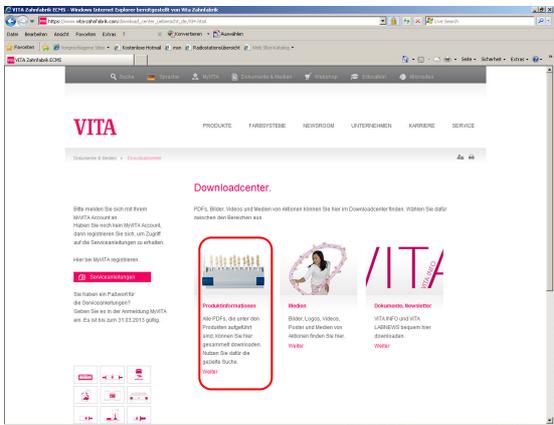
Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne unter folgenden Rufnummern zur Verfügung:

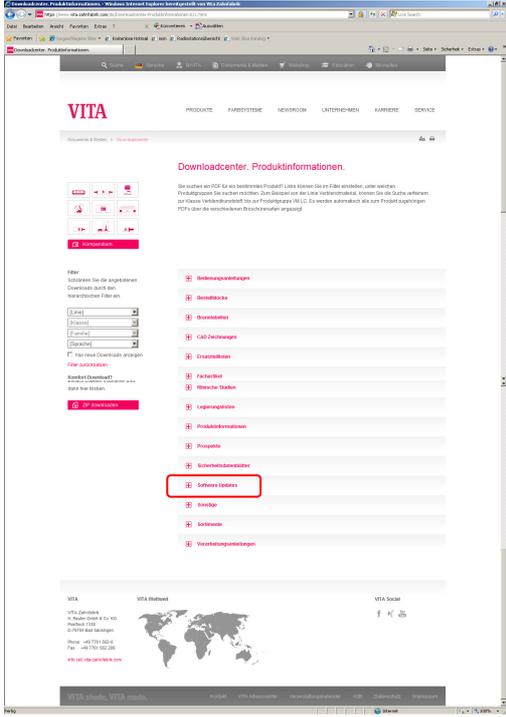
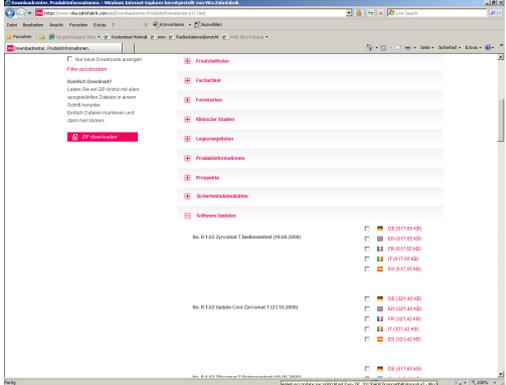
Tel.: 0049 77 61 / 562 – 101, -105 oder -106
Fax: 0049 77 61 / 562 – 102
Email: instruments-service@vita-zahnfabrik.com

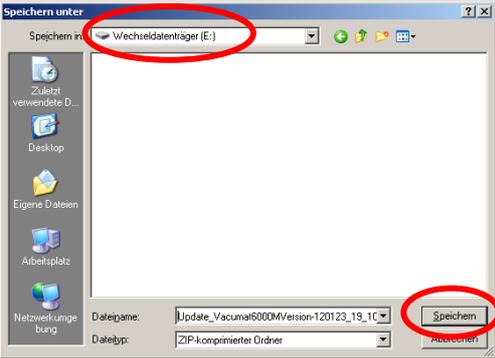
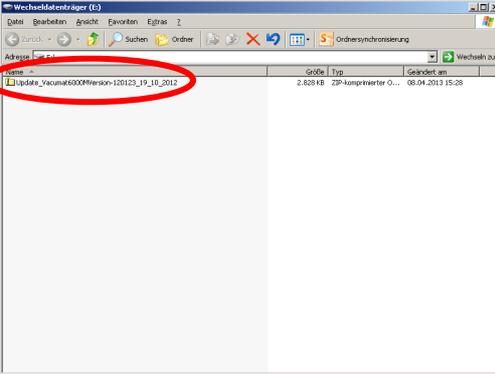
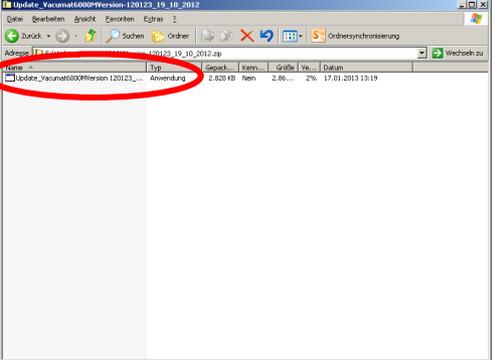
Mit freundlichen Grüßen

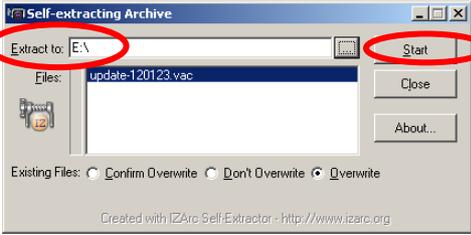
VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Abt. Geräteservice

1. Neues Software Update aus dem Internet downloaden und auf USB-Stick speichern

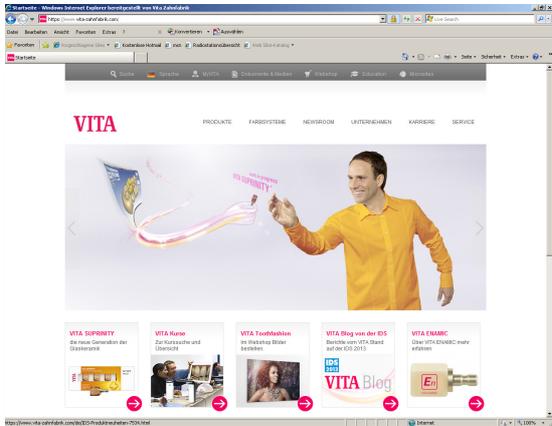
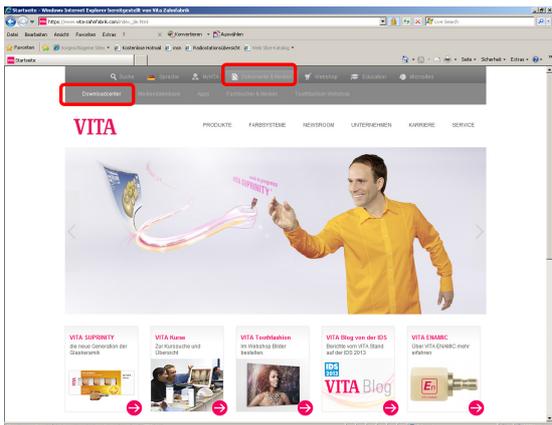
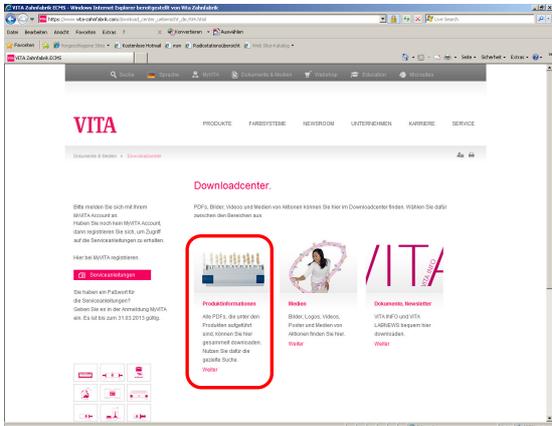
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
1	<p>www.vita-zahnfabrik.com im Internet-Explorer aufrufen</p>	
2	<p>Auswahl „Dokumente & Medien“ + „Downloadcenter“</p>	
3	<p>Auswahl „Produktinformationen“</p>	

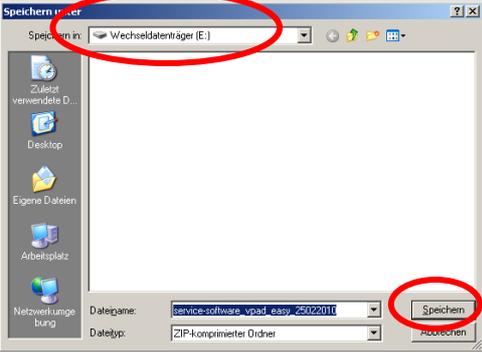
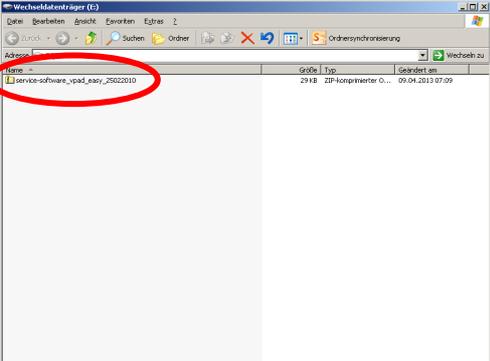
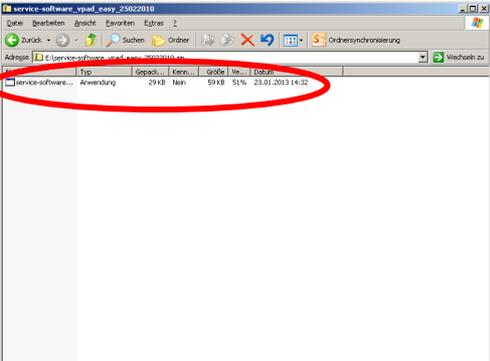
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
4	Auswahl „Software-Updates“	 <p>The screenshot shows the VITA website's 'Downloadcenter, Produktinformationen' page. On the left, there is a sidebar with various filter categories. The 'Software-Updates' category is highlighted with a red rectangle. Other categories include 'Anwendungsbereitungen', 'Bestellblätter', 'Dokumentation', 'CAD-Zusätze', 'Kundenzeitschriften', 'Handbücher', 'Technische Studien', 'Legenungspläne', 'Produktinformationen', 'Prospekte', 'Schweißanleitungen', 'Service', 'Software', 'Verpackungspläne', and 'Vertriebspläne'.</p>
5	Auswahl des gewünschten Updates	 <p>The screenshot shows the 'Software-Updates' section of the VITA website. It displays a list of software updates with checkboxes for selection. The updates are organized into sections, such as 'No. 8 142 (Zusatz 1 Endanwendung (11.08.2012))' and 'No. 8 142 (BIMBA-CAD-Zusatz 1 (23.11.2008))'. Each update has a checkbox and a version number.</p>
6	Auswahl „Speichern“	 <p>The screenshot shows a 'Dateidownload' dialog box. The dialog asks 'Möchten Sie diese Datei öffnen oder speichern?' (Do you want to open or save this file?). The file name is '...e_Vacumat6000MVersion-120123_19_10_2012.zip' and the type is 'ZIP-komprimierter Ordner, 2,76 MB'. The source is 'www.vita-zahnfabrik.com'. The 'Speichern' button is highlighted with a red circle. Below the dialog, there is a warning message: 'Dateien aus dem Internet können nützlich sein, aber manche Dateien können eventuell auf dem Computer Schaden anrichten. Öffnen oder speichern Sie diese Datei nicht, falls Sie der Quelle nicht vertrauen. Welches Risiko besteht?'.</p>

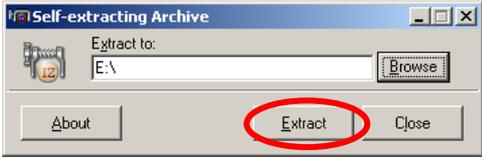
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
7	Laufwerk des USB-Sticks auswählen (Wechseldatenträger) , dann „Speichern“	
8	„Ordner öffnen“ auswählen	
9	Doppelklick auf Datei	
10	Doppelklick auf Datei	

Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
11	Taste „Start“ bestätigen	
12	Meldung mit „OK“ bestätigen	
13	USB-Stick enthält nun folgende Dateien	
14	USB-Stick von Computer trennen	

2. Die Service-Software aus dem Internet downloaden und auf USB-Stick speichern

Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
1	<p>www.vita-zahnfabrik.com im Internet-Explorer aufrufen</p>	
2	<p>Auswahl „Dokumente & Medien“ + „Downloadcenter“</p>	
3	<p>Auswahl „Produktinformationen“</p>	

Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
7	Laufwerk des USB-Sticks auswählen (Wechseldatenträger) , dann „Speichern“	
8	„Ordner öffnen“ auswählen	
9	Doppelklick auf Datei	
10	Doppelklick auf Datei	

Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
11	Taste „Extract“ bestätigen	
12	Meldung mit „OK“ bestätigen	
13	USB-Stick enthält nun folgende Dateien	
14	USB-Stick von Computer trennen	

3. Software-Update installieren

Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion des Gerätes
1	Gerät mit Hauptschalter einschalten	Lift fährt in untere Position 

Wichtiger Hinweis:
Lift muss in unterer Position sein + kein Programm (inkl. Standby) aktiv

2	USB-Stick mit Software-Update seitlich im vPad einstecken	---
3	Signalton ertönt nach ca. 10-15 Sekunden	---
4	Update wird automatisch durchgeführt	

Information:

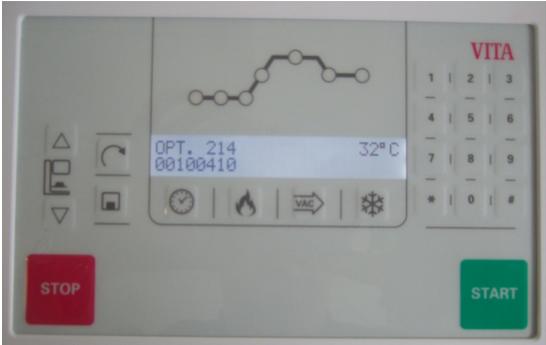
Während der Installation des Software-Updates leuchtet die Statusanzeige **rot/grün** auf.

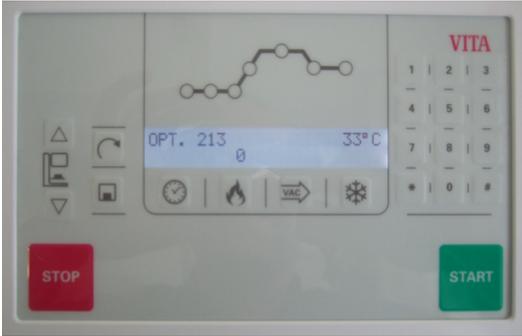
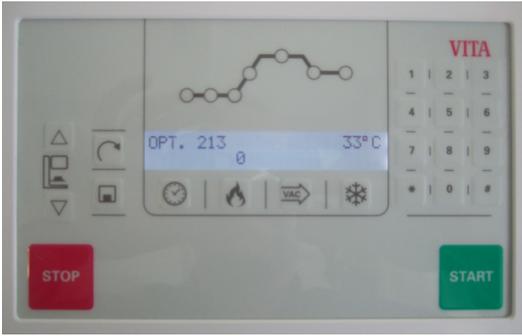
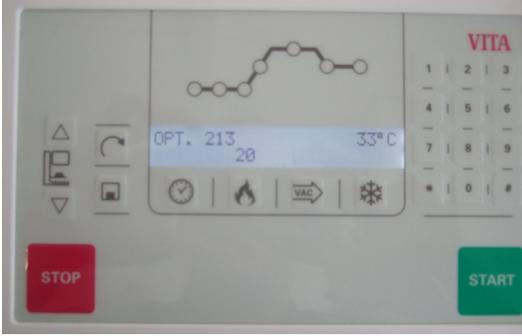
Wichtiger Hinweis:

Während dem gesamten Installationsvorgang muss der USB-Stick gesteckt bleiben und es dürfen keine weiteren Tastenbetätigungen vorgenommen werden!

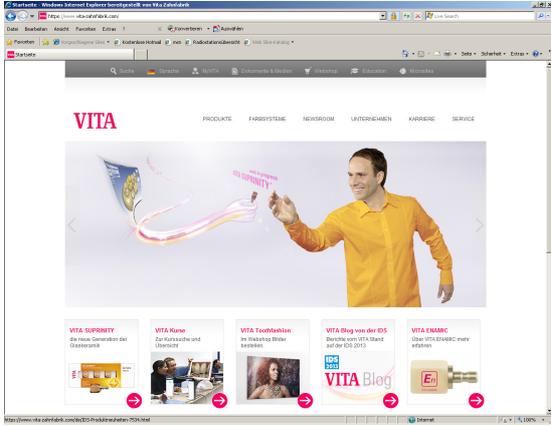
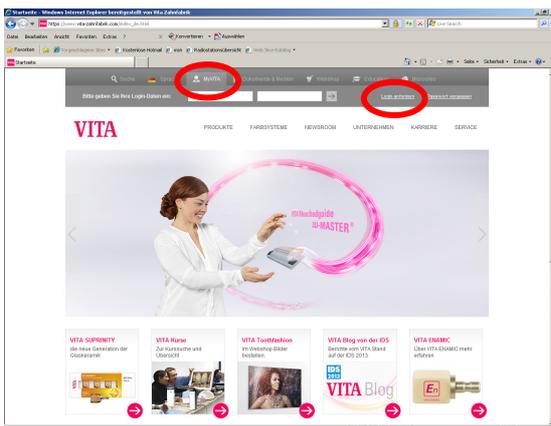
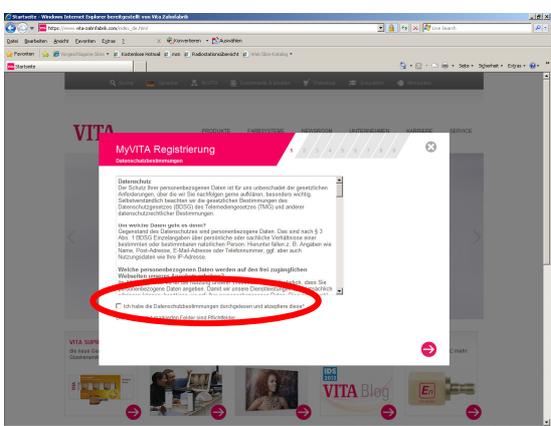
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion des Gerätes
5	Update muss manuell beendet werden (Gerät mit Hauptschalter ausschalten) wenn...	<p>...Statusanzeige nicht mehr aufleuchtet (= weiss) und Display zeigt die Meldung:</p> <p>„VITA Vacumat 6000 M“</p> 
6	USB-Stick mit „Software Update“ abziehen	---

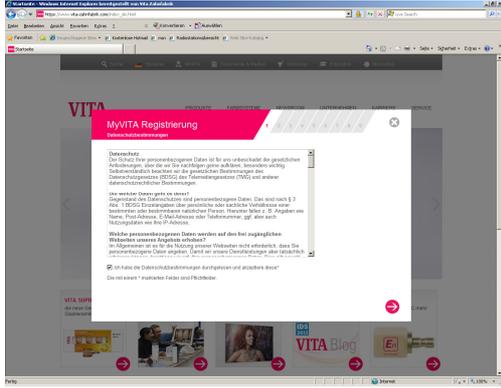
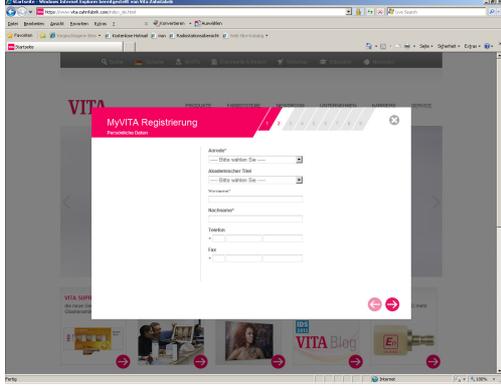
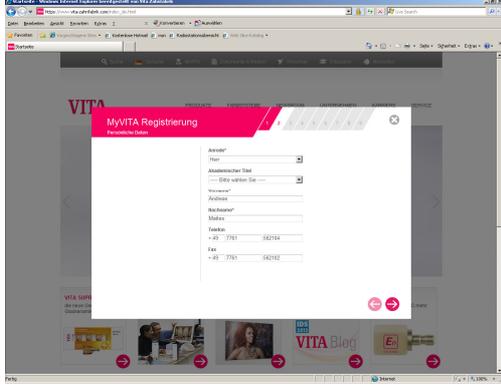
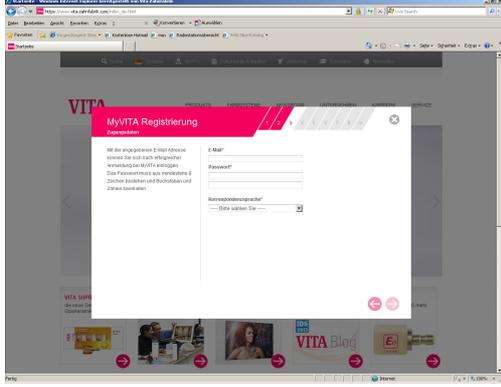
4. Gerätedaten und –einstellungen prüfen bzw. eingeben

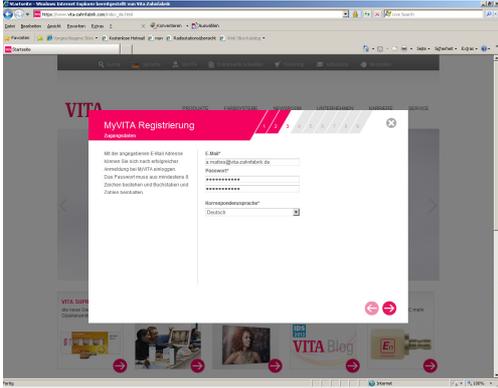
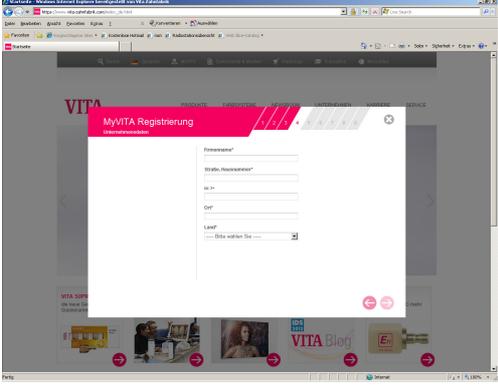
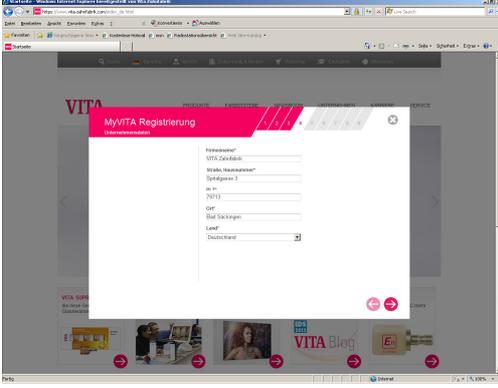
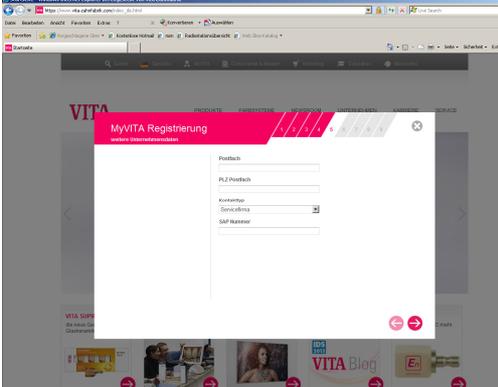
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion des Gerätes
1	Gerät mit Hauptschalter wieder einschalten	Lift ist in unterer Position
2	USB-Stick mit "Service-Software" einstecken	---
3	Signalton ertönt nach ca. 10-15 Sekunden	---
4	Programm Nr. "214" eingeben und mit Taste "#" bestätigen	Display zeigt Revisionsnummer (Software-Version) an: 
5	Bitte überprüfen Sie anhand der Revisions-Nr., ob die neue Software richtig installiert wurde. Sollte nicht die aktuelle Version angezeigt werden, muss das Update wiederholt werden!	---
6	Taste  betätigen	
7	Programm Nr. "204" eingeben und mit Taste "#" bestätigen	Vakuumjustage startet automatisch (Lift fährt hoch, Pumpe startet) Programm wird wieder automatisch abgeschaltet (Lift fährt in untere Position)

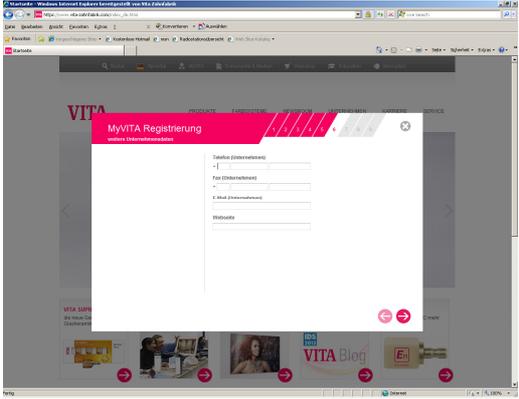
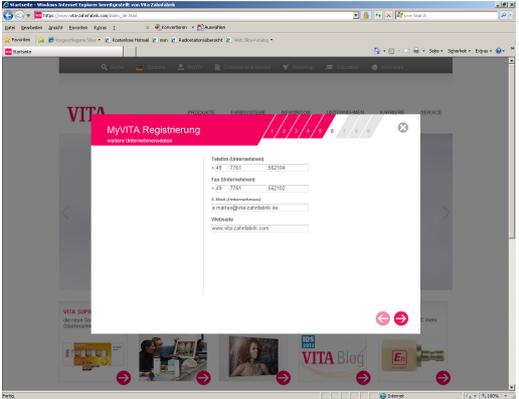
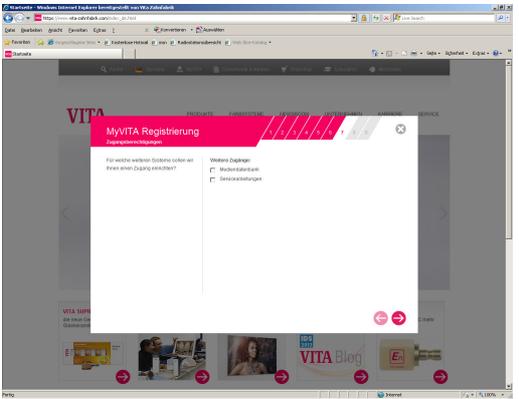
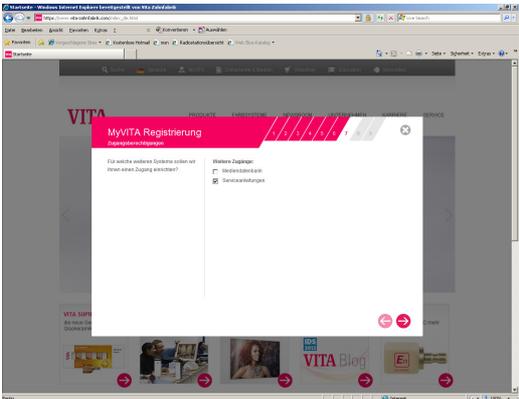
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion des Gerätes
8	Programm Nr. „213“ eingeben und mit Taste „#“ bestätigen	
9	Taste  betätigen	
10	Wert „30“ eingeben	---
11	Taste „#“ bestätigen	
12	Taste  betätigen	
13	Taste „#“ bestätigen	---
14	Taste  betätigen	Änderung wird gespeichert, Menü verlassen – Gerät ist wieder betriebsbereit

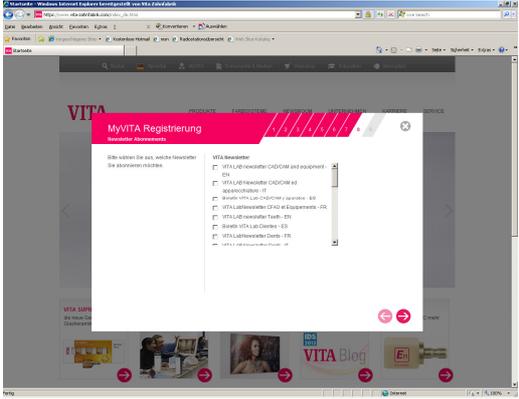
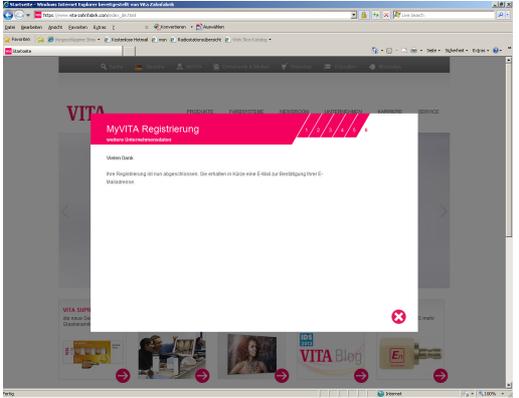
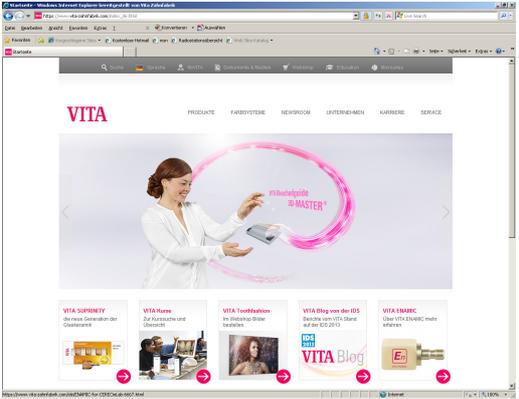
5. Registrierung im VITA Update-Messenger

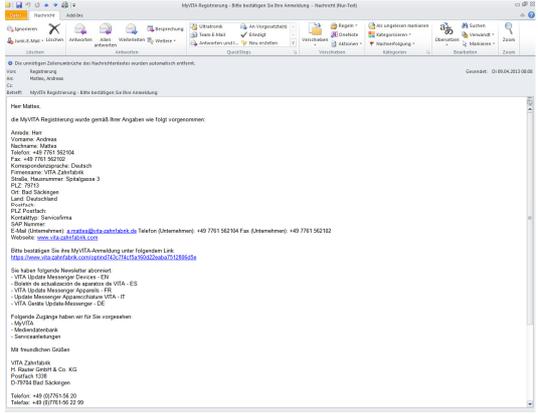
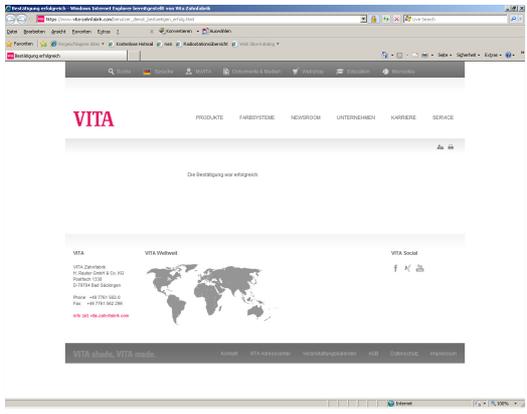
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
1	www.vita-zahnfabrik.com im Internet-Explorer aufrufen	
2	Auswahl „My VITA“ + „Login anfordern“	
3	Datenschutzbestimmungen akzeptieren	

Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
4	Taste  betätigen	 <p>The screenshot shows a web browser window with a 'MyVITA Registrierung' dialog box. The dialog has a red header and contains a warning message in German: 'Warnung! Die Speicherung personenbezogener Daten ist für uns unerlässlich...'. At the bottom of the dialog, there is a checkbox labeled 'Ich habe die Datenschutzbedingungen entgegengenommen und akzeptiere diese' which is checked.</p>
5	Erfassen der persönlichen Daten	 <p>The screenshot shows the 'MyVITA Registrierung' dialog box with the 'Persönliche Daten' section. It contains several input fields: 'Vorname*' (with a dropdown for 'Bitte wählen Sie'), 'Nachname*', 'Geburtsdatum', 'Geburtsort', 'Männlich' (checkbox), 'Weiblich' (checkbox), 'Telefon', 'Fax', and 'E-Mail'.</p>
6	Taste  betätigen	 <p>The screenshot shows the 'MyVITA Registrierung' dialog box with the 'Persönliche Daten' section. The input fields now contain values: 'Vorname*' is 'Hans', 'Nachname*' is 'Müller', 'Geburtsdatum' is '12.03.1985', 'Geburtsort' is '58714', 'Telefon' is '+49 7181 58714', and 'Fax' is '+49 7181 58714'. The 'E-Mail' field is empty.</p>
7	Erfassen Ihrer Email-Adresse, Passwort (2x) + Korrespondenzsprache	 <p>The screenshot shows the 'MyVITA Registrierung' dialog box with the 'Kontaktdaten' section. It contains input fields for 'E-Mail*' (with a dropdown for 'Bitte wählen Sie'), 'Passwort*', 'Passwort*', and 'Korrespondenzsprache*' (with a dropdown for 'Bitte wählen Sie').</p>

Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
8	Taste  betätigen	
9	Erfassen Ihrer Postanschrift	
10	Taste  betätigen	
11	Erfassen weiterer Unternehmensdaten	

Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
12	Taste  betätigen	
13	Erfassen weiterer Unternehmensdaten	
14	Taste  betätigen	
15	Auswahl der Zugangsberechtigungen	

Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
16	Taste  betätigen	
17	Auswahl der Newsletter Abonnements	
18	Taste  betätigen	
19	Taste  betätigen	

Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
20	Zustellung der Email	
21	Bestätigen der Anmeldung (Klick auf Link)	<p>Bitte bestätigen Sie ihre MyVITA-Anmeldung unter folgendem Link: https://www.vita-zahnfabrik.com/optind743c7f4c5a160d22eaba7512806d5e</p>
22	Internet-Explorer wird geöffnet und folgende Meldung unter www.vita-zahnfabrik.com angezeigt	
23	Zustellung der Bestätigungs-Email	