

VITA SUPRINITY® – Polishing Set clinical/technical

Para el pulido previo y el pulido de alto brillo fáciles de VITA SUPRINITY.



Toma del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 06.13

VITA shade, VITA made.

VITA

Descripción del producto

Los kits de pulido VITA SUPRINITY han sido desarrollados para tratar la superficie de restauraciones confeccionadas con cerámica de silicato de litio reforzada con dióxido de circonio (ZLS) de forma segura, económica y adecuada a las características del material, pudiendo utilizarse tanto en la clínica como en el laboratorio dental. Los kits incluyen

diversos pulidores para el pulido previo y el pulido de alto brillo. Con estos instrumentos pueden pulirse las superficies oclusales, cúspides, fosas y puntos de contacto de la restauración de forma respetuosa con el material. En el resultado final estos instrumentos de pulido consiguen unas superficies con un excelente nivel de brillo.

Véase el reverso

Ventajas del producto

Resultados finales excelentes:

Con estos instrumentos se consiguen unas superficies finales impecables y resistentes a la acumulación de placa. Una rotación exacta, las granulaciones coordinadas y las geometrías individuales de los instrumentos garantizan unos resultados de gran precisión.

Manipulación sencilla y segura:

Los instrumentos permiten un control excelente del rendimiento de pulido, acompañado de un escaso desgaste propio. La buena manipulación y el empleo sin pasta de pulido permiten trabajar de forma rápida y sencilla. Además, los instrumentos del kit clínico pueden esterilizarse, garantizándose así la seguridad.

Tratamiento respetuoso con el material:

Con estos instrumentos desarrollados especialmente para VITA SUPRINITY se garantiza un acabado respetuoso con el material. Se reduce, por ejemplo, el riesgo de formación de microfisuras.

Datos del producto

VITA SUPRINITY Polishing Set clinical:

Incluye un total de seis instrumentos para la pieza acodada. Incluye tres instrumentos para el pulido previo y tres para el pulido de alto brillo.

VITA SUPRINITY Polishing Set technical:

Incluye un total de ocho instrumentos para la pieza de mano. Incluye cuatro instrumentos para el pulido previo y cuatro para el pulido de alto brillo.

Surtidos VITA SUPRINITY®

Denominación	Descripción	Contenido/unidades	Ref.
VITA SUPRINITY Polishing Set clinical	Sistema de pulido en 2 etapas con instrumentos para el pulido previo y el pulido de alto brillo para la pieza acodada	6	ELSPSETC
VITA SUPRINITY Polishing Set technical	Sistema de pulido en 2 etapas con instrumentos para el pulido previo y el pulido de alto brillo para la pieza de mano	8	ELSPSETT

VITA SUPRINITY® Polishing Set clinical: envases de reposición

Denominación	Descripción	Contenido/unidades	Ref.
Pulido previo (rosa)	diamantado		
Instrumento de pulido, en forma de punta, S4m		6	ERWS4M6
Instrumento de pulido, lenticular, L10m		6	ERWL10M6
Instrumento de pulido, en forma de cáliz, C6m		6	ERWC6M6
Pulido de alto brillo (gris)	diamantado		
Instrumento de pulido, en forma de punta, S4f		6	ERWS4F6
Instrumento de pulido, lenticular, L10f		6	ERWL10F6
Instrumento de pulido, en forma de cáliz, C6f		6	ERWC6F6

VITA SUPRINITY® Polishing Set technical: envases de reposición

Denominación	Descripción	Contenido/unidades	Ref.
Pulido previo (rosa)	diamantado		
Instrumento de pulido, en forma de rueda, R15m		6	ERHR15M6
Instrumento de pulido, en forma de punta, S5m		6	ERHS5M6
Instrumento de pulido, lenticular, L16m		6	ERHL16M6
Instrumento de pulido, longpin, LPm		6	ERHLPm6
Pulido de alto brillo (gris)	diamantado		
Instrumento de pulido, en forma de rueda, R15f		6	ERHR15F6
Instrumento de pulido, en forma de punta, S5f		6	ERHS5F6
Instrumento de pulido, lenticular, L16f		6	ERHL16F6
Instrumento de pulido, longpin, LPf		6	ERHLPf6

Encontrará más información sobre VITA SUPRINITY en: www.vita-suprinity.de / www.vita-suprinity.com

VITA