

# VITA SUPRINITY® – Polishing Set clinical/technical

Para o fácil polimento preliminar e de alto brilho da cerâmica híbrida VITA SUPRINITY.



VITA Seleção de Cor

VITA Comunicação de Cor

VITA Reprodução de Cor

VITA Controle de Cor

Versão 10.14

VITA shade, VITA made.

**VITA**

## Descrição do produto

Os conjuntos de polimento VITA SUPRINITY foram desenvolvidos para o acabamento da superfície de restaurações de cerâmica de silicato de lítio reforçada com dióxido de zircônio (ZLS) de forma segura, económica e adequada às características do material, em consultório e em laboratório. Estes conjuntos incluem uma série de instrumentos para

polimento preliminar e de alto brilho. Estes instrumentos permitem o polimento de faces oclusais, cúspides, fissuras e pontos de contacto da restauração, protegendo o material. O resultado final obtido com estes instrumentos de polimento são superfícies com um nível de brilho muito bom.

## Vantagens do produto

### Resultados finais excelentes:

Com estes instrumentos pode obter excelentes resultados de superfície e resistentes à formação de placa bacteriana. Uma rotação exata, as granulações adaptadas e as geometrias individuais dos instrumentos garantem resultados de elevada precisão.

### Utilização simples e segura:

A taxa de remoção de material dos instrumentos é bem controlada e as propriedades de desgaste são baixas. A utilização simples e sem aplicação de pasta de polimento permite um processamento fácil e rápido. A capacidade de esterilização dos instrumentos clínicos garante também a segurança.

### Material adequado para aplicações delicadas:

Os instrumentos desenvolvidos especificamente para VITA SUPRINITY garantem um retrabalho que protege o material. Por exemplo, o risco de formação de microfissuras é reduzido.

## Dados do produto

### VITA SUPRINITY Polishing Set clinical:

Inclui um total de seis instrumentos para o contra-ângulo. Inclui três instrumentos para o polimento preliminar e três para o polimento de alto brilho.

### VITA SUPRINITY Polishing Set technical:

Inclui um total de oito instrumentos para a peça de mão. Inclui quatro instrumentos para o polimento preliminar e quatro para o polimento de alto brilho.

## Gamas de produtos VITA SUPRINITY®

Designação	Descrição	Conteúdo/Unidades	N.º art.
VITA SUPRINITY Polishing Set clinical	Sistema de polimento de 2 níveis com polimento preliminar e de alto brilho para o contra-ângulo	6	ELSPSETC
VITA SUPRINITY Polishing Set technical	Sistema de polimento de 2 níveis com polimento preliminar e de alto brilho para a peça de mão	8	ELSPSETT

## VITA SUPRINITY® Polishing Set clinical – embalagens de recarga

Designação	Descrição	Conteúdo/Unidades	N.º art.
<b>Polimento preliminar (rosa)</b>	diamantado		
Instrumento de polimento, ponta, S4m		6	ERWS4M6
Instrumento de polimento, lenticilha, L10m		6	ERWL10M6
Instrumento de polimento, concavo, C6m		6	ERWC6M6
<b>Polimento de alto brilho (cinza)</b>	diamantado		
Instrumento de polimento, ponta, S4f		6	ERWS4F6
Instrumento de polimento, lenticilha, L10f		6	ERWL10F6
Instrumento de polimento, concavo, C6f		6	ERWC6F6

## VITA SUPRINITY® Polishing Set technical – embalagens de recarga

Designação	Descrição	Conteúdo/Unidades	N.º art.
<b>Polimento preliminar (rosa)</b>	diamantado		
Instrumento de polimento, roda, R15m		6	ERHR15M6
Instrumento de polimento, ponta, S5m		6	ERHS5M6
Instrumento de polimento, lenticilha, L16m		6	ERHL16M6
Instrumento de polimento, pino longo, LPm		6	ERHLPm6
<b>Polimento de alto brilho (cinza)</b>	diamantado		
Instrumento de polimento, roda, R15f		6	ERHR15F6
Instrumento de polimento, ponta, S5f		6	ERHS5F6
Instrumento de polimento, lenticilha, L16f		6	ERHL16F6
Instrumento de polimento, pino longo, LPf		6	ERHLPf6

Para mais informação sobre VITA SUPRINITY aceda a: [www.vita-suprinity.de](http://www.vita-suprinity.de) / [www.vita-suprinity.com](http://www.vita-suprinity.com)

**VITA**