

VITA INTERNO®: naturalidad desde el interior

Conseguir características individuales, mamelones y calcificaciones naturales con suma sencillez



Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 03.15

VITA shade, VITA made.

VITA

Descripción del producto

VITA INTERNO son maquillajes de grano fino, de color intenso y muy fluorescentes para la caracterización interna de restauraciones de cerámica. Ofrecen una gama de aplicaciones prácticamente ilimitada para protésicos exigentes al permitir reproducir con absoluta naturalidad todas las características individuales del interior del diente.

Estos materiales, utilizables independientemente del CET, pueden mezclarse entre sí. Los usuarios se benefician de un margen de creatividad máximo con infinitas variaciones cromáticas. Ya se apliquen sin mezclar o se añadan a los materiales cerámicos, los maquillajes VITA INTERNO pueden emplearse con **todas** las cerámicas de recubrimiento VITA.

VITA INTERNO®: naturalidad desde el interior

Ámbito de aplicación

Las anomalías que aparecen en los dientes naturales son el modelo cromático de los colores VITA INTERNO. Con estos materiales es posible recrear efectos cromáticos naturales y adaptar cromáticamente las restauraciones cerámicas al modelo natural a la perfección.

En especial, VITA INTERNO permite reproducir de forma natural los efectos cromáticos que presentan los dientes naturales en la zona incisal.

Pueden emplearse solos o mezclados con Base Dentine, Opaque Dentine, Dentine, Enamel o con los materiales translúcidos.

Los materiales VITA INTERNO son aptos para uso universal con los siguientes productos: VITA VM 7, VM 9, VM 11, VM 13, VM 15, VITA VMK Master y VITA TITANKERAMIK.

Los materiales VITA INTERNO destacan por ser...

- De grano fino: gracias a ello, los materiales VITA INTERNO se aplican perfectamente en los materiales cerámicos.
- De color intenso: su intensidad cromática permite conseguir efectos cromáticos apreciables a través de los materiales superpuestos y que crean una intensidad cromática que surge del interior del recubrimiento.
- Muy fluorescentes: la fluorescencia produce la gran luminosidad de los colores y potencia la transmisión de la luz a través de la cerámica.
- Mezclables entre sí: los materiales INTERNO se pueden matizar y también personalizar cromáticamente mezclándolos con otros materiales INTERNO.
- Mezclables con todos los materiales cerámicos VITA: una vez mezclados con los materiales cerámicos, aumentan su fluorescencia y, con ello, la luminosidad natural de la cerámica en diferentes condiciones de luz.



VITA VM 7



VITA VM 9



VITA VM 11



VITA VM 13



VITA VM 15



VITA VMK Master



VITA TITANKERAMIK

VITA INTERNO®: el surtido




Kit VITA INTERNO (BISETV2)

Cantidad	Contenido	Material
14	3 g	VITA INTERNO Int01 - Int14
1	20 ml	VITA INTERNO FLUID
1		Espátula de vidrio para maquillajes
1		Pincel n.º 3/0 a & e
1		Paleta de mezclado de plástico VITA INTERNO (Ø 144 mm, con cavidades)
1		Disco de muestras de colores VITA INTERNO

“ Para mí, los maquillajes VITA INTERNO son la clave para unos recubrimientos con un aspecto completamente natural. ”

Experto en cerámica Renato Carretti, protésico de Zúrich

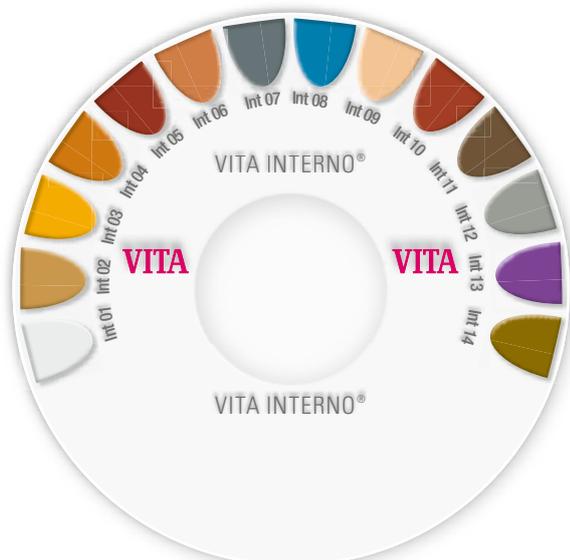

Colores VITA Interno

El surtido VITA INTERNO consta de 14 colores, que constituyen la base para obtener infinidad de tonalidades. Así, el usuario goza de una libertad sin límites a la hora de reproducir efectos dentales con una naturalidad convincente.

	Int 01 blanco		Int 08 azul
	Int 02 arena		Int 09 beige
	Int 03 amarillo		Int 10 marrón
	Int 04 naranja		Int 11 marrón grisáceo
	Int 05 terracota		Int 12 gris
	Int 06 marrón claro		Int 13 lila
	Int 07 antracita		Int 14 caqui

Envases individuales:

VITA INTERNO, 3 g

Denominación	Color	Ref. 3 g
Int01	blanco	BI013
Int02	arena	BI023
Int03	amarillo	BI033
Int04	naranja	BI043
Int05	terracota	BI053
Int06	marrón claro	BI063
Int07	antracita	BI073
Int08	azul	BI083
Int09	beige	BI093
Int10	marrón	BI103
Int11	marrón grisáceo	BI113
Int12	gris	BI123
Int13	lila	BI133
Int14	caqui	BI143

Instrumento para la selección del color VITA INTERNO:

Denominación	Ref.
Disco de muestras de colores VITA INTERNO	B444

Líquidos VITA INTERNO:

Denominación	Ref.
VITA INTERNO FLUID, 20 ml	BIF20

VITA