

VITAVM.11

Information produit



Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

Édition 11.15

VITA shade, VITA made.

VITA

Céramique à structure fine pour la personnalisation des restaurations en céramique vitreuse à base de silicate de lithium dopé au dioxyde de zirconium (ZLS) spéciale pour VITA SUPRINITY.



III. 1 : masses effet VITA VM 11

Céramique à structure fine pour la personnalisation de VITA SUPRINITY

VITA VM 11 est une céramique feldspathique à structure fine et basse fusion. Elle a été mise au point spécialement pour la personnalisation des restaurations en céramique vitreuse à base de silicate de lithium dopée au dioxyde de zirconium (ZLS).

La nouvelle génération de céramique vitreuse impose de nouvelles exigences aux céramiques cosmétiques en matière de CDT. Les CDT précisément harmonisés du matériau d'infrastructure et du matériau cosmétique assurent une excellente cohésion et sécurisent les résultats, tout en évitant les déformations et réduisant les tensions au sein de l'incrustation.

Avantages du produit



III. 2

Restaurations d'une grande esthétique

La forte translucidité et les couleurs chaudes de VITA VM 11 conjuguées à l'opalescence de VITA SUPRINITY donnent un résultat très esthétique et un jeu de couleurs dynamique.

Cohésion sûre

La parfaite harmonisation des deux plages de CDT garantit une cohésion sans tension et donc sûre.



III. 3

Remarquable aptitude à l'usinage et au polissage

Avec la fameuse structure fine dont est dotée la céramique VITA VM 11 la surface obtenue est lisse et bien dense. Elle se fraise et se polit aisément.

Mise en œuvre simple

Une remarquable tenue, un retrait minime et une grande solidité des bords caractérisent VITA VM 11. En association avec VITA SUPRINITY, il est possible grâce à la remarquable mouillabilité de surface de la nouvelle céramique vitreuse d'effectuer directement le montage cosmétique sans liner ou lait.



III. 4

Stabilité de premier ordre à la cuisson

VITA VM 11 est dotée de propriétés à la cuisson de tout premier ordre et conserve sa forme même après plusieurs cuissons.

Les photos 2 - 4 ont été réalisées avec l'aimable coopération du maître prothésiste dentaire Heike Assmann.

* utilisable également pour CELTRA[®] et CELTRA[®] CAD FC.
CELTRA est une marque déposée de DeguDent GmbH.



Assortiments

VITAVM®11 DENTINE KIT 3D-MASTER, BV11DK

Quantité	Contenu	Matériau
6	12 g	TRANSPA DENTINE 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	50 ml	LOW FUSING MODELLING LIQUID
		Mode d'emploi

VITAVM®11 DENTINE KIT classical, BV11DKC

Quantité	Contenu	Matériau
8	12 g	TRANSPA DENTINE A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	50 ml	LOW FUSING MODELLING LIQUID
		Mode d'emploi

VITAVM®11 CREATIVE KIT, BV11CKV1

Quantité	Contenu	Matériau
3	12 g	SUN DENTINE SD1-SD3
2	12 g	MAMELON MM1, MM3
7	12 g	EFFECT ENAMEL EE1, EE3, EE5, EE7, EE8, EE9, EE11
3	12 g	EFFECT CHROMA EC1, EC5, EC11
1	12 g	EFFECT PEARL EP1
4	12 g	EFFECT OPAL E01-E03, E05
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	12 g	NEUTRAL, NT
1	12 g	WINDOW, WIN
1	50 ml	LOW FUSING MODELLING LIQUID
2		Plaquettes de couleurs échantillons VITA VM 11
		Mode d'emploi


Poudres à l'unité

VITAVM®11

Couleur	Matériau	Contenu	N° art.
0M1	TRANSPA DENTINE	12 g	B4906112
1M1	TRANSPA DENTINE	12 g	B4906412
1M2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4906512
2M2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4906912
3M2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4907612
4M2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4908312
A1	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945112
A2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945212
A3	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945312
A3.5	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945412
B2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945712
C2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4946112
D2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4946412
WIN	WINDOW	12 g	B4918112
NT	NEUTRAL	12 g	B4920112
ENL	ENAMEL light	12 g	B4919112
END	ENAMEL dark	12 g	B4919212
MM1	MAMELON	12 g	B4916112
MM3	MAMELON	12 g	B4916312

Couleur	Matériau	Contenu	N° art.
EP1	EFFECT PEARL	12 g	B4915112
E01	EFFECT OPAL	12 g	B4917112
E02	EFFECT OPAL	12 g	B4917212
E03	EFFECT OPAL	12 g	B4917312
E05	EFFECT OPAL	12 g	B4917512
EC1	EFFECT CHROMA	12 g	B4912112
EC5	EFFECT CHROMA	12 g	B4912512
EC11	EFFECT CHROMA	12 g	B4913112
EE1	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909112
EE3	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909312
EE5	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909512
EE7	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909712
EE8	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909812
EE9	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909912
EE11	EFFECT ENAMEL	12 g	B4910112
SD1	SUN DENTINE	12 g	B4936112
SD2	SUN DENTINE	12 g	B4936212
SD3	SUN DENTINE	12 g	B4936312

Le système inédit VITA SYSTEM 3D-MASTER permet de définir d'une manière systématique toutes les couleurs de dent naturelles et de les reproduire intégralement.

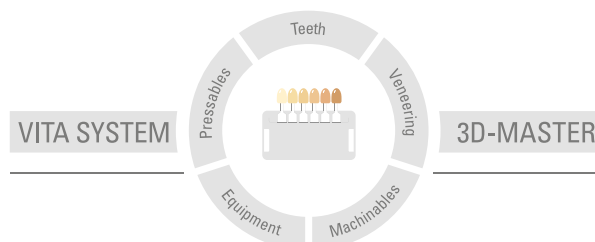

N.B. : nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés. De plus, notre responsabilité quant à l'exactitude de ces données, indépendamment des dispositions légales, et dans la mesure où la loi l'autorise, se limite en tous cas à la valeur de la marchandise livrée selon facture hors taxes. En outre et dans la mesure où la loi l'autorise, notre responsabilité ne peut, en aucun cas, être engagée pour les pertes de bénéfices, pour les dommages directs ou indirects, pour les recours de tiers contre l'acheteur. Toute demande de dommages et intérêts pour faute commise (faute lors de l'établissement du contrat, entorse au contrat, négociations illicites etc.) n'est possible qu'en cas de préméditation ou de négligence caractérisée. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit.

Date d'édition : 11.15

Cette nouvelle édition du mode d'emploi rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik est certifié selon la directive sur les dispositifs médicaux et les produits suivants portent le marquage **CE** 0124 :

VITAVM.11 - VITA SUPRINITY®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik