

Anleitung zur Durchführung von Softwareupdates mit den Geräten

- 1. VITA VACUMAT 6000 M**
- 2. VITA VACUMAT 6000 MP**
- 3. VITA ZYRCOMAT 6000 MS**
- 4. VITA vPad comfort**
- 5. VITA vPad excellence**
- 6. VITA vPad clinical**

Sehr geehrte(r) Kunde/in, liebe Anwender/innen,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über das neue Softwareupdate für Ihr VITA Gerät und Sie bitten die Updates gemäß der nachstehenden Anleitung auf Ihrem Gerät zu installieren.

Bei Fragen zu diesem Update wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen Servicepartner für VITA Geräte. Zusätzlich erreichen Sie den VITA Geräteservice unter:

- Tel.: +49 (0)77 61 / 562 – 101, -105 oder -106
- Fax: +49 (0)77 61 / 562 – 102
- Email: instruments-service@vita-zahnfabrik.com

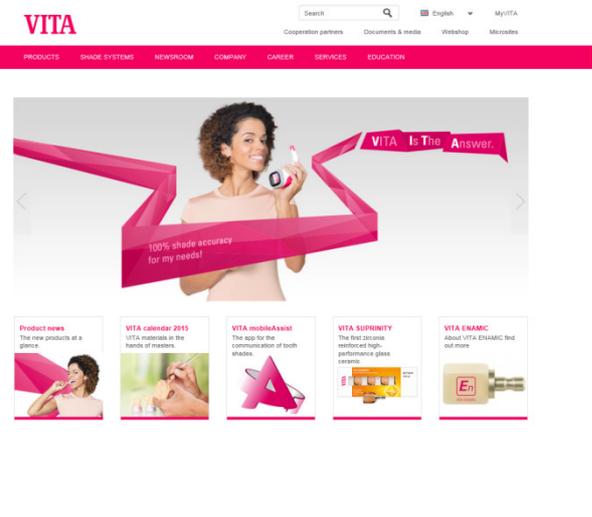
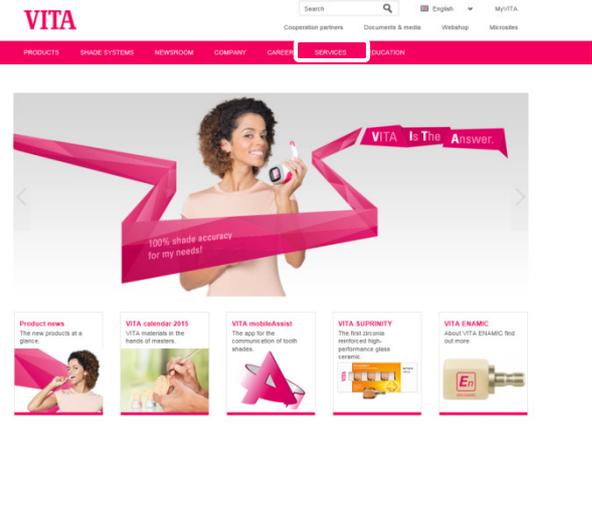
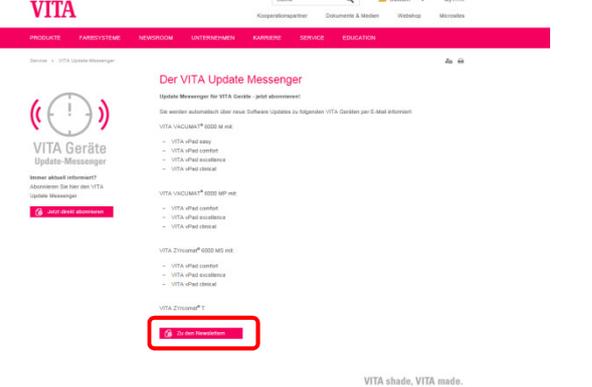
1. Allgemeines Vorgehen

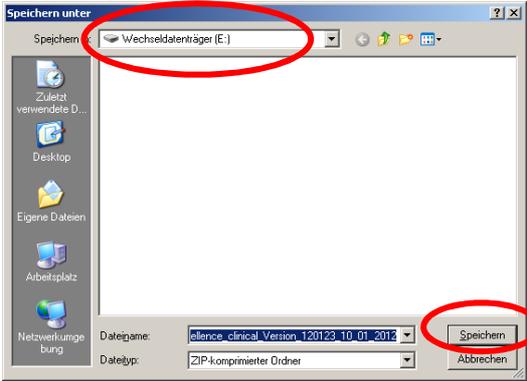
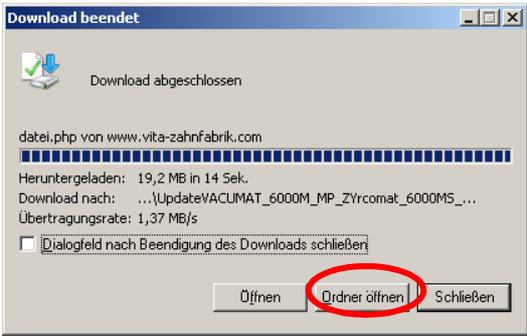
1. Softwareupdate aus dem Internet herunterladen und auf USB-Stick speichern
2. Erstellen einer Sicherungskopie Ihrer eigenen User bzw. Materialien und Programme
3. Softwareupdate für VITA VACUMAT 6000 M, VITA VACUMAT 6000 MP und VITA ZYRCOMAT 6000 MS installieren
4. Gerätedaten und -einstellungen prüfen bzw. eingeben
5. Eigene (zuvor gesicherte) User bzw. Materialien und Programme wieder installieren
6. Registrierung im VITA Update-Messenger

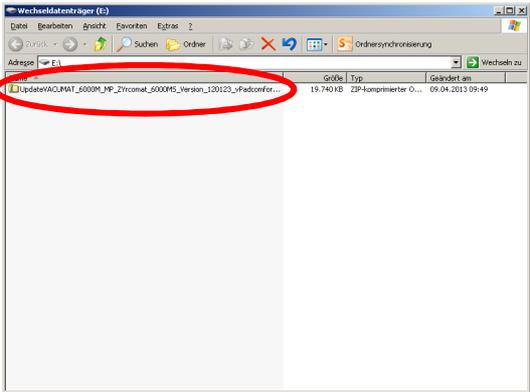
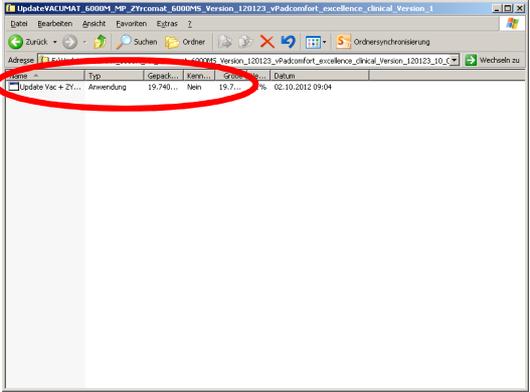
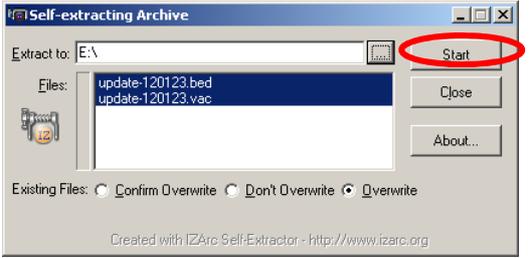
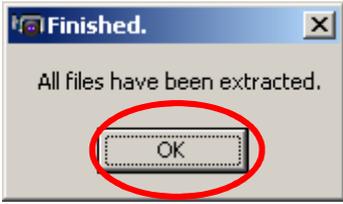
2. Voraussetzungen für Download und Installation

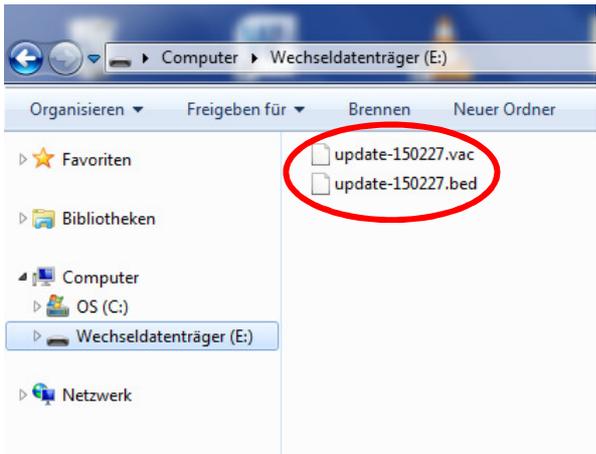
- a) Internetzugang
- b) Leerer USB-Stick

1. Neues Softwareupdate aus dem Internet laden und auf USB-Stick speichern

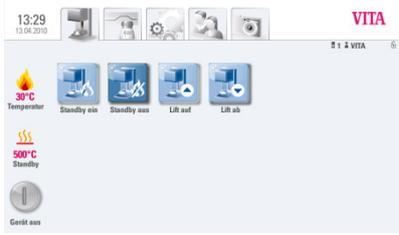
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
1	<p>www.vita-zahnfabrik.com im Webbrowser aufrufen</p>	
2	<p>Auswahl „Service“ + „VITA Update-Messenger“</p>	
3	<p>Auswahl „Zu den Newslettern“</p>	

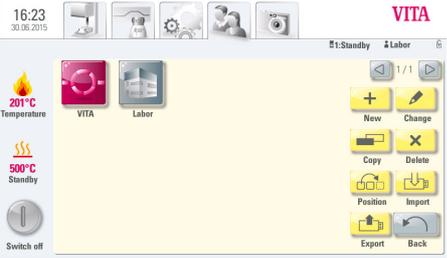
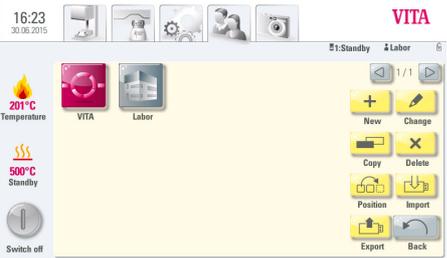
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
4	Auswahl des aktuellen Newsletters	
5	Auswahl des gewünschten Updates	
6	Auswahl „Speichern“	
7	Laufwerk des USB-Sticks auswählen (Wechseldatenträger) , dann „Speichern“	
8	„Ordner öffnen“ auswählen	

Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
9	Doppelklick auf Datei	
10	Doppelklick auf Datei	
11	Taste „Start“ bestätigen	
12	Meldung mit „OK“ bestätigen	

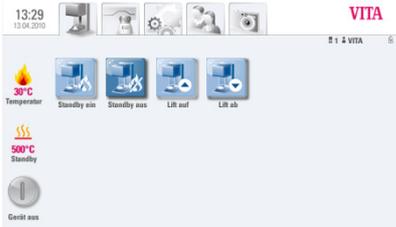
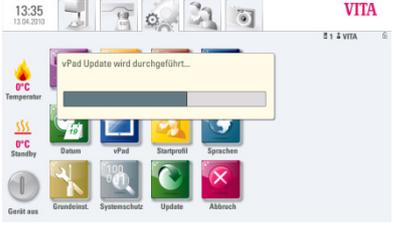
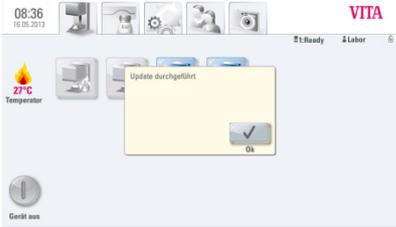
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
13	USB-Stick enthält nun die Updatedaten	
14	USB-Stick von Computer trennen	

2. Erstellen einer Sicherungskopie Ihrer eigenen User bzw. Programme

Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion des Gerätes
1	Gerät mit Hauptschalter einschalten	Lift fährt in untere Position
2	Leeren USB-Stick seitlich im VITA vPad einstecken	Display zeigt: 
3	Reiter  betätigen	Display zeigt: 

4	Taste  betätigen	<p>Display zeigt:</p> 
5	User, welcher exportiert werden soll, auswählen	<p>User wird markiert</p> <p>Display zeigt:</p> 
6	Taste  betätigen	<p>Display zeigt:</p> 
7	Taste  betätigen	User wird auf USB-Stick gespeichert
8	Taste  betätigen	<p>Display zeigt:</p> 

3. Software-Update installieren

Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion des Gerätes
<p>Wichtiger Hinweis: Lift muss in unterer Position sein + kein Programm (inkl. Standby) aktiv</p>		
1	USB-Stick mit Software-Update seitlich im VITA vPad einstecken	Display zeigt: 
2	Reiter  auswählen	Display zeigt: 
3	Taste  betätigen	Display zeigt:  <p>Nach Beendigung des Updates zeigt das Display:</p> 

4	<p>Meldung mit Taste bestätigen.</p> 	<p>Display zeigt:</p> 
---	--	--

Wichtiger Hinweis:

Während des gesamten Installationsvorgangs muss der USB-Stick eingesteckt bleiben und es dürfen keine weiteren Tastenbetätigungen vorgenommen werden!

Die Installation ist dann abgeschlossen, wenn das Startbild wieder angezeigt wird



ACHTUNG:
 Es muss die tatsächliche Brennraumtemperatur sowie die voreingestellte Standby-Temperatur angezeigt werden!
 Wird hier für diese beiden Werte „0 °C“ angezeigt, dann ist die Installation des Updates noch nicht abgeschlossen!

Information:

Wird beim ersten Betätigen des Button  die Meldung „*Kein neues Update gefunden*“ angezeigt, dann diese Meldung mit Taste  bestätigen und Button  erneut betätigen.

Update im Mehrofenbetrieb

Zur Durchführung eines Software-Updates im Mehrofenbetrieb müssen die Geräte einzeln geupdated werden, d.h. die Switchbox muss entfernt und das VITA vPad nacheinander an jedes einzelne Gerät angeschlossen und dann das Update entsprechend dieser Anweisung durchgeführt werden.

Um die gewünschte Anzeige-Reihenfolge der Geräte auf dem VITA vPad zu erhalten, müssen die Geräte nach dem Softwareupdate in der entsprechenden Reihenfolge mit dem Hauptschalter eingeschaltet werden.

Beispiel: es wird ein VITA VACUMAT 6000 M und ein VITA VACUMAT 6000 MP über die VITA Switchbox mit einem VITA vPad comfort betrieben. Hier soll der VITA VACUMAT 6000 M als „Nr. 1“ und der VITA VACUMAT 6000 MP als „Nr. 2“ auf dem VITA vPad angezeigt werden. In diesem Fall muss zunächst der VITA VACUMAT 6000 M mit dem Hauptschalter eingeschaltet werden. Danach warten Sie bitte, bis das Startmenü auf dem VITA vPad angezeigt wird. Erst jetzt darf der VITA VACUMAT 6000 MP, welcher als „Nr. 2“ angezeigt werden soll, mit dem Hauptschalter eingeschaltet werden. Dieses Gerät wird nun automatisch im Startmenü an der gewünschten Position hinzugefügt.

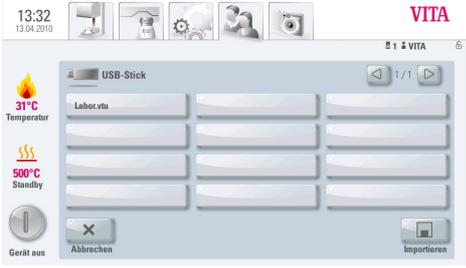
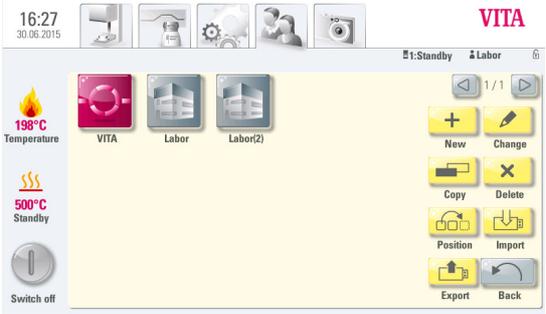
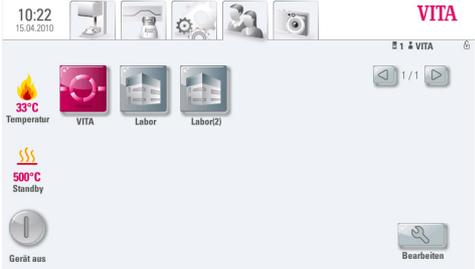
Bitte beachten Sie, dass nach der Installation der neuen Software die Gerätedaten und Geräteeinstellungen im Servicebereich an jedem einzelnen Gerät überprüft bzw. eingegeben werden müssen! Siehe hierzu den nachfolgenden Punkt dieser Anleitung.

4. Gerätedaten und –einstellungen prüfen bzw. eingeben		
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion des Gerätes
1	Reiter  betätigen	<p>Display zeigt:</p> 
2	Taste  betätigen	<p>Display zeigt:</p> 
3	Bitte überprüfen Sie anhand der Revisions-Nr., ob die neue Software richtig installiert wurde. Sollte nicht die aktuelle Version angezeigt werden, muss das Update wiederholt werden!	---
4	Anschließend mit Taste  bestätigen	Display zeigt:

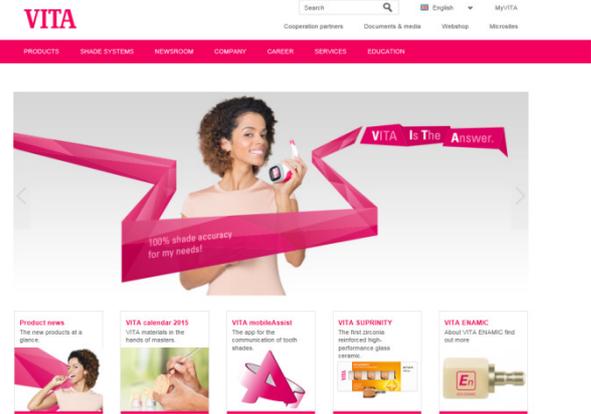
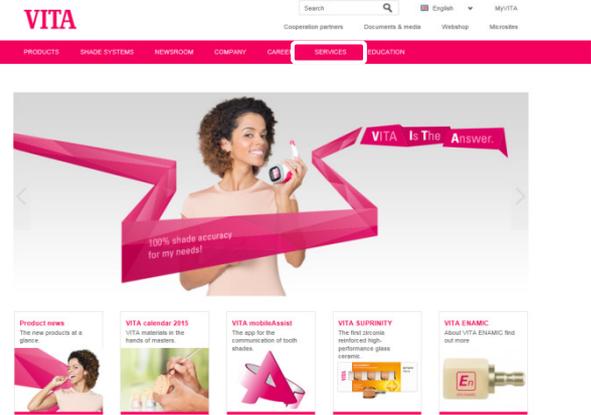


5. Eigene User bzw. Programme wieder installieren

Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion des Gerätes
1	USB-Stick mit zuvor gesicherten Usern bzw. Programmen im VITA vPad einstecken	Display zeigt:
2	Reiter  betätigen	Display zeigt:
3	Taste  betätigen	Display zeigt:

4	User, welcher importiert werden soll, auswählen	User wird markiert
5	Taste  betätigen	Display zeigt: 
Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion des Gerätes
6	Taste  betätigen	Display zeigt: 
7	Taste  betätigen	Display zeigt: 

6. Registrierung im VITA Update-Messenger

Schritt	Eingabe durch Anwender	Funktion
1	<p>www.vita-zahnfabrik.com im Webbrowser aufrufen</p>	
2	<p>Auswahl „Service“ + „VITA Update-Messenger“</p>	

3

„Jetzt direkt abonnieren“ wählen und um Anschluss bitte den Registrierungsschritten folgen.

The screenshot shows the VITA website's 'Update-Messenger' registration page. The page features a red header with the VITA logo and navigation links. The main content area is titled 'Der VITA Update Messenger' and includes a sub-header 'Update-Messenger für VITA Geräte - jetzt abonnieren!'. Below this, there is a list of VITA products eligible for updates, such as VITA VACUUMAL® 6000 M, VITA Zirconium® 6000 M3, and VITA Zirconium® F. A red circle highlights the 'Jetzt direkt abonnieren' button, which is the next step in the registration process.