
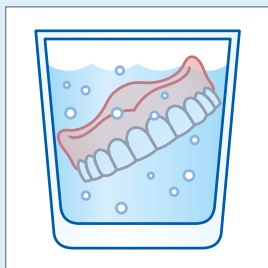
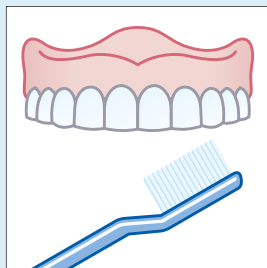


## Der sichere Weg zur sauberen Prothese

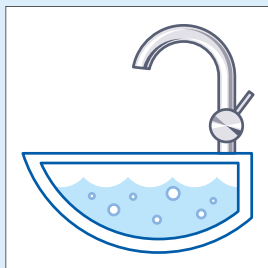

Stand 09.15

VITA shade, VITA made.

**VITA**



**Liebe Patientin, lieber Patient,**

heute haben Sie Ihre neue Zahnprothese von uns erhalten – vielen Dank für Ihr Vertrauen !

Ein **hochqualifiziertes Team aus Zahnarzt, Zahnarzhelferin und Zahntechnikern** hat Ihren Zahnersatz mit den **besten Materialien und nach den neuesten Erkenntnissen** individuell für Sie gefertigt.

Dank des Einsatzes von VITA Prothesenzähnen unterstützt Ihre Zahnprothese wie bisher Ihr **natürliches Lächeln**. Freuen Sie sich über **hervorragende Funktionalität** und **außerordentlichen Tragekomfort**.

Damit Sie möglichst lang Freude an Ihrer Zahnprothese haben, Ihre Gesundheit schonen und es zu keinen störenden Beeinträchtigungen kommt, geben wir Ihnen auf diesem Wege einige Pflegehinweise mit auf den Weg. Für Fragen darüber hinaus kontaktieren Sie uns bitte jederzeit – **unsere Kontaktinformationen finden Sie auf der Rückseite**.


## Erster Reinigungsschritt: Spülen



Zum **Schutz vor Ablagerungen** und zur **Vermeidung von Entzündungen** reinigen Sie bitte die gesamte Prothese täglich **morgens und abends** gründlich unter **fließendem Wasser**.

Um die Prothese optimal zu schützen, empfehlen wir die Reinigung in einem mit Wasser gefüllten Waschbecken. Alternativ können Sie auch ein Handtuch auf den Boden Ihres Waschbeckens legen.

## Zweiter Reinigungsschritt: Reinigung und Bürsten

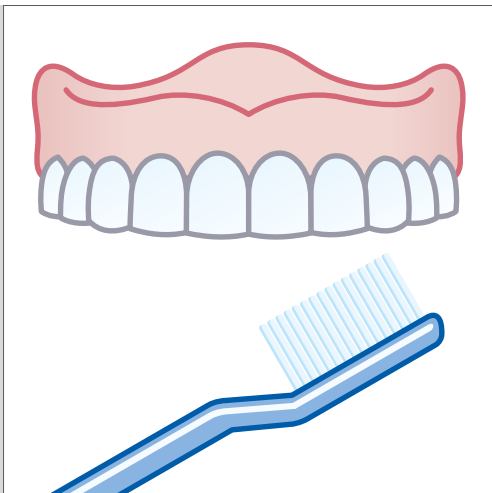


Anschließend reinigen Sie die Prothese in der Hand **mit einer weichen Bürste** sanft nach. Am besten eignen sich hierfür Handzahnbursten oder Zahnprothesenbürsten mit **Nylonborsten**.

**Wichtig:** Bitte bürsten Sie wirklich **alle Zähne** sorgfältig, und achten Sie besonders auf die **Zwischenräume** und alle Stellen, an denen Kontakt zum Zahnfleisch oder natürlichen Zähnen besteht.

Nutzen Sie für die Reinigung bitte **warmes Wasser** und eine **Zahncreme OHNE Schleifpartikel**.

## Dritter Reinigungsschritt: Einweichen

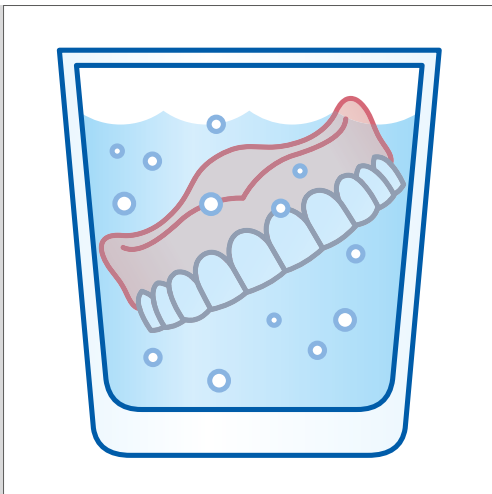

**Spülen** Sie die Prothese nach dem Putzen nochmals gründlich **mit kaltem Wasser** ab und legen Sie sie danach zur **Tiefenreinigung** in ein ausreichend großes, mit Wasser **gefülltes Gefäß**.

Sollten Sie trotz regelmäßiger Reinigung einmal Ablagerungen feststellen, können Sie auf ein Ultraschallreinigungsgerät zurückgreifen. Sprechen Sie dazu auch Ihren Zahnarzt an. Zusätzlich ist ein zehnmütiges Bad in einer 5–10%igen Essiglösung möglich. Um die Langlebigkeit der Zahnprothese mit VITA Zähnen garantieren zu können, empfehlen wir Ihnen, auf teilweise recht aggressive Reinigungstabletten oder -lösungen zu verzichten und die hier genannten Reinigungshinweise zu beachten.

## Vierter Reinigungsschritt: Abspülen



**Vor dem nächsten Tragen** die Prothese nochmals gründlich unter **fließendem Wasser** abspülen.

Die regelmäßige Reinigung sowie Kontrolle bei Ihrem Zahnarzt wird dafür sorgen, dass die hohe Qualität Ihrer Prothese lange erhalten bleiben wird. Zusätzlich schützen Sie auf diesem Wege Ihre Gesundheit und beugen möglichen Reparaturkosten vor.

**Wir wünschen Ihnen stets einen guten Biss!**



Mit freundlicher Empfehlung Ihres Zahnarztes / Zahntechnikers

**Wir unterstützen Sie gern!**

**VITA**

---

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49 (0) 7761 / 562-0 · Fax +49 (0) 7761 / 562-299

Hotline: Tel. +49 (0) 7761 / 562-222 · Fax +49 (0) 7761 / 562-446

[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)

 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)