


Procedura per una pulizia sicura della protesi

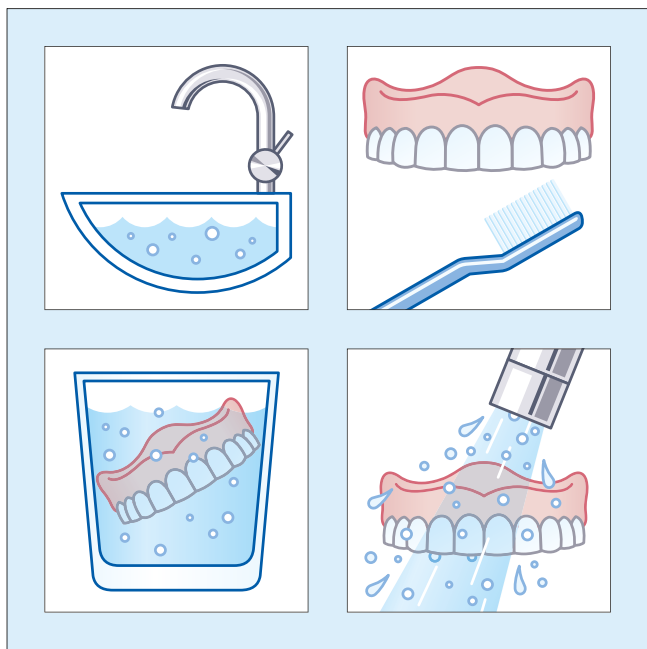

Data 09.15

VITA shade, VITA made.

VITA

Gentile paziente,

oggi Le abbiamo consegnato la nuova protesi - La ringraziamo per la fiducia accordataci!

Un **team altamente qualificato formato da dentista, assistente alla poltrona e odontotecnico** ha realizzato la protesi con i **migliori materiali e secondo le cognizioni più aggiornate** appositamente per Lei.

L'impiego di denti VITA per la Sua protesi Le consente di sorridere in modo **naturale**. Potrà constatare l'**eccellente funzionalità** e lo **straordinario confort d'uso**.

Per allungare la vita della protesi, preservare la salute ed evitare disturbi Le diamo alcuni suggerimenti per la cura e manutenzione. In caso di domande ci chiami – **sull'ultima pagina trova i nostri contatti**.


Primo passo: sciacquare



Per **prevenire depositi** ed **evitare infiammazioni** **mattina e sera** pulire alla perfezione la protesi **sotto acqua corrente**.

Per maggior sicurezza si consiglia di lavarla in un lavandino pieno d'acqua. In alternativa stendere un asciugamano sul fondo del lavandino.

Secondo passo: spazzolare

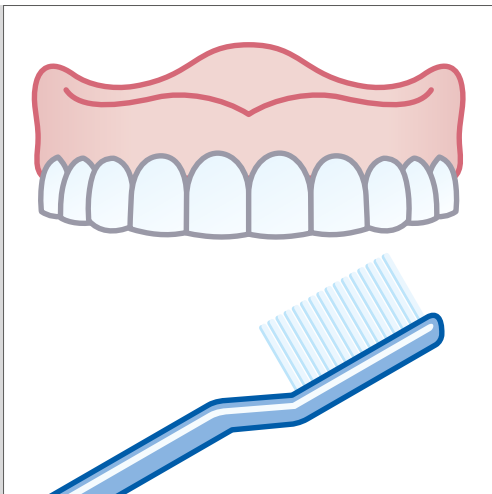


Tenere la protesi con la mano e pulirla delicatamente con **una spazzola morbida**. Sono particolarmente indicati spazzolini da denti manuali oppure spazzolini per protesi con **setole in nylon**.

Importante: spazzolare perfettamente **tutti i denti**, prestare particolare attenzione agli **spazi interdentali** e a tutti i punti in contatto con la gengiva o i denti naturali.

Per il lavaggio usare **acqua calda** ed un **dentifricio PRIVO di abrasivi**.

Terzo passo: bagno di immersione

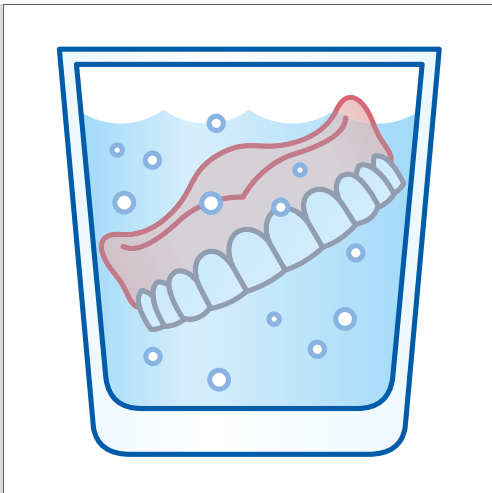

Dopo averla spazzolata **lavare** accuratamente la protesi con **acqua fredda** e per una **pulizia più profonda** immergerla in un **contenitore** capiente **colmo** d'acqua.

Se nonostante la regolare pulizia dovessero verificarsi dei depositi, è possibile utilizzare un ablatore a ultrasuoni. Rivolgersi al dentista di fiducia. Può essere utile immergere la protesi per 10 minuti in una soluzione di aceto al 5 – 10%. Per garantire una lunga vita alla protesi con denti VITA, si consiglia di non usare pastiglie o soluzioni detergenti, spesso aggressive, e di attenersi alla procedura descritta.

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
Quarto passo: risciacquare



Prima di riutilizzare la protesi sciacquarla nuovamente sotto **acqua corrente**.

Con la regolare pulizia e controlli periodici dal dentista l'elevata qualità della protesi dura nel tempo. In tal modo si preserva anche la salute e si evitano costi di riparazione.

Le auguriamo una masticazione sempre efficace!



Con i complimenti del Suo dentista / odontotecnico

Siamo a Sua disposizione!

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299

Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

 facebook.com/vita.zahnfabrik