



При включване на VITA Easyshade® V към зареждащото устройство се извършва автоматично калибриране.


При включване на VITA Easyshade® V извън зареждащото устройство се изисква калибриране (виж изображението вляво). Моля, поставете уреда на зареждащото устройство. Калибрирането стартира автоматично.

Bluetooth® настройки за връзка с Windows-PC, Android- и iOS-уреди:


Избиране на Настройки



Избиране на символ Bluetooth®

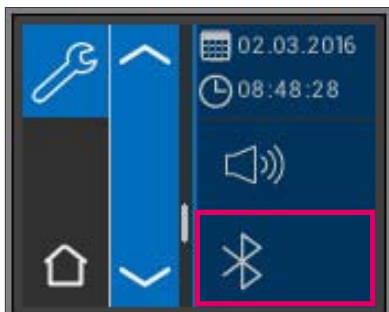

Показване на символа Bluetooth®: Bluetooth® е изключен (0), за включване придвижете плъзгача на дясно (I).

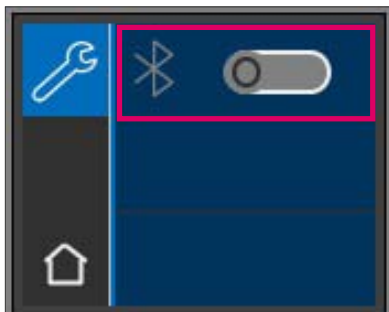



За комуникация с Windows-PC или Android-уреди:

Включване на Bluetooth® (I). VITA Easyshade® V е автоматично видим за 2 минути (символът Катинар е отворен) и може да бъде разпознат от Windows-PC или Android-уреди и съответно свързан с тях.



За комуникация с iOS-уреди:

Включване на Bluetooth® (I), превключване на iOS (придвижване на плъзгача iOS на дясно (I)).


Чрез докосване на символа Катинар, VITA Easyshade® V автоматично става видим 2 минути за Bluetooth®-уреди и може да бъде открит от iOS-уреди и съответно свързан към тях. Моля, изчакайте докато връзката се прекъсне отново. След това връзката се възстановява автоматично за пренасяне на данните.



Пренасяне на резултати от измервания чрез Bluetooth® посредством докосване на символа Режим. Препращането на данни е възможно във всички измервателни режими и в режим Запаметяване. Резултати от измервания в режим Възстановявания могат да се пренасят само към VITA ShadeAssist на Windows-PC.




За пренасяне на данни към Windows- и Android-уреди, VITA Easyshade® V трябва да е свързан със съответния уред. Осъществена връзка се показва в режим Измерване като вълна. При iOS-уреди, преди пренасяне на данните, автоматично се създава връзка и след това отново се прекъсва.

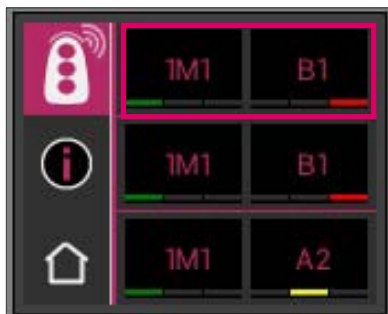

Детайли за цвета:


Резултати от измервания в зоната на зъба.

Чрез докосване на дадена стойност за цвят се виждат детайли за показанието.

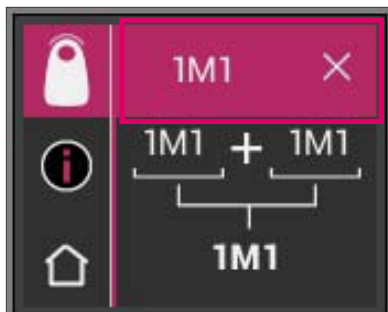


Детайли за стойността на VITA SYSTEM 3D-MASTER® цвят.

Чрез ново докосване на стойността на цвета в горния ред се стига до показване на координатите на цвета.

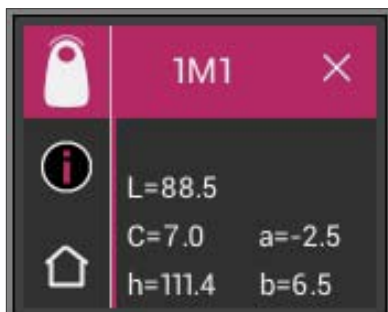

Показание на координатите за цветовете VITA SYSTEM 3D-MASTER®.

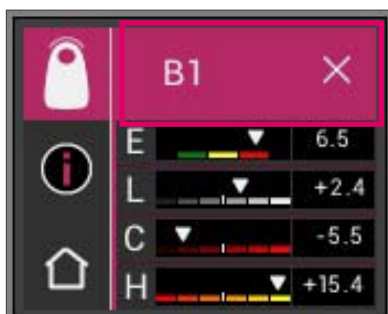

Детайли за стойността на VITA classical A1-D4® цвят.

Чрез ново докосване на стойността на цвета в горния ред се стига до показване на координатите на цвета.



Показание на координатите за цветовете VITA classical A1-D4®.