




Po zapnutí VITA Easyshade® V v nabíjecí stanici dojde k automatické kalibraci. Po zapnutí VITA Easyshade® V mimo nabíjecí stanici se objeví požadavek k provedení kalibrace (viz obrázek vlevo). Přístroj vložte do nabíjecí stanice. Kalibrace se spustí automaticky.

Bluetooth® nastavení pro spojení s počítači, které pracují ve Windows, přístroji s Android a iOS:


Zvolte nastavení



Zvolte symbol Bluetooth®

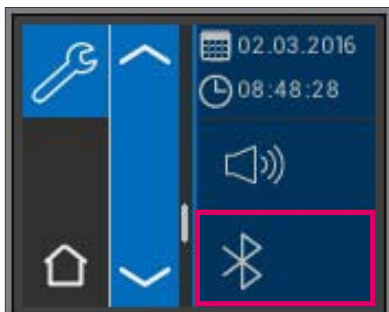

Zobrazení Bluetooth®: Bluetooth® je vypnuté (0) pro zapnutí posuňte spínač doprava (I)

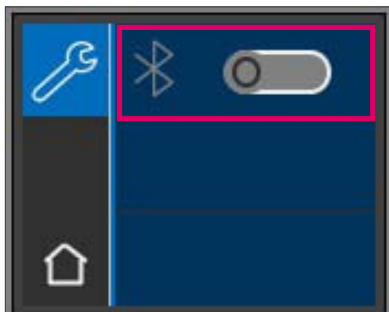



Pro komunikaci s počítači s Windows nebo přístroji s Android:

Zapněte Bluetooth®(I). VITA Easyshade® V lze automaticky vidět na 2 minuty (visací zámek je otevřený) a počítače s Windows a přístroje s Android ho mohou nalézt a tak se s ním spojit.



Pro komunikaci s přístroji iOS:

Zapněte Bluetooth®(I), přepněte na iOS (spínač iOS posuňte doprava (I)).

Po kliknutí na visací zámek bude VITA Easyshade® V automaticky na 2 minuty vidět pro přístroje Bluetooth® a přístroje iOS ho mohou nalézt a spojit se s ním. Vyčkejte, dokud se spojení opět nepřeruší. Spojení se potom pro přenos dat opět automaticky naváže.




Přenos výsledků měření pomocí Bluetooth® dotykem symbolu režimu. Odesílání je možné ve všech režimech měření a v režimu ukládání. Výsledky měření v režimu restaurace lze posílat pouze na VITA ShadeAssist na počítačích s Windows.



Pro přenos dat na přístroje s Windows a Android se musí


VITA Easyshade® V spojit s přístrojem. Stávající spojení se zobrazí u symbolu režimu měření jako vlna. U přístrojů s iOS se spojení před přenosem automaticky naváže a potom opět přeruší.

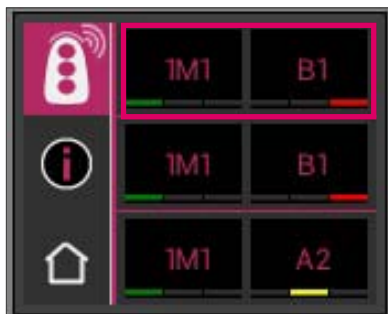

Podrobnosti k barvě:


Zobrazení výsledku měření oblasti zubu.

Po kliknutí na barevnou hodnotu se přejde k podrobnému náhledu.

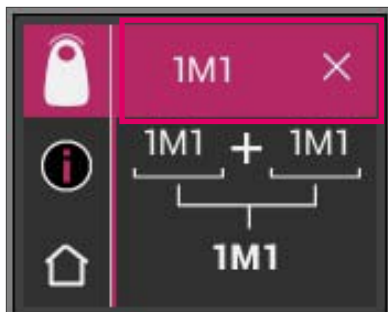


Podrobný náhled barevné hodnoty VITA SYSTEM 3D-MASTER®.

Po opětovném kliknutí na barevnou hodnotu v hlavičce se přejde k zobrazení barevných souřadnic.

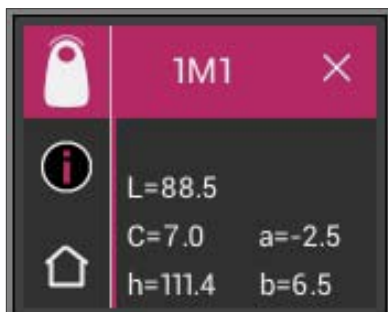

Zobrazení barevných souřadnic VITA SYSTEM 3D-MASTER®.

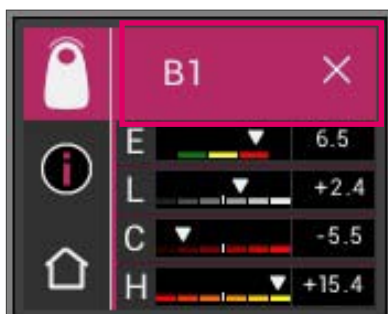

Podrobný náhled barevné hodnoty VITA classical A1-D4®.

Po opětovném kliknutí na barevnou hodnotu v hlavičce se přejde k zobrazení barevných souřadnic.



Zobrazení barevných souřadnic VITA classical A1-D4®.