




Når man tænder for VITA Easyshade® V i ladestationen, sker der en automatisk kalibrering.

Når man tænder for VITA Easyshade® V uden for ladestationen, opfordres brugeren til at foretage kalibrering (se billede til venstre). Indsæt venligst apparatet i ladestationen. Kalibreringen starter automatisk.


Bluetooth®-indstillinger til forbindelser med Windows-pc'er, Android- og iOS-enheder:



Vælg Indstillinger

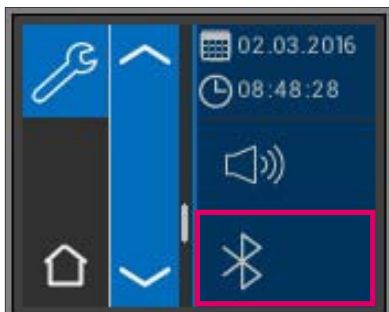

Vælg Bluetooth®-symbol

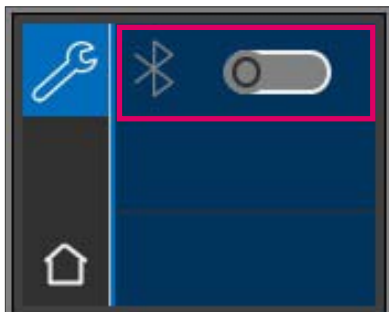

Visning af Bluetooth®: Bluetooth® er slukket (0);
man tænder den ved at skubbe kontakten mod højre (I)



Til kommunikation med Windows-pc'er eller Android-enheder:

Tænd for Bluetooth® (I). VITA Easyshade® V vises automatisk i 2 minutter (hængelås er åbnet) og kan dermed findes af og forbindes med Windows-pc'er eller Android-enheder.



Til kommunikation med iOS-enheder:

Tænd for Bluetooth® (I), omskift til iOS (skub kontakt iOS til højre (I)).


Når man rører ved hængelåsen, bliver VITA Easyshade® V automatisk synlig i 2 minutter for Bluetooth®-enheder og kan findes af og forbindes med iOS-enheder. Vent venligst, til forbindelsen atter afbrydes. Forbindelsen genoprettes dermed automatisk til dataoverførsel.



Overførsel af måleresultater via Bluetooth® sker ved at røre ved modussymbolet. Mulighed for at sende i alle målemodi og i lagringsmodus. Resultater af målinger i restaureringsmodus kan kun overføres til VITA ShadeAssist på Windows-pc'er.




For dataoverførsel til Windows- og Android-enheder skal VITA Easyshade® V være forbundet med enheden. En eksisterende forbindelse vises som en bølge i målemodus-symbolet. På iOS-enheder oprettes der automatisk forbindelse inden overførslen, hvorefter den afbrydes igen.

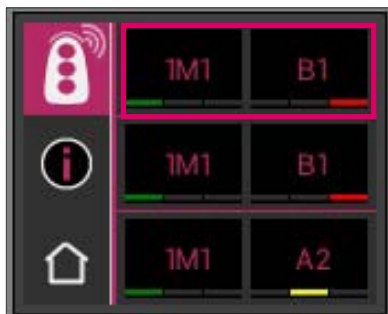

Farvedetaljer:


Resultatvisning tandområdemåling.

Ved at røre ved en farveværdi får man vist det detaljerede billede.

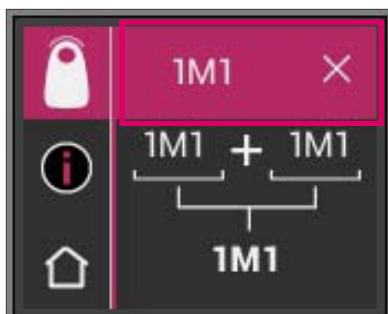


Detaljeret billede VITA SYSTEM 3D-MASTER®-farveværdi.

Ved at røre endnu en gang ved farveværdien i overskriften får man vist farvekoordinaterne.

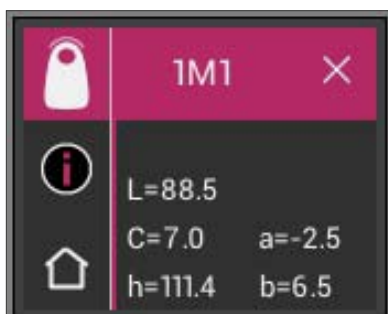

Visning af farvekoordinater VITA SYSTEM 3D-MASTER®.

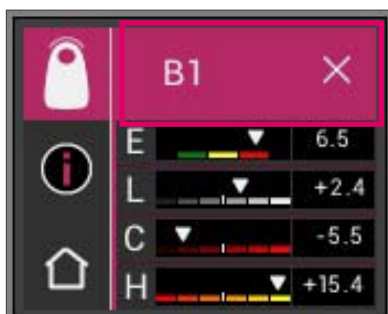

Detaljeret billede VITA classical A1-D4®-farveværdi.

Ved at røre endnu en gang ved farveværdien i overskriften får man vist farvekoordinaterne.



Visning af farvekoordinater VITA classical A1-D4®.