



Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής VITA Easyshade® V στη βάση φόρτισης διεξάγεται αυτόματη βαθμονόμηση.

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής VITA Easyshade® V εκτός της βάσης φόρτισης προβάλλεται ένα μήνυμα που σας καλεί να εκτελέσετε βαθμονόμηση (βλ. εικόνα αριστερά). Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης.


Η βαθμονόμηση ξεκινά αυτόματα.

Ρυθμίσεις Bluetooth® για συνδέσεις με H/Y Windows, συσκευές Android και iOS:


Επιλογή ρυθμίσεων




Επιλογή συμβόλου Bluetooth®

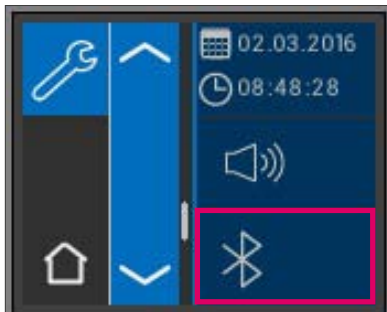


Ένδειξη Bluetooth®: το Bluetooth® είναι απενεργοποιημένο (0) για να το ενεργοποιήσετε μεταθέστε το διακόπτη προς τα δεξιά (I)

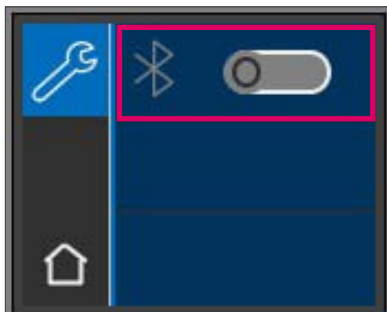

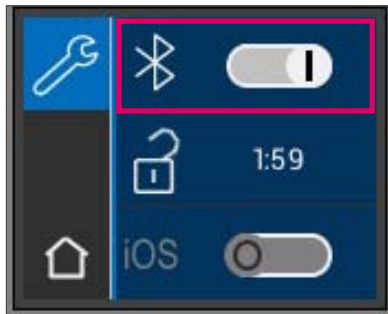

Για την επικοινωνία με H/Y Windows ή συσκευές Android:

Ενεργοποιήστε το Bluetooth® (I). Η συσκευή VITA Easyshade® V είναι αυτόματα ορατή για 2 λεπτά (το σύμβολο λουκέτου είναι ανοικτό) και μπορεί να ανιχνευθεί από H/Y Windows ή συσκευές Android και να συνδεθεί με αυτές.

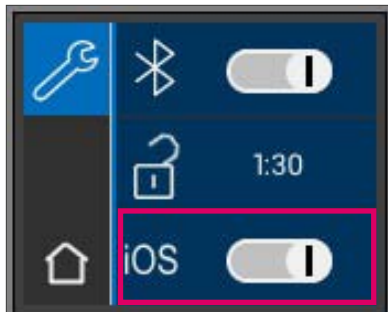

Για την επικοινωνία με συσκευές iOS:

ενεργοποιήστε το Bluetooth® (I), επιλέξτε iOS (μεταθέστε το διακόπτη iOS προς τα δεξιά (I)).


Με άγγιγμα του συμβόλου λουκέτου, η συσκευή VITA Easyshade® V είναι αυτόματα ορατή για 2 λεπτά για συσκευές Bluetooth® και μπορεί να ανιχνευθεί από συσκευές iOS και να συνδεθεί. Περιμένετε μέχρι να αποσυνδεθεί και πάλι η σύνδεση. Η σύνδεση για τη μετάδοση δεδομένων αποκαθίσταται και πάλι αυτόματα κατόπιν αυτού.



Μετάδοση των αποτελεσμάτων μέτρησης μέσω Bluetooth® με άγγιγμα του συμβόλου λειτουργίας. Η μετάδοση είναι δυνατή σε όλους τους τρόπους λειτουργίας μέτρησης και στη λειτουργία αποθήκευσης. Τα αποτελέσματα μετρήσεων στη λειτουργία αποκατάστασης μπορούν να μεταδίδονται μόνο στο VITA ShadeAssist σε H/Y με Windows.




Για τη μετάδοση δεδομένων σε συσκευές Windows και Android, η συσκευή VITA Easyshade® V πρέπει να είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή. Μια υφιστάμενη σύνδεση προβάλλεται στο σύμβολο λειτουργίας μέτρησης ως κύμα. Σε συσκευές iOS, η σύνδεση αποκαθίσταται αυτόματα πριν από τη μετάδοση και μετά διακόπτεται.

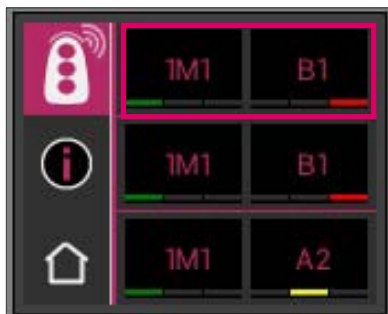

Λεπτομέρειες χρώματος:


Ένδειξη αποτελέσματος μέτρησης περιοχής δοντιού.

Με πάτημα μιας τιμής χρώματος εισέρχετε την προβολή λεπτομερειών.

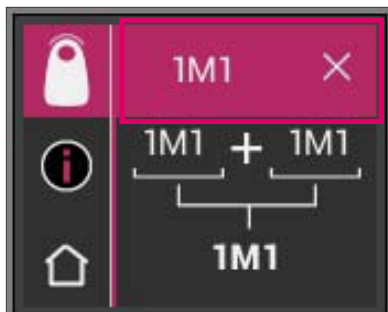


Προβολή λεπτομερειών Τιμή χρώματος VITA SYSTEM 3D-MASTER®.

Με νέο άγγιγμα της τιμής χρώματος στη επικεφαλίδα εισέρχετε στη προβολή των συντεταγμένων χρώματος.

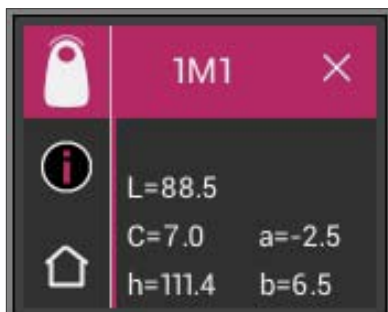

Προβολή των συντεταγμένων χρώματος VITA SYSTEM 3D-MASTER®.

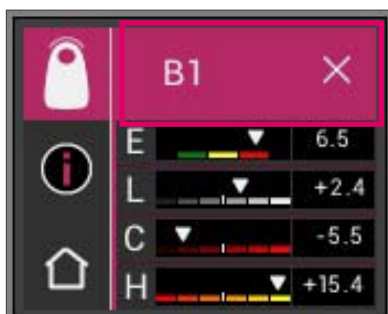

Προβολή λεπτομερειών Τιμή χρώματος VITA classical A1-D4®.

Με νέο άγγιγμα της τιμής χρώματος στη επικεφαλίδα εισέρχετε στη προβολή των συντεταγμένων χρώματος.



Προβολή των συντεταγμένων χρώματος VITA classical A1-D4®.