




Al encender el VITA Easyshade® V en la estación de carga, se lleva a cabo una calibración automática.

Al encender el VITA Easyshade® V fuera de la estación de carga, aparece la solicitud de llevar a cabo la calibración (véase la imagen de la izquierda). Introducir el aparato en la estación de carga. La calibración se iniciará automáticamente.


Ajustes de Bluetooth® para conexiones con PC Windows y dispositivos Android e iOS:




Seleccionar Ajustes

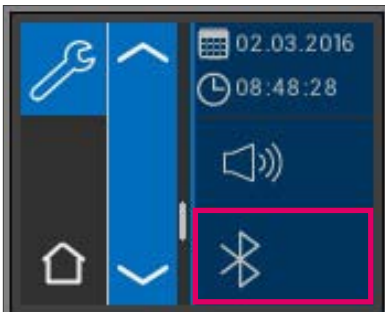

Seleccionar el símbolo de Bluetooth®

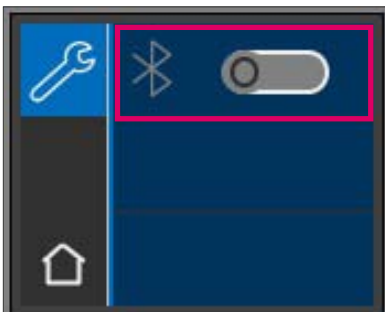

Indicación de Bluetooth®: Bluetooth® está desactivado (0); para activarlo, deslizar el conmutador hacia la derecha (I)

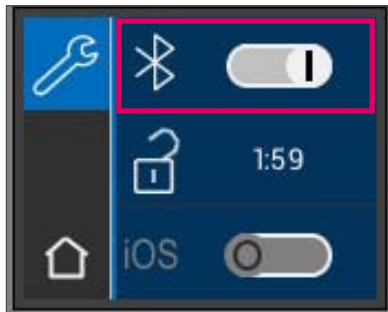

Para la comunicación con PC Windows u otros dispositivos Android:

Activar Bluetooth® (I). VITA Easyshade® V permanece visible automáticamente durante 2 minutos (el candado está abierto) y puede ser localizado por PC Windows o dispositivos Android para establecer la conexión.




Para la comunicación con dispositivos iOS: activar Bluetooth® (I), conmutar a iOS (deslizar el conmutador iOS hacia la derecha (I)).


Al tocar el símbolo del candado, el VITA Easyshade® V permanece visible automáticamente durante 2 minutos para dispositivos Bluetooth®, de modo que puede ser localizado por dispositivos iOS para establecer la conexión. Esperar hasta que se interrumpa la conexión. A continuación se restablece automáticamente la conexión para la transmisión de datos.



Transmisión por Bluetooth® de los resultados de medición al tocar el símbolo del modo. Es posible transmitir datos en todos los modos de medición y en el modo de registro. Los resultados de mediciones en el modo de restauración únicamente pueden transmitirse al VITA ShadeAssist en PC Windows.

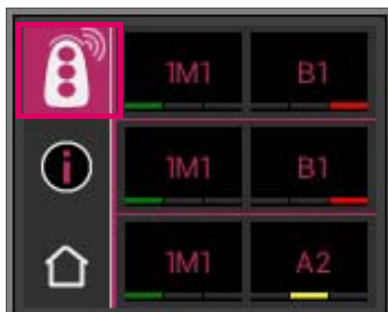


Para la transmisión de datos a dispositivos Windows y Android, el VITA Easyshade® V debe estar conectado al dispositivo. Una conexión existente se indica en forma de una onda en el símbolo del modo de medición. En dispositivos iOS, la conexión se restablece automáticamente antes de la transmisión y después se vuelve a cortar.

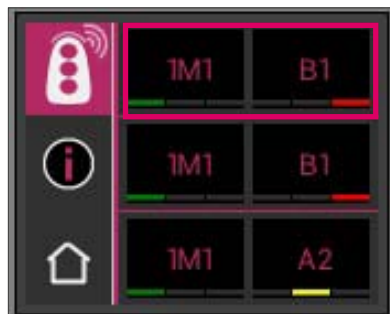

Detalles de color:


Visualización de resultados Medición de zonas dentales.
Al tocar un valor cromático se accede a la vista detallada.

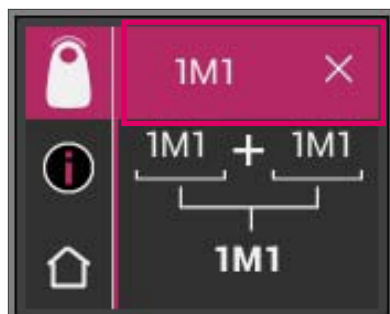

Vista detallada del valor cromático VITA SYSTEM 3D-MASTER®.
Al tocar de nuevo el valor cromático en la línea de encabezamiento se accede a la visualización de las coordenadas cromáticas.



Visualización de las coordenadas cromáticas VITA SYSTEM 3D-MASTER®.

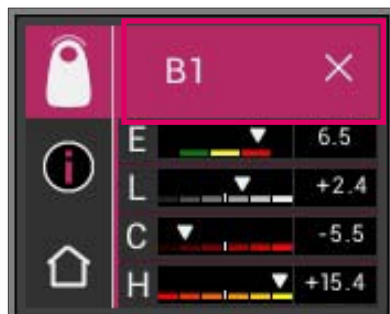

Vista detallada del valor cromático VITA classical A1-D4®.
Al tocar de nuevo el valor cromático en la línea de encabezamiento se accede a la visualización de las coordenadas cromáticas.



Visualización de las coordenadas cromáticas VITA classical A1-D4®.