




L'étalonnage du VITA Easyshade® V se fait automatiquement après branchement au chargeur.

Après mise en route du VITA Easyshade® V un étalonnage va être demandé (voir photo de gauche) si l'appareil n'est pas sur le chargeur. Mettre l'appareil sur le chargeur. L'étalonnage se fait automatiquement.


Réglages Bluetooth® pour connexion à des PC sous Windows, des appareils Android et iOS



Sélectionner Réglages

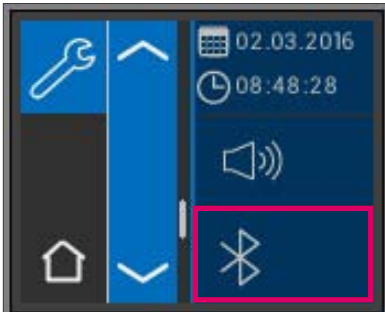

Sélectionner le symbole Bluetooth®

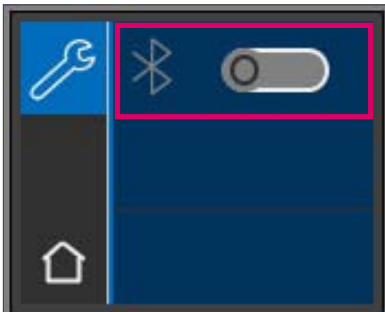

Affichage Bluetooth® : Bluetooth® est désactivé (0) pour l'activer pousser l'interrupteur vers la droite (I)



Pour la communication avec des PC Windows ou des appareils Android :

activer Bluetooth® (I). VITA Easyshade® V est automatiquement visible pendant 2 minutes (cadenas ouvert) et peut être détecté par les PC Windows ou les appareils Android et connecté à ces équipements.



Pour la communication avec des appareils iOS :

activer Bluetooth® (I), basculer vers iOS (pousser l'interrupteur iOS vers la droite (I)).


En activant le cadenas, VITA Easyshade® V devient automatiquement visible pendant 2 minutes pour les appareils équipés du Bluetooth®. Il peut être détecté par les appareils iOS et connecté. Veuillez attendre jusqu'à la déconnexion. La connexion est ensuite automatiquement établie de nouveau pour la transmission des données.



Transmission des mesures par Bluetooth® en activant le symbole Mode. Les envois sont possibles dans tous les modes de mesure et en mode Mémoire. Les résultats des mesures en mode Restauration peuvent être transmis aux PC Windows uniquement par le biais de VITA ShadeAssist.




Pour la transmission de données vers les appareils Windows et Android il faut que VITA Easyshade® V soit connecté à l'appareil. Une connexion active s'affiche sous la forme d'une vague sur le symbole Mode Mesure. Avec les appareils iOS la connexion est établie automatiquement puis de nouveau coupée avant la transmission.

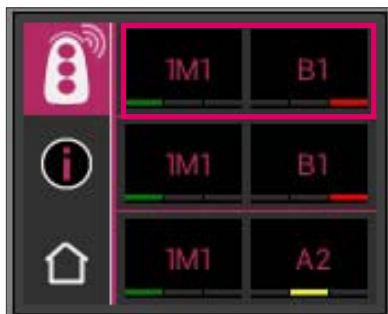


Détails sur la couleur


Affichage du résultat Mesure d'une zone de la dent.
En activant une valeur de la couleur, une vue détaillée s'affiche.

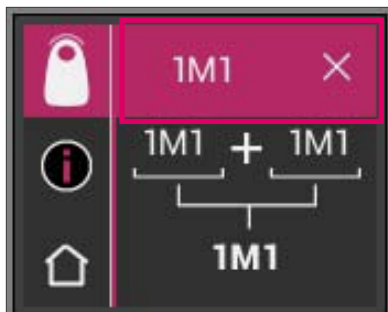

Vue détaillée Valeur de la couleur VITA SYSTEM 3D-MASTER®.
En activant de nouveau la valeur dans la ligne du haut, les coordonnées de la couleur s'affichent.

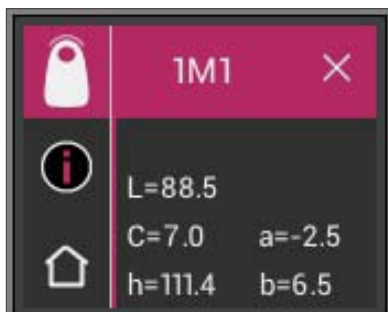

Affichage des coordonnées de la couleur VITA SYSTEM 3D-MASTER®.

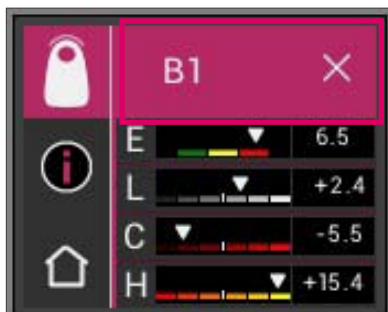

Vue détaillée Valeur de la couleur VITA classical A1-D4®.
En activant de nouveau la valeur dans la ligne du haut, les coordonnées de la couleur s'affichent.



Affichage des coordonnées de la couleur VITA classical A1-D4®.