



VITA Easyshade® V bekapcsolásakor a töltőállomáson automatikusan megtörténik a kalibrálás.


Ha VITA Easyshade® V-t a töltőállomásról leemelve kapcsolja be, a készülék felszólít a kalibrálásra (lásd a baloldali képet). Kérjük, helyezze az eszközt a töltőállomásra. A kalibrálás automatikusan megkezdődik.

Bluetooth® beállítások Windows PC-hez, Android- és iOS-eszközökhöz:


Beállítások kiválasztása



Bluetooth® ikon kiválasztása

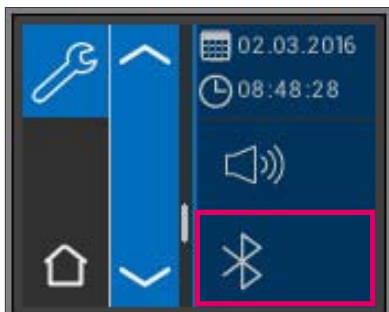

Bluetooth® kijelző: Bluetooth® kikapcsolva (0), bekapcsoláshoz csúsztassa a kapcsolót jobbra (I)

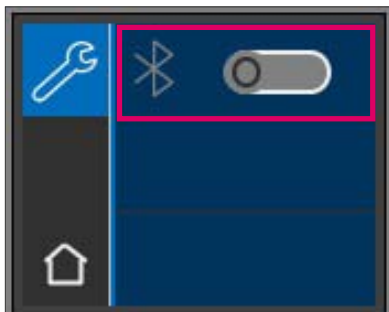



Windows-PC-vel vagy Android-eszközökkel történő kommunikációhoz:

Bluetooth® bekapcsolása (I). VITA Easyshade® V 2 percre automatikusan láthatóvá válik (lakat nyitva), és a Windows-PC-k vagy Android-eszközök érzékelik, és kapcsolódnak hozzá.




Az iOS-eszközökkel történő kommunikációhoz:

Bluetooth® bekapcsolása (I), átváltás iOS-ra (iOS kapcsolót jobbra csúsztatni (I)).


A lakat ikon megérintésével VITA Easyshade® V 2 percre automatikusan láthatóvá válik a Bluetooth® eszközök számára, az iOS-eszközök pedig érzékelik, és kapcsolódnak hozzá. Kérjük, várjon, amíg a kapcsolat ismét megszakad. Adatátvitel céljából a kapcsolat később automatikusan ismét létrejön.



Mérési eredmények továbbítása Bluetooth®-on keresztül az üzemmód ikon megérintésével. Adatküldés minden üzemmódban, így mentési módban is lehetséges. A restaurációs üzemmód mérési eredményei csak a Windows-PC-n lévő VITA ShadeAssist szoftverre továbbíthatók.

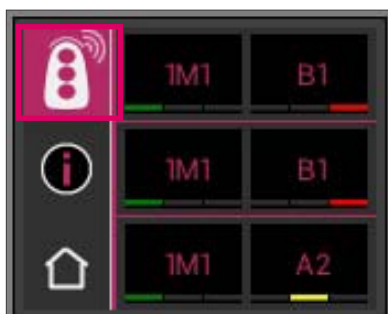


Windows- és Android-eszközökre történő adatátvitel céljából VITA Easyshade® V-nek kapcsolódnia kell az eszközhöz. A létrejött kapcsolatot egy hullám jelzi a mérési mód szimbólumon. Az iOS-eszközök esetében adatküldés előtt automatikusan létrejön a kapcsolat, majd utána ismét megszakad.

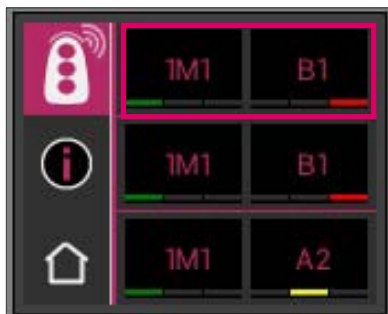

Színrészletek:


Fogrégió mérési eredményének kijelzése.

Egy színérték megérintésével a részletes nézethez jutunk.

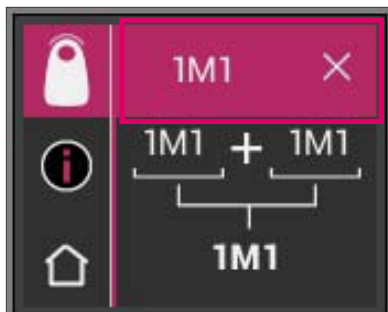


VITA SYSTEM 3D-MASTER® színértékének részletes képe.

A fejlécben a színérték ikon ismételt megérintésével a színkoordináták kijelzéséhez jutunk.

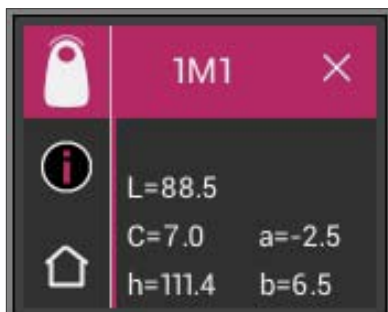

VITA SYSTEM 3D-MASTER® színkoordináták kijelzése.

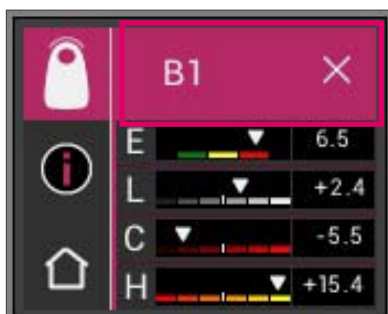

VITA classical A1-D4® színértékének részletes képe.

A fejlécben a színérték ikon ismételt megérintésével a színkoordináták kijelzéséhez jutunk.



VITA classical A1-D4® színekoordináták kijelzése.