




Se all'accensione VITA Easyshade® V è posizionato sulla base caricabatteria la calibratura è automatica.

Se all'accensione VITA Easyshade® V non è posizionato sulla base caricabatteria la calibratura viene richiesta (v. fig. a sinistra). Posizionare l'apparecchio sulla base caricabatteria. La calibratura inizia automaticamente.


### **Regolazioni Bluetooth® per collegamenti con PC Windows, dispositivi Android e iOS:**



Selezionare Regolazioni

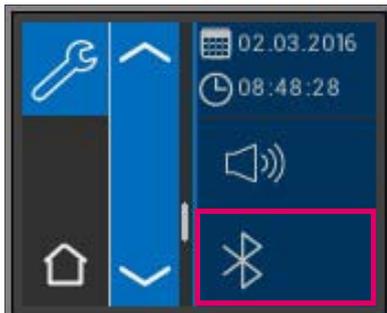


Selezionare il simbolo Bluetooth®

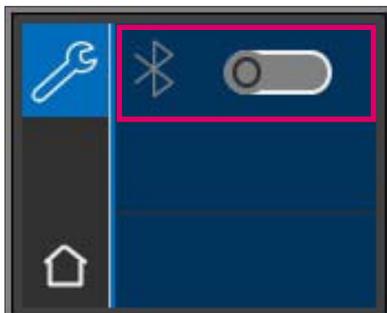

Visualizzazione Bluetooth®:


Bluetooth® spento (0), per accenderlo spostare il cursore verso destra (1)

---

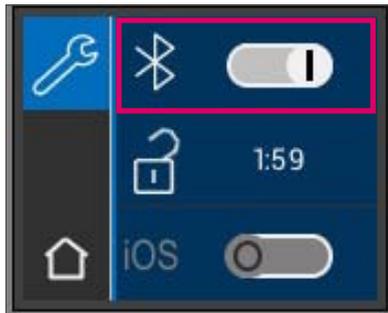

Per comunicare con PC Windows o dispositivi Android:

Accendere il Bluetooth® (I). VITA Easyshade® V è individuabile automaticamente per 2 minuti (lucchetto aperto), può essere rilevato da PC Windows o da dispositivi Android e accoppiato.

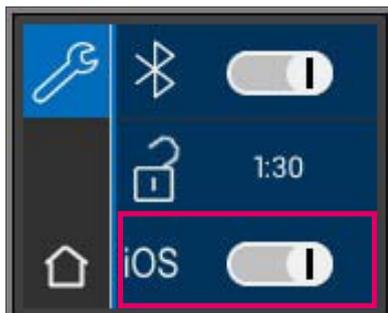

Per comunicare con dispositivi iOS: accendere il Bluetooth® (I), commutare su iOS (spostare il cursore iOS (I) verso destra).

Toccando il lucchetto, VITA Easyshade® V è individuabile automaticamente per 2 minuti per dispositivi Bluetooth®, in tal modo può essere rilevato da dispositivi iOS e accoppiato. Attendere, finché il collegamento si interrompe. Successivamente la connessione per la trasmissione dei dati si attiva automaticamente.



Trasmissione dei risultati di misura via Bluetooth® toccando il simbolo modo di funzionamento. La trasmissione è possibile in tutte le modalità di misura e in modalità di memorizzazione. Risultati di misura in modalità restauro possono essere trasmessi solo al VITA ShadeAssist su PC Windows.




Per la trasmissione dei dati a dispositivi Windows e Android, VITA Easyshade® V deve essere collegato con il dispositivo. Un collegamento esistente viene visualizzato con un'onda nella modalità di misura. Nei dispositivi iOS il collegamento si attiva automaticamente prima della trasmissione e quindi si disattiva.



**Dettagli colore:**

Visualizzazione risultato Misurazione aree dente.  
Toccando un colore si visualizzano i dati di dettaglio.

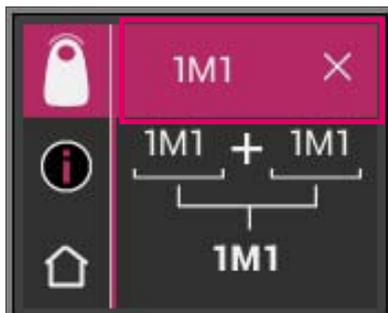

Visualizzazione di dettaglio di un colore VITA SYSTEM 3D-MASTER®.  
Toccando nuovamente l'indicazione colore nella riga di testa si visualizzano le coordinate cromatiche.



Visualizzazione delle coordinate cromatiche VITA SYSTEM 3D-MASTER®.



Visualizzazione di dettaglio di un colore VITA classical A1-D4®.  
Toccando nuovamente l'indicazione colore nella riga di testa si visualizzano le coordinate cromatiche.



Visualizzazione delle coordinate cromatiche VITA classical A1-D4®.