



W trakcie włączania VITA Easyshade® V, w ładowarce następuje automatyczna kalibracja.


Po włączeniu VITA Easyshade® V poza ładowarką, wymagana jest kalibracja (zdjęcie z prawej strony). Urządzenie należy umieścić w ładowarce. Kalibracja zostaje włączona automatycznie.

Ustawienia Bluetooth® dla komputerów z systemem Windows, urządzeń Android oraz iOS:


Wybierz ustawienia



Wybierz symbol Bluetooth®

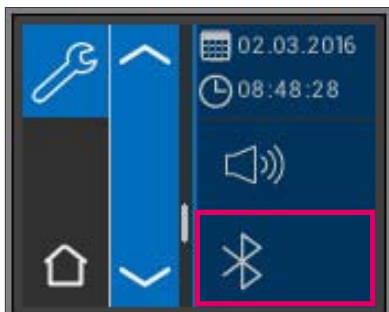

Informacja Bluetooth®: Bluetooth® jest wyłączony (0), w celu włączenia przesunąć przełącznik w prawo (I)

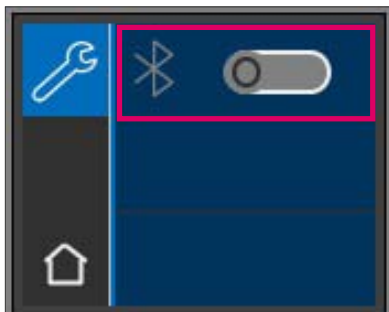



W celu komunikacji z komputerami z systemem Windows lub urządzeniami Android:

włącz Bluetooth® (I). Dotknięcie kłódki – urządzenie VITA Easyshade® V będzie automatycznie widoczne (otwarta kłódka) poprzez Bluetooth® w przeciągu 2 minut i gotowe do połączenia z urządzeniami Android oraz komputerami z systemem Windows.



W celu komunikacji z urządzeniami iOS:

włączyć Bluetooth® (I), przełączyć na iOS (przełącznik iOS przesunąć w prawo (II)).


Dotknięcie kłódki – urządzenie VITA Easyshade® V będzie automatycznie widoczne poprzez Bluetooth® w przeciągu 2 minut i gotowe do połączenia z urządzeniami iOS. Proszę poczekać do momentu przerwania połączenia. Połączenie zostaje automatycznie przywrócone w celu transmisji danych.



Wysyłanie wyników pomiaru przez Bluetooth®, dzięki dotknięciu symbolu trybu działania. Przesyłanie danych jest możliwe we wszystkich trybach pomiarów oraz w trybie pamięci. Wyniki pomiarów w trybie uzupełnienia można przenieść tylko do VITA ShadeAssist w komputerze z systemem Windows.




W celu przesyłu danych na urządzenia z systemem Windows i Androidem należy połączyć VITA Easyshade® V z wybranym urządzeniem. Istniejące połączenie jest wyświetlane na ikonie trybu pomiaru jako fala. W przypadku urządzeń iOS, połączenie zostaje automatycznie utworzone przed przesyłaniem, a następnie zakończone.

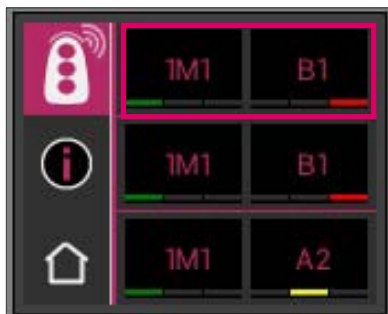


Szczegółowy opis koloru:

Wyświetlanie wyniku pomiaru danego obszaru zęba.


Dotknięcie wartości koloru powoduje przejście do szczegółowych informacji danego koloru.

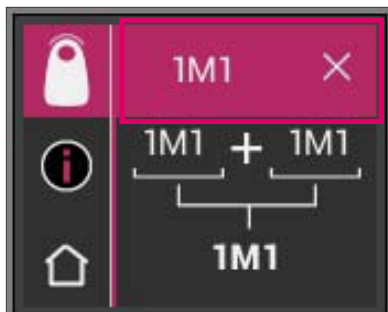

Wyświetlenie szczegółów wybranego koloru wg VITA SYSTEM 3D-MASTER®. Ponowne dotknięcie wartości koloru w nagłówku, umożliwia przejście do wyświetlania współrzędnych barw.

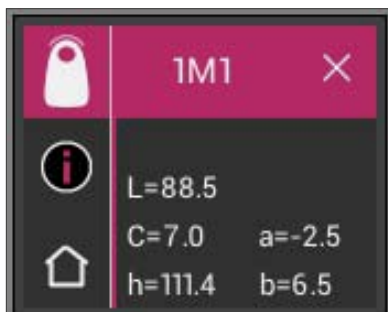

Wyświetlenie współrzędnych koloru wg VITA SYSTEM 3D-MASTER®.

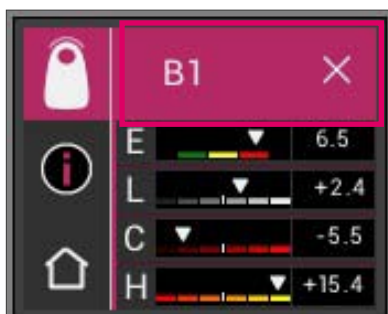

Wyświetlenie szczegółów wybranego koloru wg VITA classical A1-D4®. Ponowne dotknięcie wartości koloru w nagłówku, umożliwia przejście do wyświetlania współrzędnych barw.



Wyświetlanie współrzędnych kolorów VITA classical A1-D4®.