




Ao ligar o VITA Easyshade® V na estação de carregamento, uma calibração automática é realizada.

Depois de ligar o VITA Easyshade® V fora da estação de carregamento, uma calibração é solicitada (ver imagem à esquerda). Por favor, insira o dispositivo na estação de carregamento. A calibração se inicia automaticamente.


Configurações de Bluetooth® para conexões com PCs Windows, dispositivos Android e iOS:



Selecionar configurações

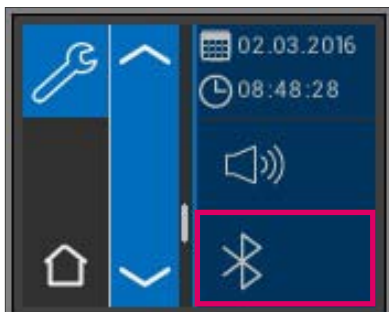

Selecionar símbolo Bluetooth®

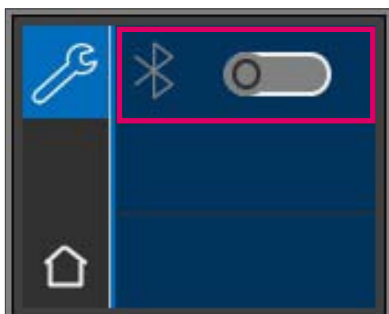

Indicador de Bluetooth®: Bluetooth® está desligado (0), para ligar o interruptor deslize para a direita (I)



Para comunicação com PCs Windows ou dispositivos Android:

Ligar Bluetooth® (I). VITA Easyshade® V está automaticamente visível por 2 minutos (o cadeado está aberto) e pode ser encontrado por PCs Windows ou dispositivos Android e, assim, ser conectado.




Para a comunicação com os dispositivos iOS:

ligar o Bluetooth® (I), mudar para iOS (mover o interruptor iOS para a direita (II)).

Ao tocar no símbolo de cadeado, o VITA Easyshade® V automaticamente fica visível por 2 minutos para dispositivos Bluetooth® e pode ser encontrado e conectado por dispositivos iOS. Aguarde até que a ligação seja desconectada. Em seguida, a conexão é automaticamente restaurada mais uma vez para a transferência de dados.



Transferência dos resultados de medição por Bluetooth® através do toque no símbolo de modo. A transmissão está disponível em todos os modos e no modo de armazenamento. Resultados de medições no modo de restauração só podem ser transmitidos no VITA ShadeAssist para os PCs com Windows.

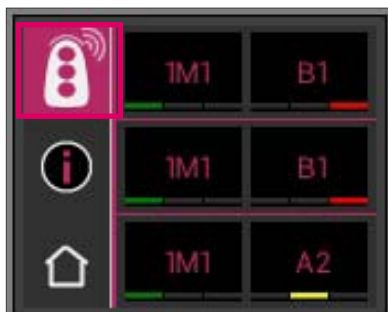


Para a transmissão de dados para dispositivos Windows e Android, o VITA Easyshade® V deve ser conectado ao dispositivo. Uma conexão existente é mostrada no símbolo de modo de medição na forma de onda. Em dispositivos iOS, a conexão é estabelecida automaticamente e depois novamente construída



Detalhes da cor:


Exibição do resultado da medição na área do dente.
Ao tocar em um valor de cor se é levado para a visão detalhada.

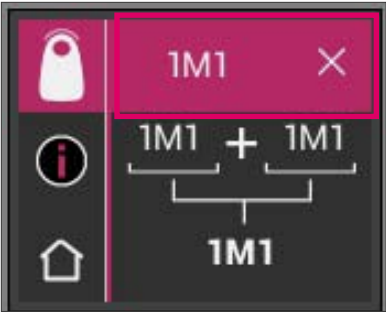

Visão detalhada dos valores de cor VITA SYSTEM 3D-MASTER®.
Ao tocar novamente no valor de cor do cabeçalho, as coordenadas de cor são exibidas.



Exibição das coordenadas de cores VITA SYSTEM 3D-MASTER®.

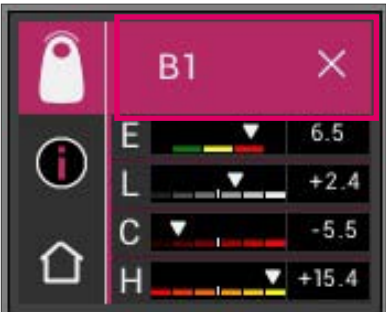

Visão detalhada dos valores de cor VITA classical A1-D4®.
Ao tocar novamente no valor de cor do cabeçalho, as coordenadas de cor são exibidas.



Exibição das coordenadas de cores VITA classical A1-D4®.