




După pornirea VITA Easyshade® V în baza de încărcare, acesta se calibrează automat. După pornirea VITA Easyshade® V în afara bazei de încărcare, calibrarea este solicitată (vezi imaginea din stânga). Vă rugăm așezați instrumentul în baza de încărcare. Calibrarea începe automat.

Setări Bluetooth® pentru conectarea la PC Windows și la dispozitive Android și iOS:


Selectați meniul setări



Selectați simbolul Bluetooth®

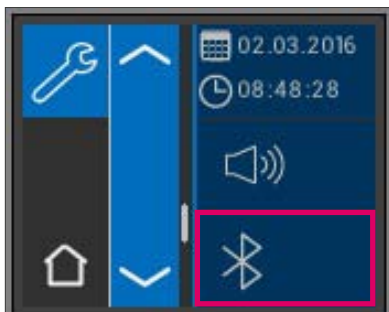

Indicator Bluetooth®: Bluetooth® este dezactivat (0), glisați butonul la dreapta pentru a-l activa (I)

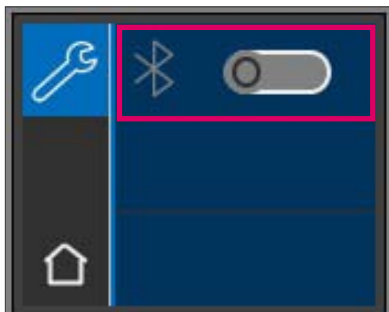



Pentru comunicarea cu sisteme de operare Windows și dispozitive Android:

Activați Bluetooth® (I). VITA Easyshade® V devine automat vizibil timp de 2 minute (lacăt deschis) și poate fi găsit de, respectiv conectat la Windows sau dispozitive Android.



Pentru comunicarea cu dispozitive iOS: activați Bluetooth® (I), alegeți iOS (glisați butonul iOS la dreapta (I)).


La apăsarea simbolului lacăt, VITA Easyshade® V devine automat vizibil pentru dispozitivele Bluetooth® timp de 2 minute și poate fi găsit de, respectiv conectat la dispozitivele iOS. Vă rugăm așteptați până când se încheie conexiunea. Conexiunea pentru transmiterea datelor se restabilește automat.



Transmiterea rezultatelor măsurătorii prin Bluetooth® prin apăsarea simbolului mod. Transmiterea este posibilă în toate modurile și în modul de stocare. Rezultatele măsurătorilor efectuate în modul restaurare pot fi transmise către VITA ShadeAssist pe Windows PC.




VITA Easyshade® trebuie să fie conectat la dispozitiv pentru a transmite date către Windows și Android. O conexiune existentă este afișată sub forma unei linii sinuoase în simbolul modului de măsurare. La dispozitivele iOS conexiunea se stabilește automat și se încheie din nou ulterior.

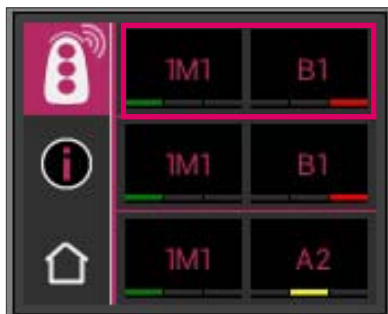


Detalii culori:


Afișarea rezultatelor măsurătorii pentru cele trei zone de culoare.
Atingeți culoarea pentru afișarea detaliilor.

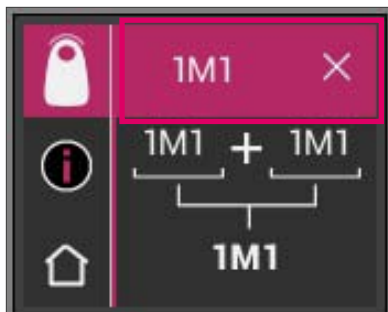

Afișarea detaliată a culorii VITA SYSTEM 3D-MASTER®.
Apăsați din nou pe culoarea din bară pentru a se afișa coordonatele culorii.

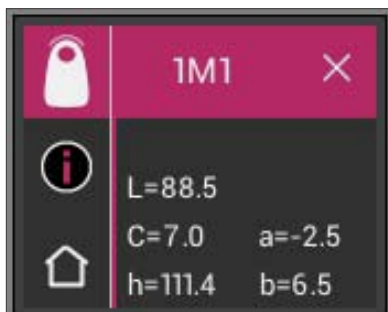

Afișarea coordonatelor culorilor VITA SYSTEM 3D-MASTER®.

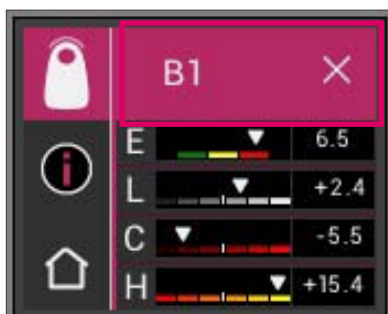

Afișarea detaliată a culorilor VITA classical A1-D4®.
Apăsați din nou pe culoarea din bară pentru a se afișa coordonatele culorii.



Afișarea coordonatelor de culoare în VITA classical A1-D4®.