

Gentili clienti e utilizzatori,

con la presente desideriamo informarvi sul nuovo aggiornamento Software per il vostro VITA Easyshade V e pregarvi di installarlo secondo le istruzioni di seguito riportate.

Se avete domande sull'aggiornamento rivolgetevi al partner regionale per l'Assistenza Tecnica sugli apparecchi VITA. Potete contattare anche l'Assistenza Tecnica VITA:

- Tel.: +49 (0)77 61 / 562 – 101, -105, -106 oder -114
- Fax: +49 (0)77 61 / 562 – 102
- Email: instruments-service@vita-zahnfabrik.com

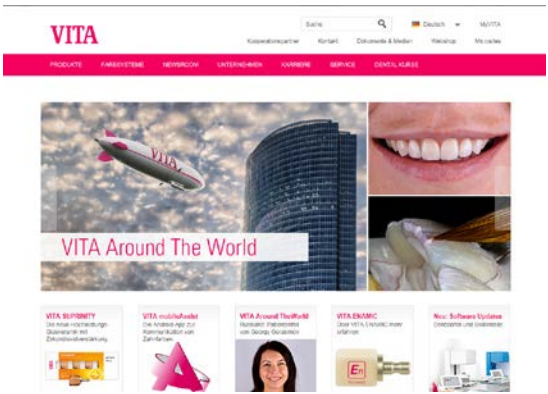
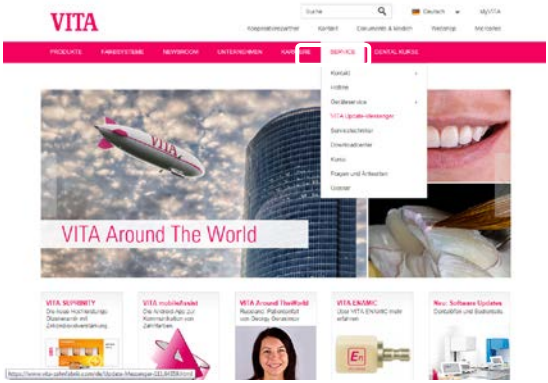
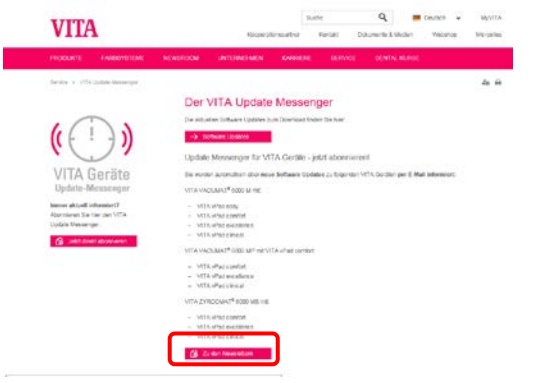
1. Presupposti per il download e l'installazione

- a) Accesso internet
- b) PC Windows compatibile Bluetooth oppure Bluetooth-Dongle in dotazione al VITA Easyshade V

2. Procedura generale

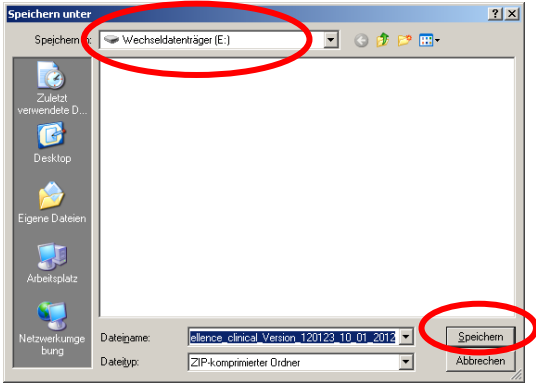
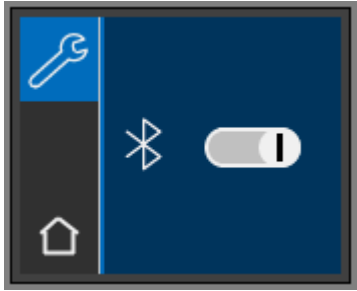
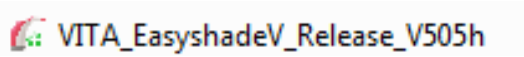
Durata presumibile dell'aggiornamento ca. 8 min

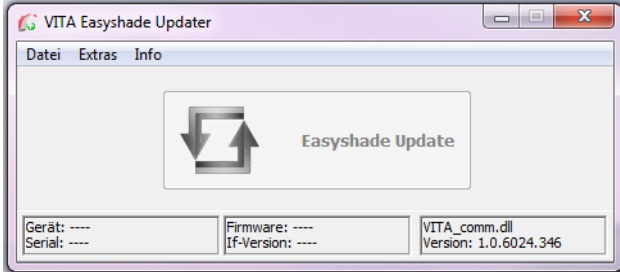
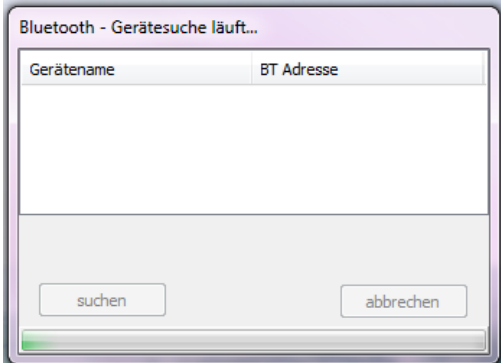
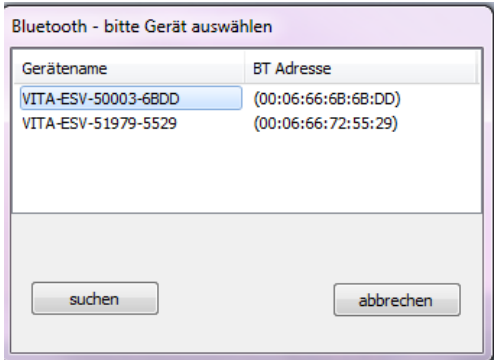

1. Scaricare l'Update Software da internet
2. Attivare il Bluetooth sul VITA Easyshade V
3. Selezionare Update Software, inizia la ricerca apparecchio
4. Cliccare sul VITA Easyshade V desiderato
5. Si apre la finestra Update
6. Avviare l'Update con „Start“
7. Durante l'aggiornamento non effettuare misure, etc. con il VITA Easyshade V.

Scaricare l'aggiornamento software da internet e salvarlo sul PC		
Passaggio	A cura dell'utilizzatore	Funzione
1	Digitare www.vita-zahnfabrik.com nel webbrowser.	
2	Selezionare „Servizi“ + „VITA Update-Messenger“.	
3	Selezionare „Alla Newsletter“. Selezionare quindi „VITA Update Messenger 01/2016“ e confermare cliccando su „Alla Newsletter“.	

VITA Easyshade® V

Istruzioni per l'esecuzione di aggiornamenti Software con VITA Easyshade V

Passaggio	A cura dell'utilizzatore	Funzione
4	Selezionare „Avvertenze per l'installazione del Download" o „Al Download“.	
5	Selezionare „Salvare“.	
6	Salvare il file in una cartella a scelta e avviare VITA_EasyshadeV_Release_V505h_Pkg.exe con un doppio clic. Il programma di Update viene copiato nella cartella scelta.	
7	Attivare il Bluetooth sul VITA Easyshade V.	
8	Fare doppio clic sul file nel drive scelto.	

Passaggio	A cura dell'utilizzatore	Funzione
9	Si avvia la ricerca apparecchio.	 
10	Selezionare il VITA Easyshade V desiderato con un clic. Se è disponibile un solo VITA Easyshade V la selezione è automatica.	
11	Si apre la finestra Update, avviare con „Start“. (Durata presumibile ca. 8 min) Durante l'aggiornamento l'indicazione VITA Easyshade V è scura (e non può essere utilizzata).	

VITA Easyshade® V

Istruzioni per l'esecuzione di aggiornamenti Software con VITA Easyshade V

Passaggio	A cura dell'utilizzatore	Funzione
12	Al termine dell'aggiornamento chiudere il programma. Riavviare VITA Easyshade V.	