

Brenntabelle VITA Titankeramik

	PASTE BON DER	Pulver Bonder	Opaker	Margin	Dentin 1	Dentin 2	Glanz	Glanz mit Glasur
Vortrocknen °C	135	135	135	135	135	135	135	135
Vortrocknen Min.	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00
Schliessen Min.	6:00	2:00	2:00	6:00	6:00	6:00	4:00	4:00
Vorwärmen °C	400	400	400	400	400	400	400	400
Vorwärmen Min.	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Anstieg °C/ Min.	60	60	80	50	50	50	80	80
Vakuum	On	On	On	On	On	On	On	On
Vakuum ein °C	400	400	400	400	400	400	400	400
Vakuum aus °C	830	830	790	780	780	770	770	770
Endtemperatur °C	830	830	790	780	780	770	770	770
Halten Vak. Min.	-----	-----	-----	1:00	1:00	1:00	-----	-----
Halten Min.	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	2:00	1:00
Tempern	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kühlen Min.				5:00	5:00	5:00	5:00	5:00

Ab dem Grundbrand muß mit einer Langzeitabkühlung bis auf 400°C gebrannt werden.

Die hier angegebenen Werte sind Richtwerte und dienen als Anhaltspunkt. Abweichungen der Brennergebnisse sind möglich. Die Brennergebnisse hängen von der jeweiligen Ofenleistung ab und sind Hersteller – und alterungsbedingt. Die Richtwerte müssen individuell bei jedem Brand angeglichen werden. Diese Angaben sind sorgfältig erstellt und geprüft, werden aber ohne Gewähr weitergegeben.