

# VITA ENAMIC® Polishing Set clinical/technical

Pour le pré-polissage et le lustrage de la céramique hybride VITA ENAMIC



Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

Édition 09.16

VITA shade, VITA made.

**VITA**

## Description du produit

Les coffrets de polissoirs VITA ENAMIC ont été mis au point pour un traitement de surface sûr, rentable et adapté à la céramique hybride, aussi bien au cabinet dentaire qu'au laboratoire. Les coffrets contiennent diverses pointes à polir pour le pré-polissage et le lustrage.

Ces instruments assurent le polissage des surfaces occlusales, des cuspides, des sillons et des points de contact des restaurations tout en préservant le matériau. Les instruments confèrent une remarquable brillance finale aux restaurations.

## Avantages du produit

### Excellents résultats

Ces instruments donnent une excellente qualité de surface, peu propice à l'accumulation de la plaque. Une concentricité précise, des granulométries et des tailles d'instruments bien harmonisées contribuent à la grande précision du polissage.

### Manipulation simple et sûre

Les instruments garantissent un fort retrait. La bonne manipulation et l'utilisation sans pâte à polir accélèrent et simplifient le travail. Les instruments clinique peuvent être stérilisés pour plus de sécurité.

### Traitement non agressif

Avec ces instruments spécialement conçus pour VITA ENAMIC, les retouches n'endommagent pas le matériau. Les risques de microfissures par exemple sont évités.

## Données du produit

VITA ENAMIC Polishing Set clinique : il comporte un total de 6 instruments pour contre-angle – 3 instruments pour le pré-polissage et 3 pour le polissage haute brillance.

VITA ENAMIC Polishing Set technique : il comporte un total de 8 instruments pour pièce à main – 4 instruments pour le pré-polissage et 4 pour le polissage haute brillance.

## Coffrets VITA ENAMIC®

Désignation	Informations	Contenu / pièce	N° art.
VITA ENAMIC Polishing Set clinique	Polissage à deux étapes avec pointes à prépolir et à lustrer pour contre-angle	6	EENPSETCV1
VITA ENAMIC Polishing Set technique	Polissage à deux étapes avec pointes à prépolir et à lustrer pour pièce à main	8	EENPSETT

## VITA ENAMIC® Polishing Set clinique – Réassort

Désignation	Informations	Contenu / pièce	N° art.
<b>Prépolissage (rose)</b>	Instruments SiC (carbure de silicium)		
Instrument à polir, pointe, VI-EB14m		3	ERWEB14M3
Instrument à polir, lentille, VI-EL10m		6	ERWEL10M6
Instrument à polir, cupule, VI-EC7m		6	ERWEC7M6
<b>Polissage haute brillance (gris)</b>	Instruments diamantés		
Instrument à polir, pointe, VI-EB14f		3	ERWEB14F3
Instrument à polir, lentille, VI-EL10f		6	ERWEL10F6
Instrument à polir, cupule, VI-EC6f		6	ERWEC6F6

## VITA ENAMIC® Polishing Set technique – Réassort

Désignation	Informations	Contenu / pièce	N° art.
<b>Prépolissage (rose)</b>	Instruments SiC (carbure de silicium)		
Instrument à polir, pointe, VI-ES5m		6	ERHES5M6
Instrument à polir, torpille, VI-ET6m		6	ERHET6M6
Instrument à polir, roue, VI-ER15m		6	ERHER15M6
Instrument à polir, lentille, VI-EL16m		6	ERHEL16M6
<b>Polissage haute brillance (gris)</b>	Instruments diamantés		
Instrument à polir, pointe, VI-ES5f		6	ERHES5F6
Instrument à polir, torpille, VI-ET6f		6	ERHET6F6
Instrument à polir, roue, VI-ER15f		6	ERHER15F6
Instrument à polir, lentille, VI-EL16f		6	ERHEL16F6

Pour de plus amples informations sur VITA ENAMIC, consultez le site [www.vita-enamic.de](http://www.vita-enamic.de) / [www.vita-enamic.com](http://www.vita-enamic.com)

**VITA**