

VITA ENAMIC® Polishing Set clinical/technical

Pentru prelustruirea și lustruirea finală a ceramicii hibride VITA ENAMIC



VITA Determinarea culorii

VITA Transmiterea culorii

VITA Reproducerea culorii

VITA Verificarea culorii

Ediția: 09.16

VITA shade, VITA made.

VITA

Descrierea produsului

Seturile de lustruire pentru VITA ENAMIC au fost realizate pentru tratarea suprafeței restaurărilor din ceramică hibridă într-un mod corect, eficient și specific materialului, în cabinete și laboratoare dentare. Setul include diferite instrumente pentru prelustruire și

lustruire finală. Aceste instrumente sunt potrivite pentru lustruirea atentă și delicată a suprafețelor ocluzale, cuspidilor, fisurilor și punctelor de contact ale restaurării și conferă suprafeței o strălucire deosebită.

Avantaje

Rezultate finale excelente

Cu aceste instrumente se pot obține suprafețe cu un luciu intens și rezistente la placa bacteriană. Concentricitatea exactă, mărimea egală a granulelor și geometria individuală a instrumentelor garantează rezultate de precizie superioară.

Manipulare simplă și sigură

Instrumentele au o performanță ridicată în îndepărtarea excesului de material. Manipularea ușoară și utilizarea fără pastă de lustruit permit prelucrarea simplă și rapidă.

Prelucrare delicată și atentă

Aceste instrumente au fost elaborate special pentru VITA ENAMIC cu scopul de a asigura lustruirea delicată și atentă, reducând riscul formării eventualelor microfisuri.

Date despre produs

VITA-ENAMIC Setul de lustruire pentru cabinet include un total de 6 instrumente pentru contra-unghi; 3 instrumente pentru prelustruire și 3 instrumente pentru lustruire finală.

VITA-ENAMIC Setul de lustruire pentru laborator include un total de 8 instrumente pentru piesa de mână; 4 instrumente pentru prelustruire și 4 instrumente pentru lustruire finală.

VITA ENAMIC® seturi

Denumire	Descriere	Conținut/bucăți	Nr. Prod.
VITA ENAMIC - Set lustruire - Cabinet	Sistem de lustruire în 2 etape cu instrumente pentru prelustruire și instrumente pentru lustruire finală, pentru contra-unghi	6	EENPSETCV1
VITA ENAMIC - Set lustruire - Laborator	Sistem de lustruire în 2 etape cu instrumente pentru prelustruire și instrumente pentru lustruire finală, pentru piesa de mână	8	EENPSETT

VITA ENAMIC® Set lustruire pentru cabinet - rezerve

Denumire	Descriere	Conținut/bucăți	Nr. Prod.
Prelustruire (roz)	Instrumente din silicon-carbid (SiC)		
Instrument lustruire, vârf lung ascuțit VI-EB14m		3	ERWEB14M3
Instrument lustruire, lentilă, VI-EL10m		6	ERWEL10M6
Instrument lustruire, cupă, VI-EC7m		6	ERWEC7M6
Lustruire finală (gri)	Instrumente diamantate		
Instrument lustruire, vârf lung ascuțit, VI-EB14f		3	ERWEB14F3
Polipant pentru lustruit, lentilă, VI-EL10f		6	ERWEL10F
Instrument lustruire, cupă, VI-EC6f		6	ERWEC6F6

VITA ENAMIC® Set lustruire pentru laborator- rezerve

Denumire	Descriere	Conținut/bucăți	Nr. Prod.
Prelustruire (roz)	Instrumente din silicon-carbid (SiC)		
Instrument lustruire cu vârf lung ascuțit VI-ES5m		6	ERHES5M6
Instrument lustruire, torpilă, VI-ET6m		6	ERHET6M6
Instrument lustruire, disc, VI-ER15m		6	ERHER15M6
Instrument lustruire, lentilă, VI-EL16m		6	ERHEL16M6
Instrumente lustruire finală (gri)	Instrumente diamantate		
Instrumente lustruire, vârf lung ascuțit VI-ES 5 f		6	ERHES5F6
Instrument lustruire, torpilă, VI-ET6f		6	ERHET6F6
Instrument lustruire, disc, VI-ER15f		6	ERHER15F6
Instrument lustruire, lentilă, VI-EL16f		6	ERHEL16F6

Mai multe informații despre VITA ENAMIC sunt disponibile pe www.vita-enamic.de/www.vita-enamic.com

VITA