

# VITA FiringAssist i-Line

Programa para preparação de Programas de queima VITA V60 i-Line®

Guia de referência rápido – Inserir novos programas de queima em uma lista de programas existentes



VITA Determinação de Cor

VITA Comunicação de Cor

VITA Reprodução de Cor

VITA Controle de Cor

Stand 11.16

VITA shade, VITA made.

**VITA**



## Índice

<b>1</b>	<b>Instalação do VITA FiringAssist i-Line</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Informação Importante</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Transferir lista de programas de VITA V60 i-Line para o VITA FiringAssist i-Line</b>	<b>5</b>
3.1	Preparação do pen drive USB	5
3.2	Exportar lista de programas do VITA V60 i-Line	6
3.3	Importar lista de programas para o VITA FiringAssist i-Line	6
<b>4</b>	<b>Editar lista de programas</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Adição de programas à lista de programas</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Transferir nova lista de programas para o VITA V60 i-Line</b>	<b>9</b>
6.1	Exportar lista de programas para o dispositivo USB	9
6.2	Importar lista de programas para o VITA V60 i-Line	10
6.3	Preparar o dispositivo USB para utilização posterior	10

## 1 Instalação do VITA FiringAssist i-Line

Para instalar o VITA FiringAssist i-Line, execute os seguintes passos:

- Instalar no PC o arquivo **VITA\_FiringAssist\_i\_Line\_installer\_1\_0\_0.exe**  
Eventualmente serão necessários direitos de Administrador para a instalação.
- Inserir o caminho da instalação durante a instalação (por exemplo, *C:\Programme\lv60tool*).

Após a instalação bem-sucedida do programa, você encontra uma nova entrada de menu com o nome *VITA FiringAssist i-Line* no menu inicial.

Lá é possível acessar estas instruções e uma rotina de desinstalação no programa *VITA FiringAssist i-Line*.

## 2 Informação Importante


**Caso uma nova lista de programas seja transferida para o VITA V60 i-Line, todas as listas de programas de queima já existentes no VITA V60 i-Line serão substituídas.**

**Para evitar uma substituição indesejada de uma lista de programas VITA V60 i-Line existente, aconselha-se sempre exportar uma cópia de segurança da lista de programas de queima do VITA V60 i-Line para uma pen drive USB preparado e vazio.**

### 3 Transferir lista de programas do VITA V60 i-Line para o VITA FiringAssist i-Line

Para poder importar a lista de programa salva no V60 i-Line para o VITA FiringAssist i-Line, você primeiro precisará de uma pen drive USB preparada. Em seguida, a lista de programa pode ser exportada a partir do VITA V60 i-Line e importada para o VITA FiringAssist i-Line.

#### 3.1 Preparar o dispositivo USB

- Insira uma unidade USB completamente vazia no PC.
- Abra o VITA FiringAssist i-Line.
- Clique no símbolo  (Preparar) na área superior do programa.

Em seguida, todas as unidades disponíveis (= possíveis pen drive USB) são exibidas em uma nova janela. No exemplo esquematizado abaixo (fig. 1), a unidade “N”, a título de exemplo, é designada como “KING”.

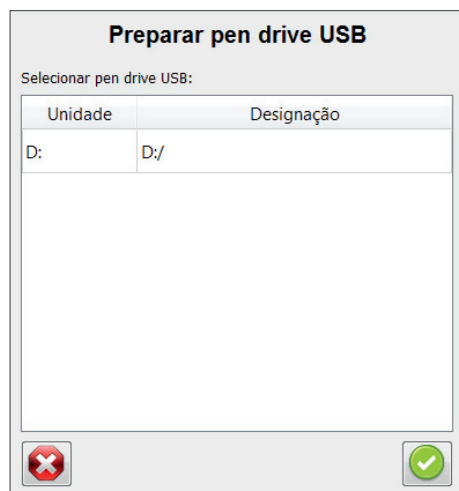


Fig. 1: Seleção da unidade (= pen drive USB)

- Selecione a unidade (= pen drive USB) e confirme a seleção (ou clique duas vezes na unidade).

Uma janela com a indicação “Preparação bem-sucedida! O pen drive USB pode agora ser ejetado e, em seguida, retirado.”

### 3.2 Exportar lista de programas do VITA V60 i-Line


- Insira a unidade USB preparada no VITA V60 i-Line desligado.
- Ligue o VITA V60 i-Line no interruptor principal.

Após a ligação do VITA V60 i-Line, toda a lista de programas do VITA V60 i-Line é exportada para a pen drive USB.

- Aguarde até que o VITA V60 i-Line esteja pronto para o funcionamento.
- Em seguida, remova novamente a pen drive USB.

Uma cópia da lista de programas ("programs.vup") encontra-se agora na pen drive USB na pasta "programs".

### 3.3 Importar lista de programas para o VITA FiringAssist i-Line

- Insira a unidade USB novamente no PC.
- No VITA FiringAssist i-Line, clique no símbolo  (Importar).
- Selecione na nova janela a unidade (= pen drive USB) com um duplo clique.

Em seguida, é mostrada a lista de programas importada na tabela à esquerda da janela de programas (Fig. 2)

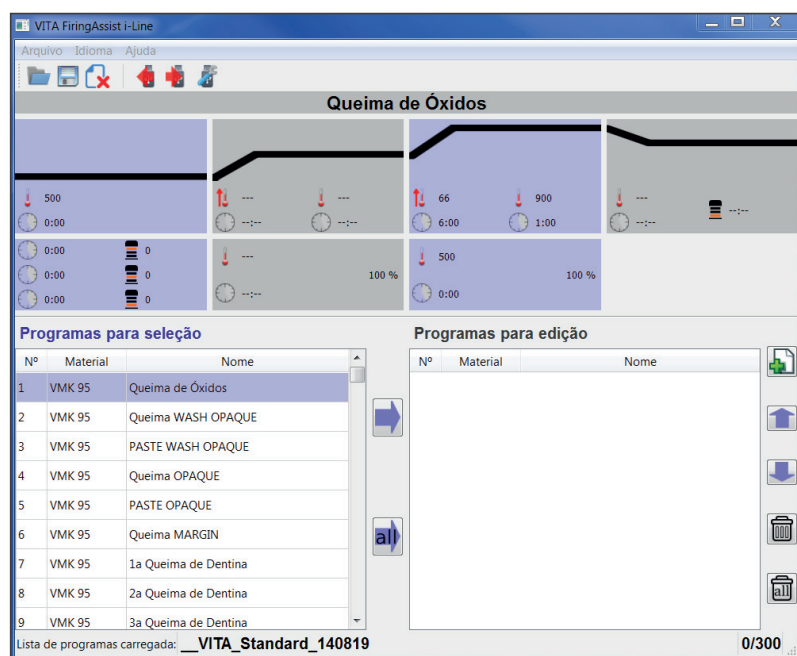



Fig. 2: Janela de programa do VITA FiringAssist i-Line

## 4 Editar lista de programas


- Clique sobre o símbolo .

Todos os programas da lista de programas da tabela à esquerda serão copiados para a tabela à direita.

Tab. 1: Tabelas à esquerda e à direita com possibilidades de função

Tabela à esquerda	Tabela à direita
Exibição simples da lista de programas aberta	Edição da lista de programas aberta
Lista de programas não editável	Lista de programas editável, armazenável + exportável
Qualquer um ou todos os programas da lista de programas aberta pode ser movido para a direita	Programas <b>não</b> poderão ser movidos para a esquerda

Agora, crie uma cópia de segurança da lista de programas no PC.

- Clique no símbolo  (Salvar).  
Abre-se uma nova janela de programas para inserção de um nome para a lista de programas.
- Dê um nome para a lista de programas e confirme.

**Dica:** Ao escrever a data atual no nome, você ficará sabendo quando foi a última atualização.

Posteriormente, a lista de programas importada na tabela à direita poderá ser editada, se necessário.

## 5 Adição de programas à lista de programas

Para adicionar novos programas na lista à direita, a partir de outra lista de programas, a nova lista de programas na tabela à esquerda deve ser aberta.





- Clique sobre o símbolo  (Abrir).  
Aparece uma lista com todas as listas de programas salvas.
- Selecione a lista de programas desejada e confirme.



Fig. 3: Carregamento de uma seleção de programas.

- Clique na tabela à direita do programa sob o qual os programas a serem copiados serão definidos.
- Clique em uma ou mais (mantenha o botão do mouse pressionado) listas de programas desejadas na tabela à esquerda.
- Clique sobre o símbolo .

Os programas copiados serão colocados na tabela à direita abaixo do programa marcado.


A posição de um ou mais programas marcados na tabela à direita pode ser alterada clicando nos ícones  . Uma pressão prolongada conduz a um deslocamento contínuo.



## 6 Transferir nova lista de programas para o VITA V60 i-Line

A lista de programas alterada na tabela à direita pode ser exportada para a pen drive USB e importada para a VITA V60 i-Line.

### 6.1 Exportar lista de programas para a pen drive USB

- Clique sobre o símbolo  (Exportar).
- Selecione a unidade (= unidade pen drive USB) e confirme a seleção (ou clique duas vezes na unidade).

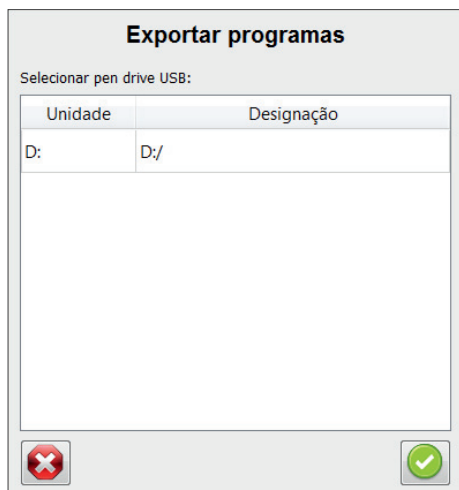


Fig. 4: Seleção da unidade (= pen drive USB)

O aviso "Exportadas com sucesso! A pen drive USB pode agora ser ejetada e, em seguida, removida." confirma a exportação de dados bem-sucedida.

Caso apareça a mensagem de aviso "Substituir arquivo existente?", o arquivo deve ser substituído a fim de transmitir a nova lista de programas na pen drive USB. A nova lista de programas encontra-se agora na pen drive USB e pode ser importada para a VITA V60 i-Line.

### 6.2 Importar lista de programas no VITA V60 i-Line

- Insira a unidade USB preparada no VITA V60 i-Line **desligado**.
- Ligue o VITA V60 i-Line no interruptor principal.


Após a ligação do VITA V60 i-Line, toda a novas lista de programas da pen drive USB é importada para o VITA V60 i-Line.

#### **A lista de programas pré-instalada no VITA V60 i-Line é substituída!**

- Aguarde até que o VITA V60 i-Line esteja pronto para o funcionamento.
- Remova a pen drive USB novamente do VITA V60 i-Line.

### 6.3 Preparar a pen drive USB para utilização posterior

Para evitar uma futura substituição **indesejada** de uma lista de programas no VITA V60 i-Line, exclua a nova lista de programas da pen drive USB após sua transferência bem-sucedida.

- Insira a unidade USB no PC.
- Abra o arquivo do VITA FiringAssist i-Line.
- Clique no símbolo  (Preparar) na área superior do programa.

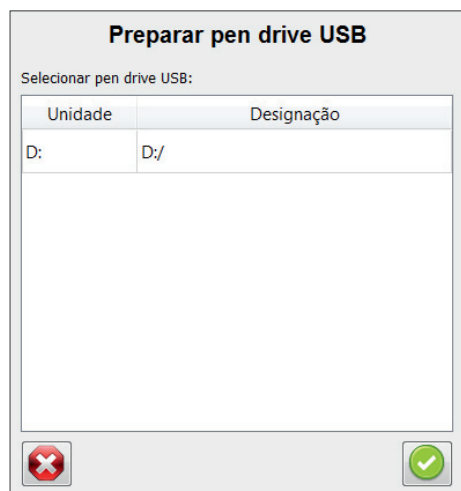


Fig. 5: Seleção da unidade (= pen drive USB)

- Selecione a unidade (= unidade pen drive USB) na nova janela e confirme (ou clique duas vezes na unidade).

Aparece a pergunta "Excluir arquivos existentes?".


- Confirme a exclusão do arquivo.

Abre-se uma janela com a indicação "Preparação bem-sucedida! A pen drive USB pode agora ser ejetada e, em seguida, retirado.

Agora, a pen drive USB está novamente vazia e preparado para o próximo uso.



Com o excepcional sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER, todas as cores naturais de dentes são selecionadas de forma sistemática e completamente reproduzidos.

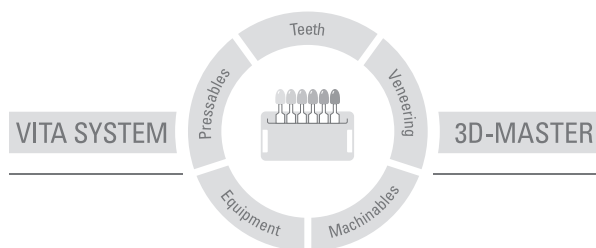

**Nota importante:** Os nossos produtos devem ser utilizados de acordo com as informações de utilização. Não nos responsabilizamos por danos decorrentes de manuseamento ou utilização incorretos. Além disso, o utilizador tem a obrigação de verificar a adequabilidade do produto à área de aplicação prevista antes da sua utilização. Declinamos qualquer responsabilização em caso de utilização do produto juntamente com materiais e equipamentos de outros fabricantes cuja utilização seja incompatível ou não permitida juntamente com o nosso produto. No restante, a nossa responsabilidade pela exatidão das presentes informações, independente da base jurídica e nos limites juridicamente admissíveis, está limitada, em todo o caso, ao valor dos produtos fornecidos consoante fatura, excluindo IVA. Em particular, e na medida do legalmente admissível, não assumimos qualquer responsabilidade por perdas de lucro, danos indiretos, danos consequenciais ou reclamações de terceiros contra o comprador. A reivindicação de indenizações por danos imputáveis (culpa na formação dos contratos, violação positiva dos termos do contrato, atos ilícitos, etc.) tem lugar apenas em caso de dolo ou negligência grosseira. O VITA Modulbox não é um componente obrigatório do produto.

Data de publicação destas informações de utilização: 11/16

Com a publicação deste folheto, todas as versões anteriores se tornam inválidas. A respectiva versão atualizada encontra-se em [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49 (0) 7761 / 562-0 · Fax +49 (0) 7761 / 562-299  
Hotline: Tel. +49 (0) 7761 / 562-222 · Fax +49 (0) 7761 / 562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)