

# VITA YZ<sup>®</sup> HT – Estetica e precisione

Altamente traslucente. Preciso. Biossido di zirconio



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 12.16

VITA shade, VITA made.

**VITA**

## Descrizione del prodotto

VITA YZ HT è un biossido di zirconio ad alta traslucenza, indicato soprattutto per riabilitazioni monolitiche grazie all'altissima resistenza (ca. 1.200 MPa) e alla buona conducibilità della luce. E' pertanto un materiale alternativo economico ed estetico alle leghe non nobili e ai rivestimenti

parziali in metallo-ceramica. Per una riproduzione esatta del colore il sistema VITA YZ HT comprende componenti specifici come ad es. i VITA YZ HT SHADE LIQUID ed i supercolori VITA AKZENT Plus.

# VITA YZ<sup>®</sup> HT – Estetica e precisione

## Indicazioni

Primariamente per riabilitazioni a ponte monolitiche, ad alta resistenza:

- ponti monolitici per il settore frontale e posteriore
- riabilitazioni in situazioni di spazio limitato

## Vantaggi

- risultati precisi grazie all'elevata stabilità dei bordi e alla precisione di sinterizzazione
- potenziale estetico eccellente grazie all'elevata trasparenza
- dischi e blocchetti del colore dei denti per la realizzazione efficiente di restauri monolitici
- riabilitazioni minimamente invasive, perchè sono possibili spessori sottili
- componenti specifici (ad es. liquidi, supercolori) per la riproduzione esatta del colore

## Geometrie

VITA YZ HT è disponibile

- in blocchetti nelle geometrie: 20/19, 40/19, 55/19, 65/25
- in DISC nelle geometrie: Ø 98,4, spessori: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 mm

## Colori

VITA YZ HT è disponibile

- come YZ HT<sup>White</sup>: non cromatizzato (bianco) da cromatizzare individualmente
- come YZ HT<sup>Color</sup>: precromatizzato in 1M2, 2M2 e 3M2 (solo in geometria DISC)
- come YZ HT<sup>Color</sup>: precromatizzato in A1, A2 e A3 (solo in geometria DISC)

## Componenti di sistema:



## VITA YZ<sup>®</sup> HT

### Geometrie DISC non cromatizzato

Colore	Denominazione	Geometria	Contenuto	Codice
non cromatizzato	VITA YZ HT <sup>White</sup>	Ø 98,4/h 10 mm	1 pz	ECDY14981000
non cromatizzato	VITA YZ HT <sup>White</sup>	Ø 98,4/h 12 mm	1 pz	ECDY14981200
non cromatizzato	VITA YZ HT <sup>White</sup>	Ø 98,4/h 14 mm	1 pz	ECDY14981400
non cromatizzato	VITA YZ HT <sup>White</sup>	Ø 98,4/h 16 mm	1 pz	ECDY14981600
non cromatizzato	VITA YZ HT <sup>White</sup>	Ø 98,4/h 18 mm	1 pz	ECDY14981800
non cromatizzato	VITA YZ HT <sup>White</sup>	Ø 98,4/h 20 mm	1 pz	ECDY14982000
non cromatizzato	VITA YZ HT <sup>White</sup>	Ø 98,4/h 25 mm	1 pz	ECDY14982500

**Geometrie DISC precromatizzato in VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

Colore	Denominazione	Geometria	Contenuto	Codice
1M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 10 mm	1 pz	ECDY24981007
1M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 12 mm	1 pz	ECDY24981207
1M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 14 mm	1 pz	ECDY24981407
1M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 16 mm	1 pz	ECDY24981607
1M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 18 mm	1 pz	ECDY24981807
1M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 20 mm	1 pz	ECDY24982007
1M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 25 mm	1 pz	ECDY24982507
2M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 10 mm	1 pz	ECDY24981012
2M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 12 mm	1 pz	ECDY24981212
2M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 14 mm	1 pz	ECDY24981412
2M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 16 mm	1 pz	ECDY24981612
2M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 18 mm	1 pz	ECDY24981812
2M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 20 mm	1 pz	ECDY24982012
2M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 25 mm	1 pz	ECDY24982512
3M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 10 mm	1 pz	ECDY24981020
3M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 12 mm	1 pz	ECDY24981220
3M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 14 mm	1 pz	ECDY24981420
3M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 16 mm	1 pz	ECDY24981620
3M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 18 mm	1 pz	ECDY24981820
3M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 20 mm	1 pz	ECDY24982020
3M2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 25 mm	1 pz	ECDY24982520

**Geometrie DISC precromatizzato in VITA classical A1-D4®**

Colore	Denominazione	Geometria	Contenuto	Codice
A1	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 10 mm	1 pz	ECDY24981036
A1	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 12 mm	1 pz	ECDY24981236
A1	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 14 mm	1 pz	ECDY24981436
A1	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 16 mm	1 pz	ECDY24981636
A1	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 18 mm	1 pz	ECDY24981836
A1	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 20 mm	1 pz	ECDY24982036
A1	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 25 mm	1 pz	ECDY24982536
A2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 10 mm	1 pz	ECDY24981037
A2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 12 mm	1 pz	ECDY24981237
A2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 14 mm	1 pz	ECDY24981437
A2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 16 mm	1 pz	ECDY24981637
A2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 18 mm	1 pz	ECDY24981837
A2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 20 mm	1 pz	ECDY24982037
A2	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 25 mm	1 pz	ECDY24982537
A3	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 10 mm	1 pz	ECDY24981038
A3	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 12 mm	1 pz	ECDY24981238
A3	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 14 mm	1 pz	ECDY24981438
A3	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 16 mm	1 pz	ECDY24981638
A3	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 18 mm	1 pz	ECDY24981838
A3	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 20 mm	1 pz	ECDY24982038
A3	VITA YZ HT <sup>Color</sup>	Ø 98,4/h 25 mm	1 pz	ECDY24982538

### Geometrie blocchetto non cromatizzato

Colore	Denominazione	Geometria	Contenuto	Codice
non cromatizzato	VITA YZ HT <sup>White</sup>	20/19: 20 x 19 x 15,5 mm	4 pz	EC4Y14007804
non cromatizzato	VITA YZ HT <sup>White</sup>	40/19: 39 x 19 x 15,5 mm	2 pz	EC4Y14008042
non cromatizzato	VITA YZ HT <sup>White</sup>	55/19: 55 x 19 x 19 mm	2 pz	EC4Y14009842
non cromatizzato	VITA YZ HT <sup>White</sup>	65/25: 65 x 25 x 22 mm	1 pz	EC4Y14008401

### VITA YZ<sup>®</sup> HT SHADE LIQUID Starter Set classical A1-D4<sup>®</sup> – Cod. EZ0CC

Q.tà	Denominazione	Misura
1 ciascuno	A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2	50 ml
1 ciascuno	Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D	20 ml
1 ciascuno	Pink (rosa), Grey (grigio), Blue (blu)	20 ml
1	Indicatore	10 ml
1	Stabilizzatore	50 ml
1	Set penelli	Spessore 2 e 4

### VITA YZ<sup>®</sup> HT SHADE LIQUID Starter Set VITA SYSTEM 3D-MASTER<sup>®</sup> – Cod. EZ0C3D

Q.tà	Denominazione	Misura
1 ciascuno	1M1, 1M2, 2L1.5, 2M2, 3M2, 3M3, 4M2	50 ml
1 ciascuno	Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D	20 ml
1 ciascuno	Pink (rosa), Grey (grigio), Blue (blu)	20 ml
1	Indicatore	10 ml
1	Stabilizzatore	50 ml
1	Set penelli	Spessore 2 e 4

Avvertenza: gli articoli contenuti negli assortimenti sono disponibili anche in confezione singola.  
Per ulteriori informazioni e per i codici delle confezioni singole consultare [www.vita-zahnfabrik.com/cadcam](http://www.vita-zahnfabrik.com/cadcam)

### Compatibilità di sistema

#### VITA YZ<sup>®</sup> HT – SOLUZIONI DI SISTEMA

VITA offre VITA YZ HT con supporti specifici per il sistema CAD/CAM:

- inLab (Sirona Dental GmbH)

#### VITA YZ<sup>®</sup> HT – SOLUZIONI UNIVERSALI

VITA offre VITA YZ HT in geometria DISC universale (Ø 98,4 mm) per i sistemi CAD/CAM:

- Serie CORiTEC (imes-icore GmbH)
- Serie ULTRASONIC (SAUER GmbH / DMG Mori Seiki AG)
- Serie RXD (Röders GmbH)
- inLab MC X5 (Sirona Dental GmbH)
- S1/S2/K3/K4/K5 Impression (vhf camfacture AG)

Avvertenza: in linea di principio i VITA YZ HT DISC possono essere fresati con tutti i sistemi CAD/CAM aperti, in grado di utilizzare dischi con un diametro di 98,4 mm (incl. scanalatura circolare).

**VITA**