


VITA VIONIC® SOLUTIONS

Für digitale Prothetik mit offenen CAD/CAM-Systemen

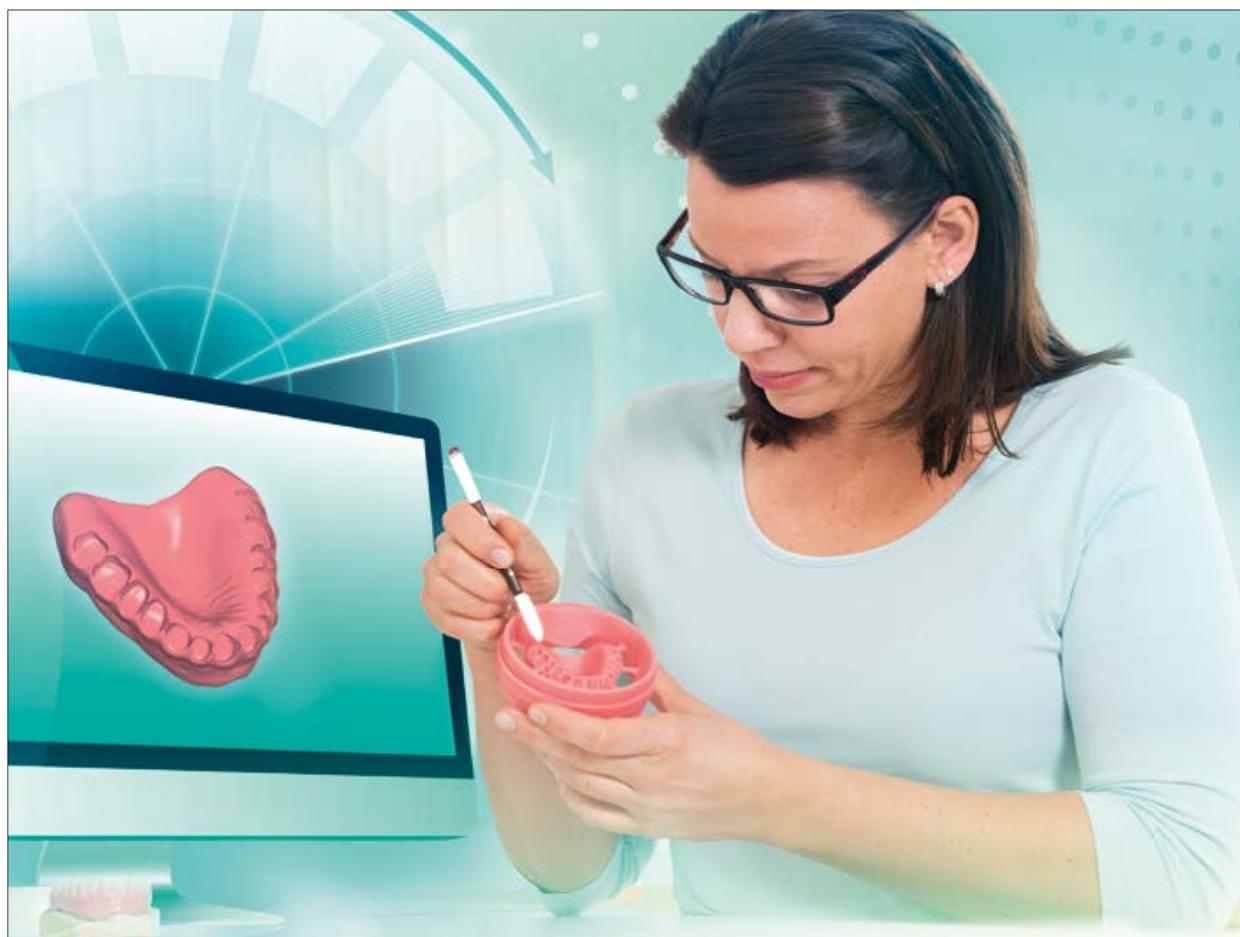

VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

Stand 12.17

VITA – perfect match.

VITA

Produktbeschreibung

VITA VIONIC SOLUTIONS ermöglicht die effiziente Herstellung von CAD/CAM-Wachsaufstellungen. Im ersten Schritt erfolgt die zeitsparende, digitale Prothetikaufstellung mittels CAD-Software. Im zweiten Schritt wird analog zum Prothesendesign aus VITA VIONIC WAX eine präzise Wachsbasis oder

eine vollformatige Wachsaufstellung CAM-technisch gefertigt. Nach erfolgreicher Einprobe wird im letzten Schritt die Prothese konventionell fertiggestellt. Mit VITA VIONIC profitieren Labore bei der Herstellung von Zeitersparnis und hoher Präzision.

CAD/CAM-WACHSAUFSTELLUNG



Was?

- Wachs-Disc zur Herstellung von CAD/CAM-Wachsaufstellungen

Womit?

- VITA VIONIC WAX in Pink für eine präzise Wachsbasis
- VITA VIONIC WAX in White für eine vollformatige Wachsaufstellung

VORTEILE



zeiteffiziente Wachsaufstellung

- durch digitale Konstruktion und CAM-Fertigung


präzise Wachsaufstellung

- durch exakt gefräste Kavitäten auf Grundlage der digitalen Konstruktion

komfortable Wachseinprobe

- dank vollformatiger CAD/CAM-Prothesenherstellung aus weißem Wachs

CAD-DESIGN

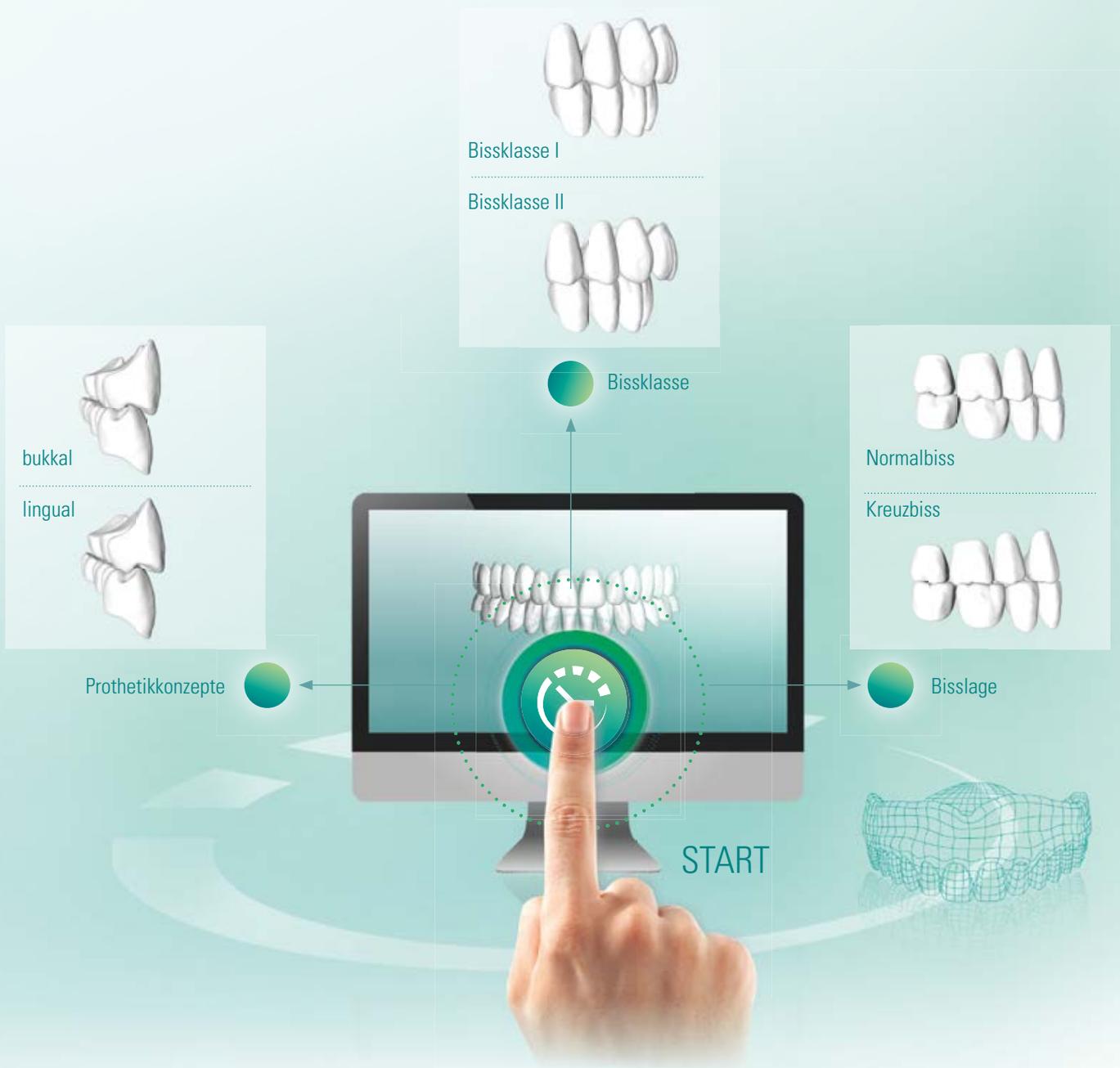

Was?

- CAD-Software mit VITA-spezifisch abgestimmten Designoptionen

Wofür?

Einfache, patientenindividuelle Rekonstruktion der Funktion ...

- durch integrierte bukkale und linguale Konzepte
- durch integrierte Bissklassen (I + II)
- durch integrierte Bisslagen (Normal-/Kreuzbiss)

Wofür?

- für die digitale, patientenindividuelle Prothetikaufstellung per Knopfdruck

WORKFLOW



- Profitieren Sie beim CAD-Design der Prothese von den VITA-spezifisch **abgestimmten Prothetikkonzepten**.



- Zur Herstellung der Wachsaufstellung verwenden Sie die **Synthetikwachs-Rohlinge VITA VIONIC WAX**.



- Für einen sicheren Verbund von VITA Prothesenzähnen zu Basismaterialien nutzen Sie den **Haftvermittler VITACOLL**.




- Verwenden Sie von VITA **empfohlene Kalt-/Heißpolymerisate** zur Basisherstellung, z.B. mittels Injektions- oder Stopfverfahren.



- Für die Fertigstellung nutzen Sie **geeignete Polierinstrumente** und zur Individualisierung das **Verblendkomposit VITA VM LC**.

BASISINFORMATION

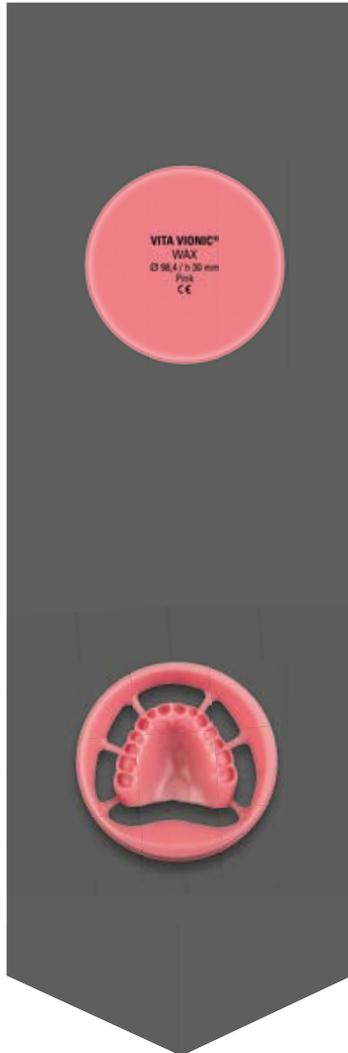

Charakteristika?

VITA VIONIC WAX

- sind formstabile, temperaturbeständige Synthetikwachs-Rohlinge

Verfügbare Farben?

- Pink
- White



Verfügbare Geometrien?

- Ø 98,4 mm / H 30 mm



SYSTEMKOMPATIBILITÄT



CAD-Technologiepartner für VITA Digital Prothetik


- 3Shape AS

VITA VIONIC WAX ist verfügbar für die Systeme*:


- CORiTEC Serie (imes-icore GmbH)
- DG Shape DWX Serie

*) Validierte VITA-Systempartner für die Verarbeitung ausgewählter VITA VIONIC Komponenten.

SYSTEMKOMPONENTEN

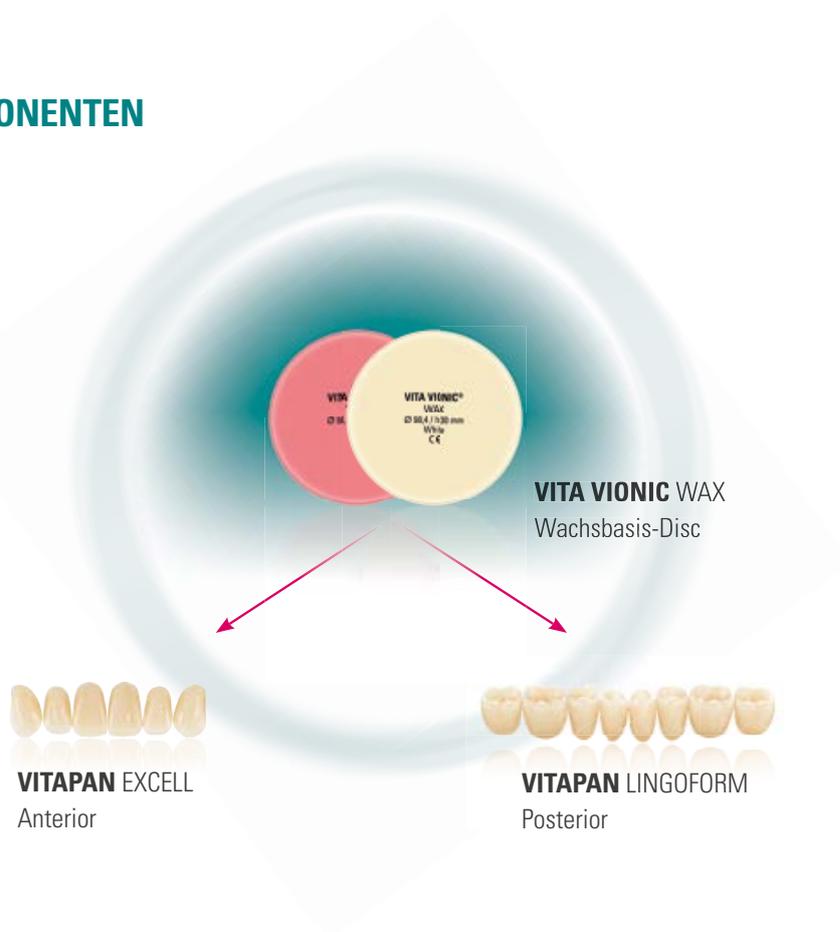

Weitere Informationen zu VITA VIONIC SOLUTIONS
finden Sie unter: www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics

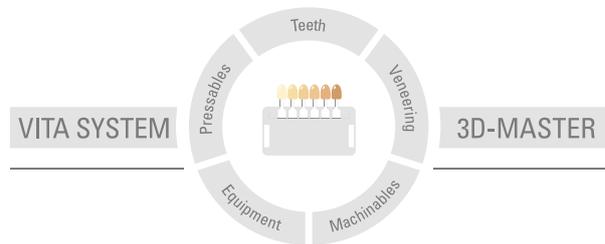

Zur Beachtung: Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht vertraglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird. Im Übrigen ist unsere Haftung für die Richtigkeit dieser Angaben unabhängig vom Rechtsgrund und, soweit gesetzlich zulässig, in jedem Falle auf den Wert der gelieferten Ware lt. Rechnung ohne Umsatzsteuer begrenzt. Insbesondere haften wir, soweit gesetzlich zulässig, in keinem Fall für entgangenen Gewinn, für mittelbare Schäden, für Folgeschäden oder für Ansprüche Dritter gegen den Käufer. Verschuldensabhängige Schadensersatzansprüche (Verschulden bei Vertragsabschluss, pos. Vertragsverletzung, unerlaubte Handlungen etc.) sind nur im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gegeben. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes.

Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 12.17

Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik ist nach der Medizinprodukterichtlinie zertifiziert und folgende Produkte tragen die Kennzeichnung  0124:

VITA VIONIC®WAX

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik