


VITA Easyshade® V – Nouvelles fonctions de la mise à jour, version 507h

1. Boutons interactifs dans l'option de menu « Informations concernant VITA Easyshade V »

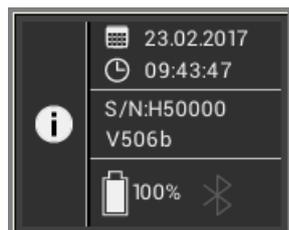

Lorsque vous tapez sur le symbole **i** dans le menu principal, vous parvenez aux informations concernant l'appareil. La date et l'heure, le numéro de série, la version du logiciel, l'état de charge de la batterie et le statut Bluetooth y sont affichés.



Lorsque vous tapez sur « Date et heure » dans la zone supérieure, vous parvenez directement aux réglages dans lesquels vous pouvez entreprendre des modifications concernant la date et l'heure. Dans la zone centrale sont affichés le numéro de série ainsi que la version du logiciel.



Le champ inférieur affiche l'état de la batterie ainsi que le statut Bluetooth. Cette fonction est désactivée si le symbole Bluetooth apparaît en gris. Si le symbole apparaît en blanc, la fonction Bluetooth est certes activée mais aucune connexion n'est encore établie avec un appareil.




Si VITA Easyshade V est connecté avec un PC Windows ou un appareil Android, des ondes radio sont affichées en haut à droite, à côté du symbole Bluetooth. Si VITA Easyshade V est connecté avec un appareil iOS, « iOS » est affiché en plus des ondes radio en bas à droite, à côté du symbole Bluetooth. En tapant sur le symbole Bluetooth, vous parvenez directement aux réglages Bluetooth et vous pouvez entreprendre des modifications.

2. Activer Bluetooth




Pour activer la fonction Bluetooth, allez dans le menu de réglages correspondant.

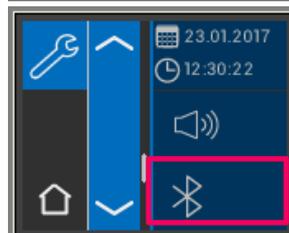

Sélectionnez le symbole Bluetooth.

VITA Easyshade® V – Nouvelles fonctions de la mise à jour, version 507h

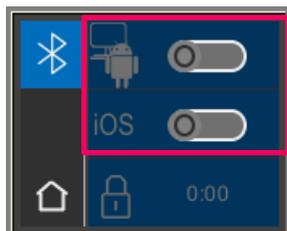


Vous pouvez sélectionner une liaison avec des appareils Windows/Android ou une liaison avec des appareils iOS.
VITA Easyshade V avec PC Windows/VITA Assist : voir point 3.
VITA Easyshade V avec appareil Android/application VITA mobileAssist : voir point 4.
VITA Easyshade V avec appareil iOS/application VITA mobileAssist, voir point 5.

3. Liaison Bluetooth avec des ordinateurs Windows / VITA Assist

Veillez d'abord vérifier si votre PC dispose d'un module Bluetooth intégré. Si tel est le cas, veuillez utiliser le module intégré. Sinon, veuillez utiliser la clé USB Bluetooth fournie avec VITA Easyshade V.


L'installation de la clé USB Bluetooth fournie ne requiert aucune intervention de l'utilisateur. Introduisez la clé dans un emplacement USB libre. Windows installe le pilote requis automatiquement. Windows parcourt sa base de données pendant l'installation du pilote. Cette opération peut prendre jusqu'à cinq minutes et ne peut pas être interrompue ni ignorée.

En cas d'utilisation de la clé Bluetooth fournie
Par le biais de « Configuration du système », allez à → « Appareils et imprimantes ». La clé USB est à présent visible dans la rubrique des appareils. La présence d'un point d'exclamation à côté de l'entrée signifie que le module Bluetooth n'a pas été correctement installé. Dans ce cas, supprimez l'entrée, retirez le module Bluetooth de l'emplacement USB et rebranchez-le.

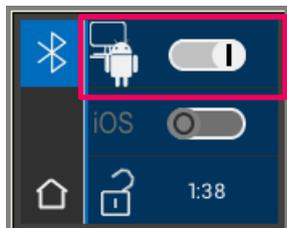

Allez dans les réglages Bluetooth. Poussez le curseur Bluetooth supérieur pour Windows/Android vers la droite pour activer Bluetooth. Le symbole de cadenas s'ouvre automatiquement et VITA Easyshade V est visible pendant deux minutes. Lorsque le cadenas est fermé, vous pouvez l'effleurer pour rendre à nouveau visible VITA Easyshade V.

Dans le logiciel VITA Assist, sélectionnez l'onglet « Assist » et ensuite « Options ». Dans les options, allez à « Easyshade » et assurez-vous que la case « Activer Bluetooth » est bien cochée. Cliquez sur « Oui » pour rechercher les Easyshade disponibles dans les environs. Sélectionnez votre Easyshade et cliquez sur « Sélectionner » et ensuite sur « Enregistrer ». Réalisez une mesure à l'aide de VITA Easyshade V. Si vous désirez transférer les résultats, créez un résultat d'analyse et cliquez sur « Relier ».

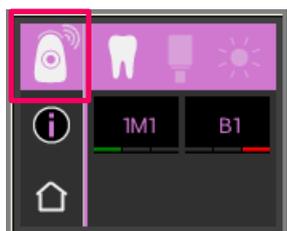


Lorsque la fonction d'importation automatique des mesures VITA Easyshade V est activée (Assist → Options → Easyshade → Activer par défaut l'importation automatique), les résultats de mesure sont transmis automatiquement. Si cette fonction n'est pas activée, vous pouvez transférer les résultats via Bluetooth en effleurant le symbole Résultat de mesure. Le transfert des résultats est possible à partir de tous les modes de mesure ainsi qu'à partir de la mémoire des mesures en effleurant le symbole respectif situé en haut à gauche. Il

VITA Easyshade® V – Nouvelles fonctions de la mise à jour, version 507h

n'est pas possible de transférer les résultats à partir du mode Restauration. Pour la transmission des données, VITA Easyshade V doit être relié avec l'ordinateur. Une connexion active s'affiche sous la forme d'une onde sur le symbole mode Mesure.

4. Liaison Bluetooth avec des appareils Android/appli VITA mobileAssist

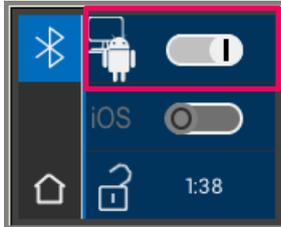

Installez VITA mobileAssist (disponible gratuitement dans Google Play Store). Allez dans les réglages Bluetooth de votre VITA Easyshade V. Poussez le curseur supérieur pour Windows/Android vers la droite, pour activer Bluetooth. Le symbole de cadenas s'ouvre automatiquement et VITA Easyshade V est visible pendant deux minutes. Lorsque le cadenas est fermé, vous pouvez l'effleurer pour rendre à nouveau visible VITA Easyshade V.


Assurez vous que la fonction Bluetooth est activée dans votre appareil (Réglages → Bluetooth). Dans l'appli VITA mobileAssist, effleurez le symbole « + » dans la barre supérieure. VITA mobileAssist recherche des VITA Easyshade V visibles dans les environs. Sélectionnez votre appareil en appuyant sur l'image de VITA Easyshade V. L'appli démarre. Dès que le symbole Bluetooth dans le coin supérieur gauche de l'appli ne clignote plus sur l'appareil Android, vous pouvez transférer les valeurs de mesure de VITA Easyshade V vers l'appli VITA mobileAssist.



Réalisez une mesure à l'aide de VITA Easyshade V. Transmettez les résultats en effleurant le symbole Résultat de mesure situé en haut à gauche. Le transfert des résultats est possible à partir de tous les modes de mesure ainsi qu'à partir de la mémoire des mesures en effleurant le symbole respectif situé en haut à gauche. Il n'est pas possible de transférer les résultats à partir du mode Restauration. Pour la transmission des données, VITA Easyshade V doit être relié avec l'appareil. Une connexion active s'affiche sous la forme d'une onde sur le symbole mode Mesure.

VITA Easyshade® V – Nouvelles fonctions de la mise à jour, version 507h

5. Liaison Bluetooth avec des appareils iOS/applic. VITA mobileAssist

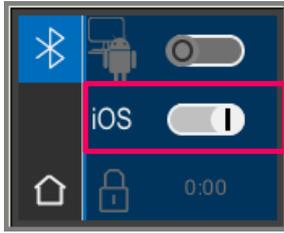

Installez l'application VITA mobileAssist (disponible gratuitement dans App Store). Allez dans les réglages Bluetooth de votre VITA Easyshade V. Poussez le curseur central iOS vers la droite pour activer Bluetooth. Le symbole de cadenas s'ouvre automatiquement et VITA Easyshade V est visible pendant deux minutes. Si le cadenas est fermé, vous pouvez l'effleurer pour rendre à nouveau visible VITA Easyshade V.

Sur votre appareil iOS, allez dans les réglages → Bluetooth. Assurez vous que la fonction Bluetooth est activée.

Attendez que VITA Easyshade V s'affiche comme appareil Bluetooth disponible sur votre appareil iOS. Pour établir une connexion avec VITA Easyshade V, sélectionnez votre VITA Easyshade V dans la liste en la touchant. Le statut « connecté » apparaît peu après.

A présent, les deux appareils sont reliés et prêts à transférer des valeurs de mesure.

Ensuite, la connexion est automatiquement rétablie pour la transmission des données.

Démarrez l'application VITA mobileAssist sur votre appareil iOS et touchez l'image VITA Easyshade V située dans la zone inférieure de votre écran.



À l'aide de VITA Easyshade V, réalisez une mesure. Pour transmettre les résultats, effleurez le symbole Résultat de mesure situé en haut à gauche. Le transfert des résultats est possible à partir de tous les modes de mesure ainsi qu'à partir de la mémoire des mesures en effleurant le symbole respectif situé en haut à gauche. Il n'est pas possible de transférer les résultats à partir du mode Restauration.

Avec les appareils iOS la connexion est établie automatiquement puis de nouveau coupée par VITA Easyshade V avant la transmission. Une onde apparait toujours à droite à côté du symbole Mode Mesure à partir du moment où votre VITA Easyshade V est connecté avec votre appareil iOS.

Remarque : VITA Easyshade V peut être relié à différents appareils iOS via Bluetooth. VITA Easyshade V tente toujours d'établir une connexion avec l'appareil avec lequel il était relié/connecté en dernier lieu. Pour relier VITA Easyshade V à nouveau avec un appareil déjà utilisé auparavant, il est nécessaire d'effectuer une nouvelle connexion. Pour cela, dans le menu Bluetooth de l'appareil iOS, supprimez VITA Easyshade V de la liste des appareils connus. Utilisez à cet effet le symbole ⓘ (« Ignorer cet appareil »), ensuite, reliez à nouveau VITA Easyshade V.


6. Mode Exercice




Cette fonction vous permet de vous exercer à manipuler l'appareil à partir d'un teintier VITA. Vous parvenez au mode Exercice en passant par l'option de menu Réglages.



La flèche vous permet de faire défiler jusqu'à la deuxième page.

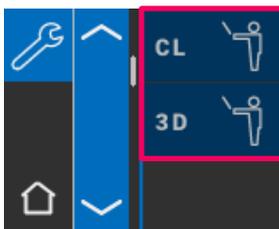

Vous pouvez sélectionner le mode Exercice pour les teintiers VITA classical A1-D4 (CL) ou les teintiers VITA SYSTEM 3D-MASTER (3D).

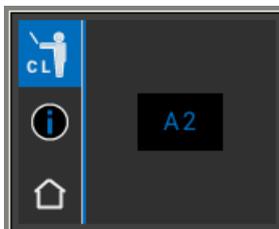

Pour la mesure placez bien la pointe de la sonde sur le tiers supérieur de la barrette de couleur échantillon (en deçà du collet) en exerçant une légère pression. Activez maintenant la touche Mesure. La couleur de dent la plus proche s'affiche.

Observation : en mode Exercice, les 29 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER et les 16 couleurs VITA classical A1–D4 s'affichent. Le fait de mesurer d'autres anneaux de couleur ou d'autres échantillons de couleur entraîne des résultats différents. Compte tenu des faibles écarts de couleur et des variations naturelles des échantillons, il est possible pour certaines couleurs, même si la procédure de mesure est légèrement modifiée, qu'une autre « couleur voisine » s'affiche.

