

VITA Easyshade® V – Istruzioni per l'aggiornamento del software

Gentili clienti e utilizzatori,

con la presente desideriamo informarvi sul nuovo aggiornamento software per il vostro VITA Easyshade V e pregarvi di installarlo secondo le istruzioni di seguito riportate.

Se avete domande sull'aggiornamento rivolgetevi al partner regionale per l'Assistenza Tecnica sugli apparecchi VITA. Potete contattare anche l'Assistenza Tecnica VITA:

- Tel.: +49 (0)77 61 / 562 – 101, -105, -106 o -114
- Fax: +49 (0)77 61 / 562 – 102
- Email: instruments-service@vita-zahnfabrik.com

1. Presupposti per il download e l'installazione

- Accesso internet
- PC Windows compatibile Bluetooth oppure Bluetooth-Dongle in dotazione al VITA Easyshade V

2. Procedura generale

Durata presunta dell'aggiornamento ca. 8 min.


1. Scaricare l'Update Software da internet
2. Sul VITA Easyshade V attivare Bluetooth e collegare al PC
3. Selezionare Update Software (.exe), inizia la ricerca apparecchio
4. Selezionare il VITA Easyshade V desiderato con un clic
5. Si apre la finestra Update
6. Avviare l'Update con „Start“
7. Durante l'aggiornamento non effettuare misure, etc. con il VITA Easyshade V.

VITA Easyshade® V – Istruzioni per l'aggiornamento del software

3. Istruzioni per l'aggiornamento

3.1 Download Update Software


- Download file.exe da <https://www.vita-zahnfabrik.com/de/Farbbestimmung/Digitale-Zahnfarbbestimmung/VITA-Easyshade-26933,27568.html>
- Downloads → Software e Update Software
- Cliccare sulla bandierina relativa al paese, per scaricare l'Update Software
- Selezionare „**Salvare in**“

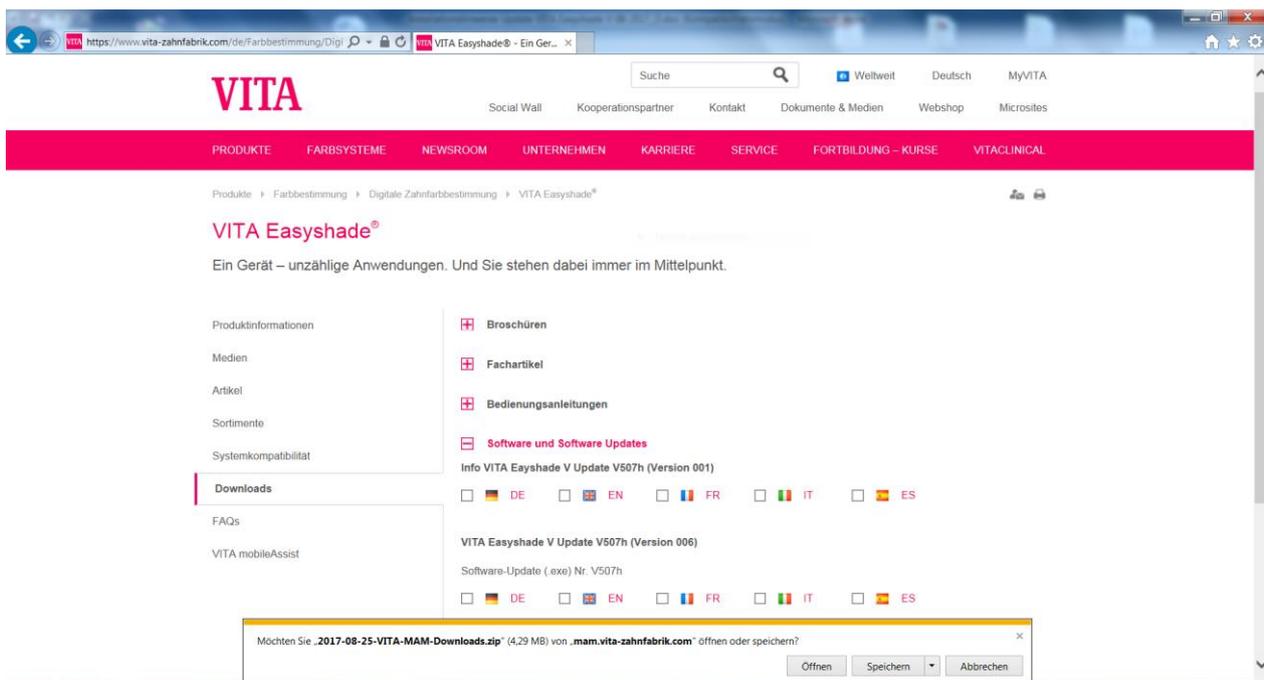


Salvare nel registro desiderato.

VITA Easyshade® V – Istruzioni per l'aggiornamento del software

Dopo il download cliccare su „Aprire cartella“.

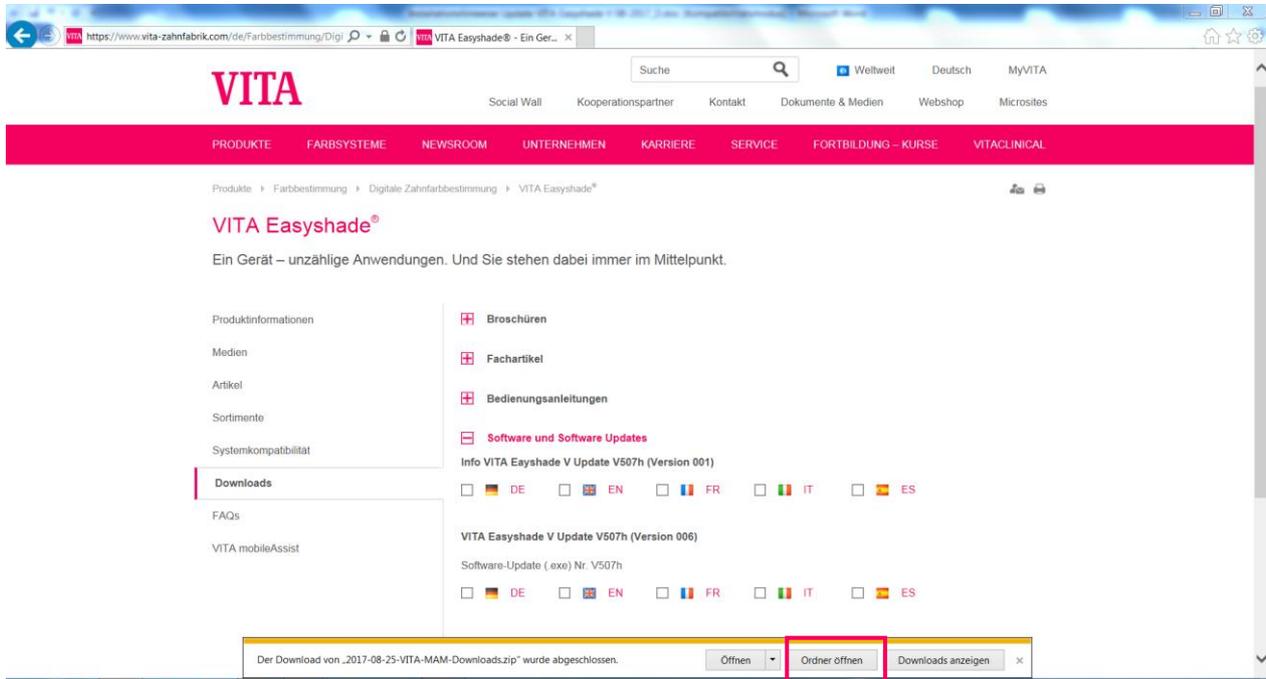


Aprire la cartella cliccando sul tasto destro del mouse. Selezionare „Estrarre tutti...“.

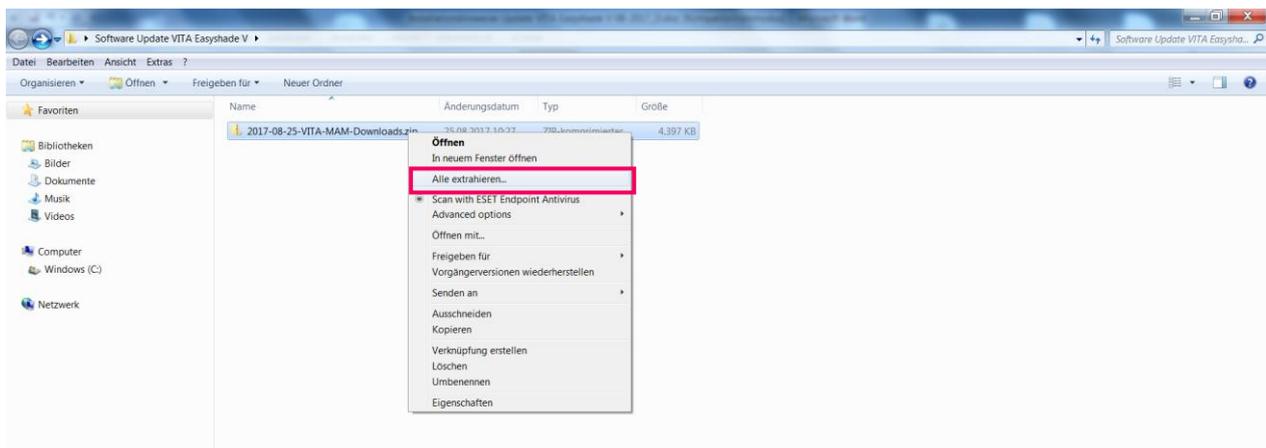


VITA Easyshade® V – Istruzioni per l'aggiornamento del software


Selezionare „**Estrarre**“.

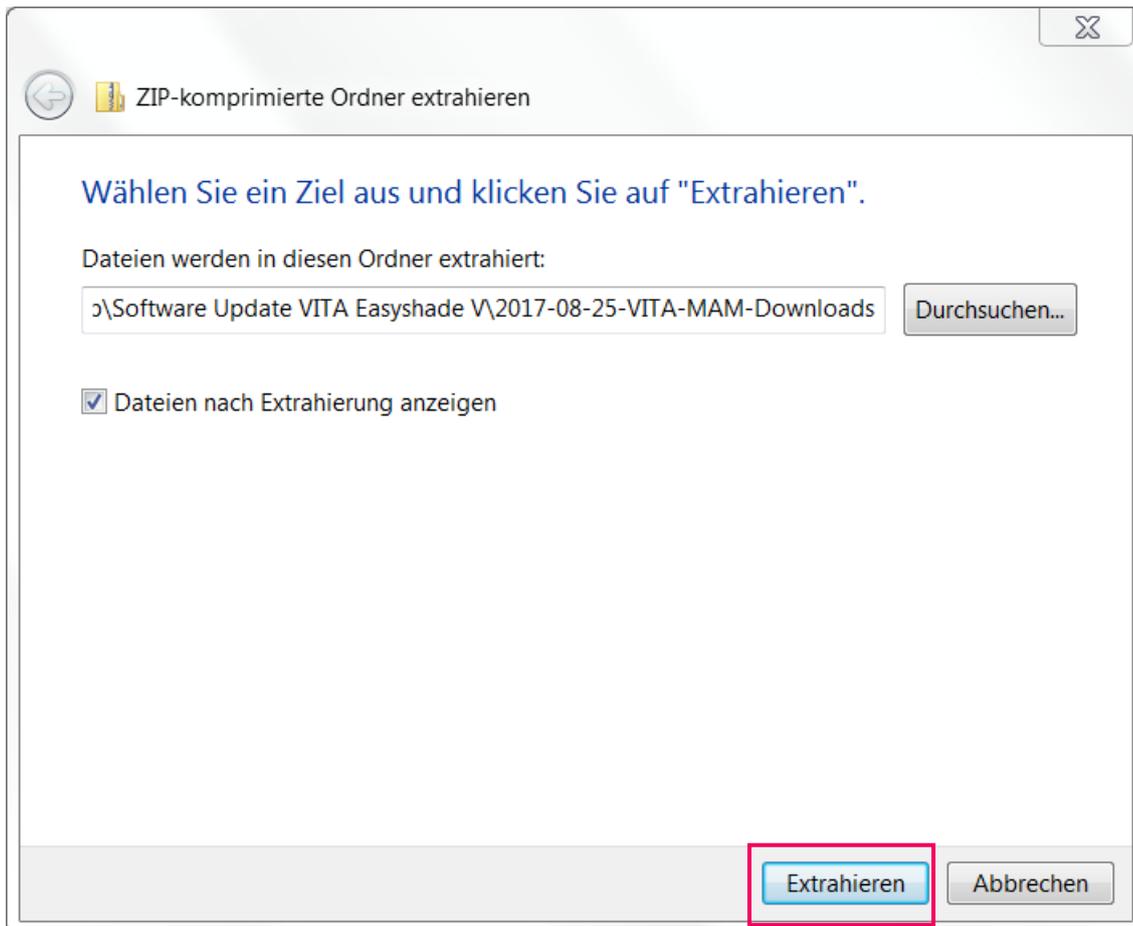

VITA Easyshade® V – Istruzioni per l'aggiornamento del software

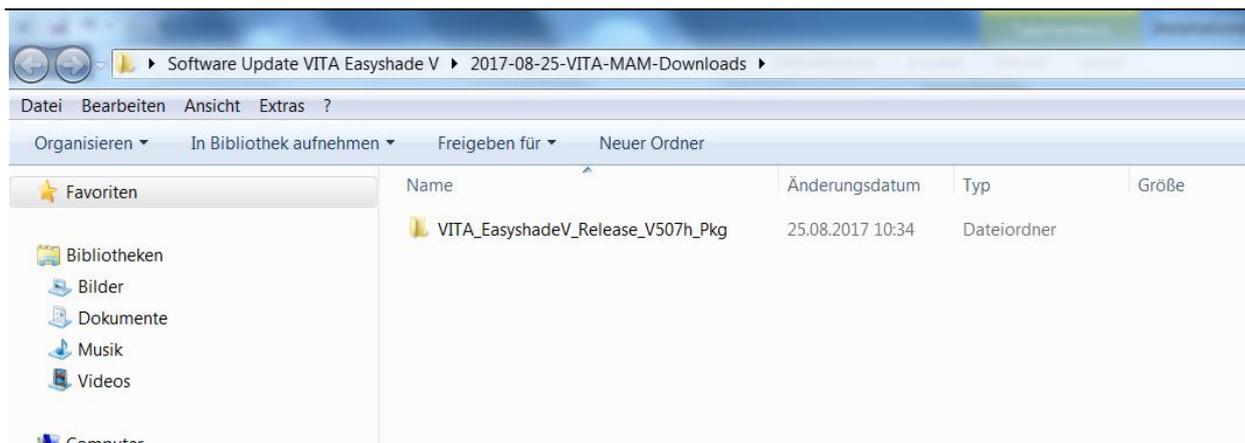


Aprire la cartella con un doppio clic.

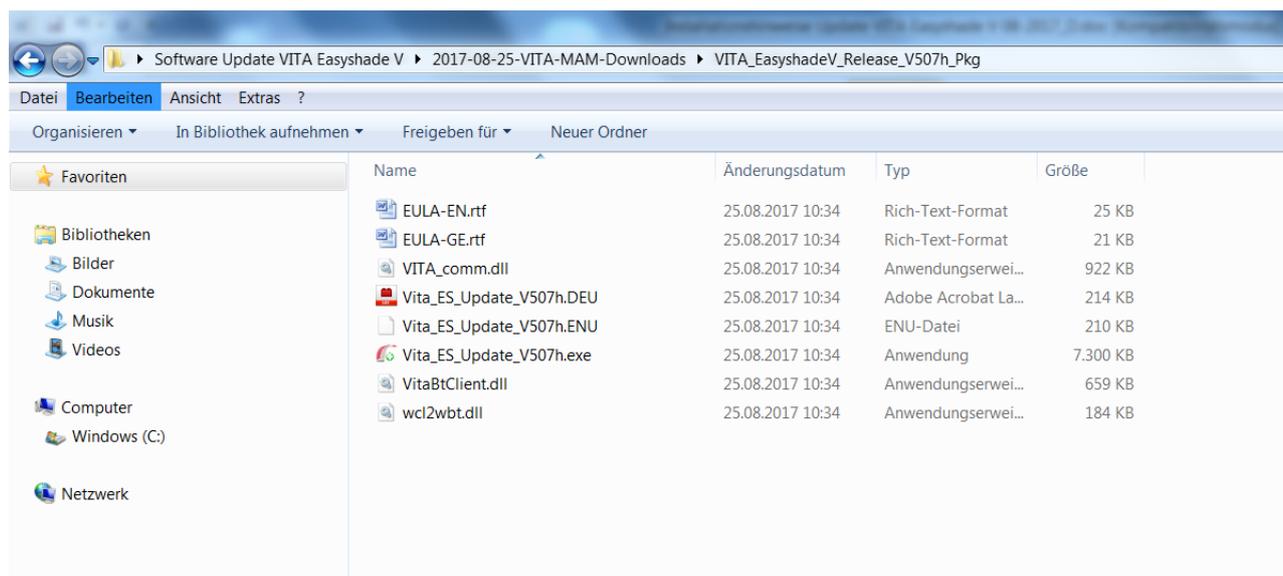

3.2 Attivare Bluetooth sul VITA Easyshade V


Accedere alle Regolazioni Bluetooth del proprio VITA Easyshade V. Spostare il cursore superiore Bluetooth per Windows/Android verso destra, per attivare Bluetooth. Il simbolo lucchetto si apre automaticamente rendendo VITA Easyshade V visibile per due minuti. Se il lucchetto fosse chiuso, toccarlo per rendere nuovamente visibile VITA Easyshade V.

VITA Easyshade® V – Istruzioni per l'aggiornamento del software

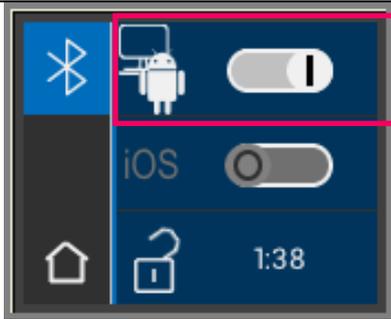


3.3 Avviare il programma di aggiornamento

Avviare il programma facendo doppio clic su „VITA_ES_Update_Vxxxx.exe“ (xxxx= numero versione attuale).

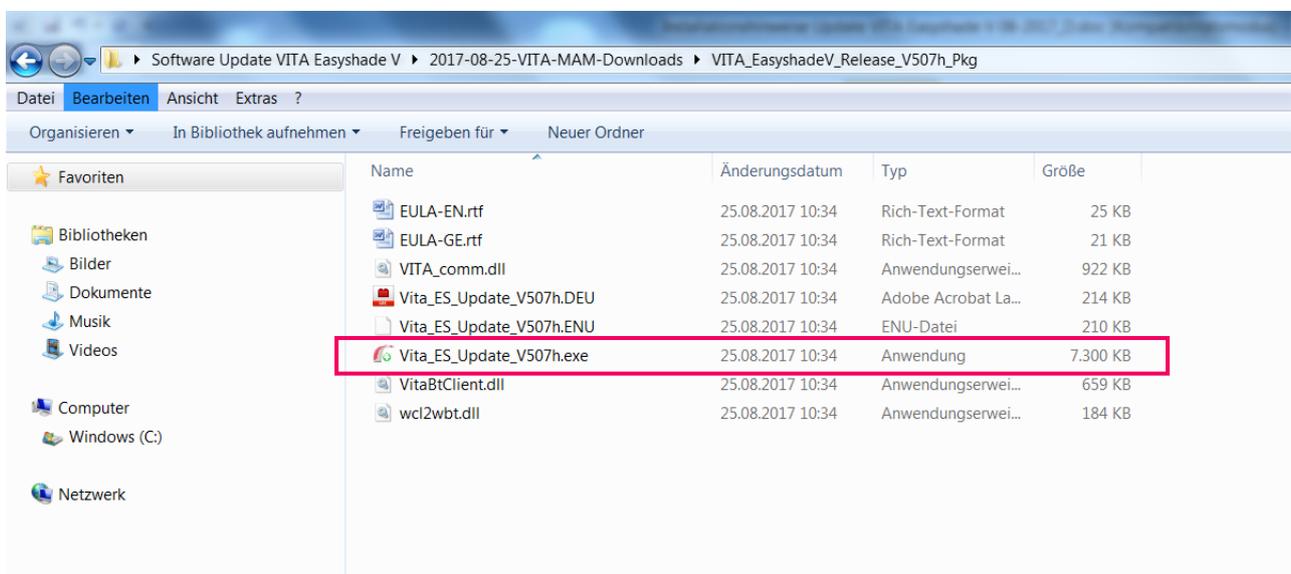


Cliccare su „Eseguire“.

VITA Easyshade® V – Istruzioni per l'aggiornamento del software

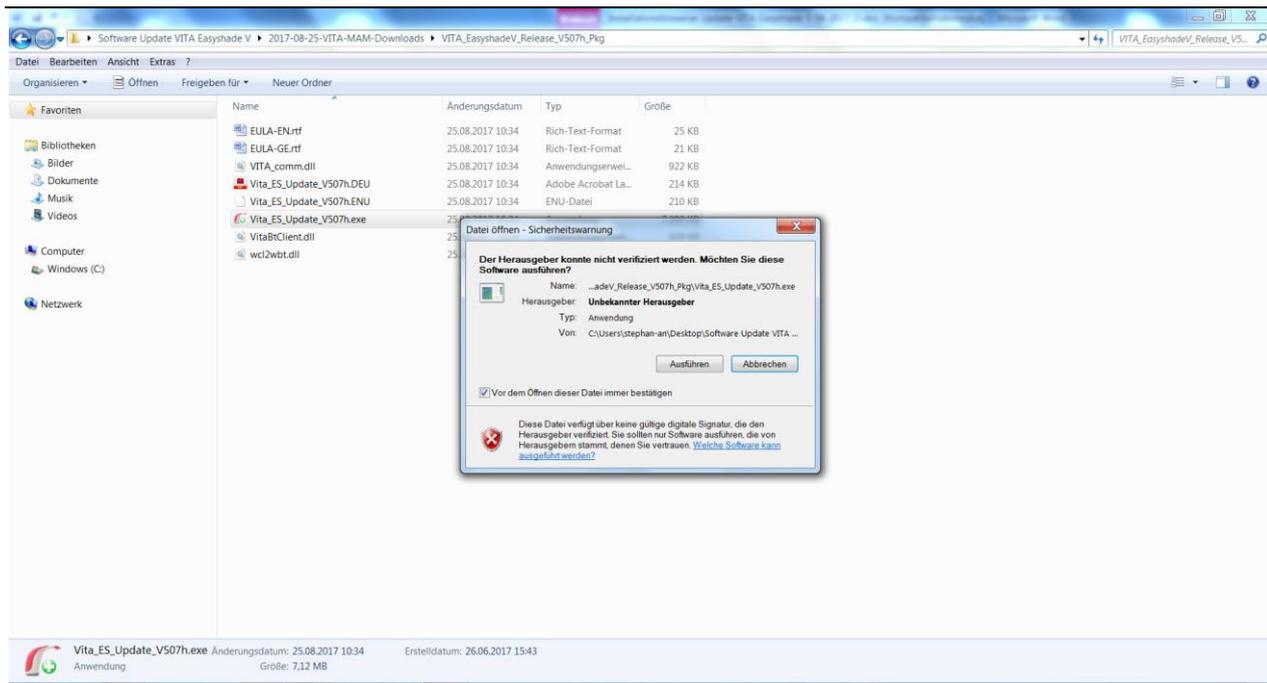


Cliccare su „Cercare“, per cercare apparecchi VITA Easyshade disponibili.

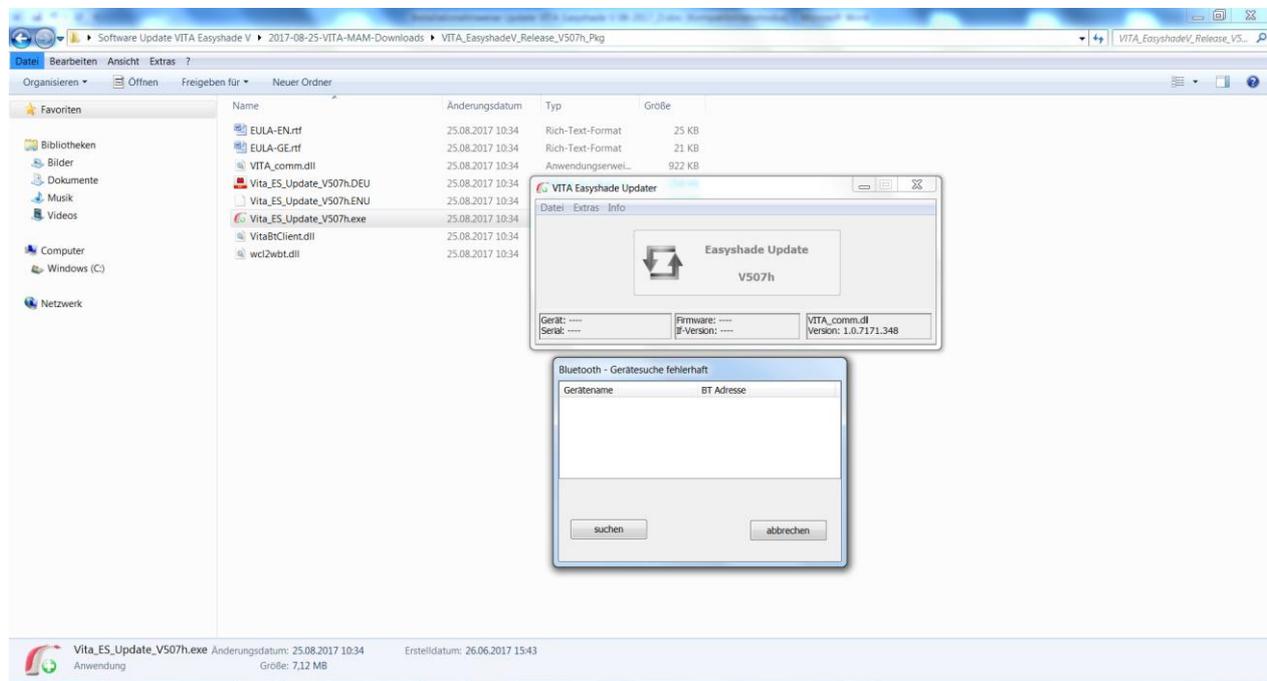

Cliccare sul VITA Easyshade V desiderato per selezionarlo. Se è disponibile un solo VITA Easyshade V la selezione è automatica.


VITA Easyshade® V – Istruzioni per l'aggiornamento del software

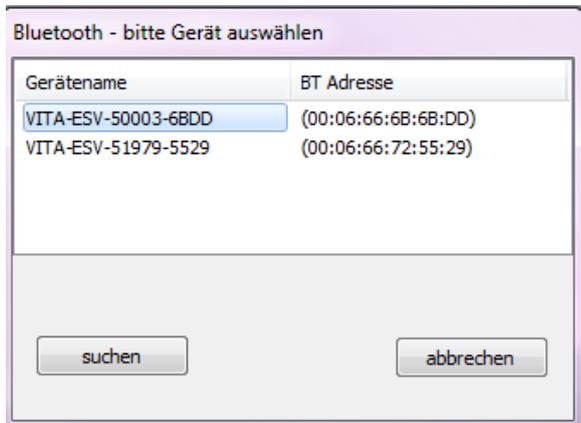

Si apre la finestra Update. Cliccare su „**Start**“, per iniziare l'aggiornamento. Durata presunta ca. 8 min.

Durante l'aggiornamento l'indicazione VITA Easyshade V è scura e non può essere utilizzata. Non effettuare misure, ecc. con il VITA Easyshade V.

VITA Easyshade® V – Istruzioni per l'aggiornamento del software

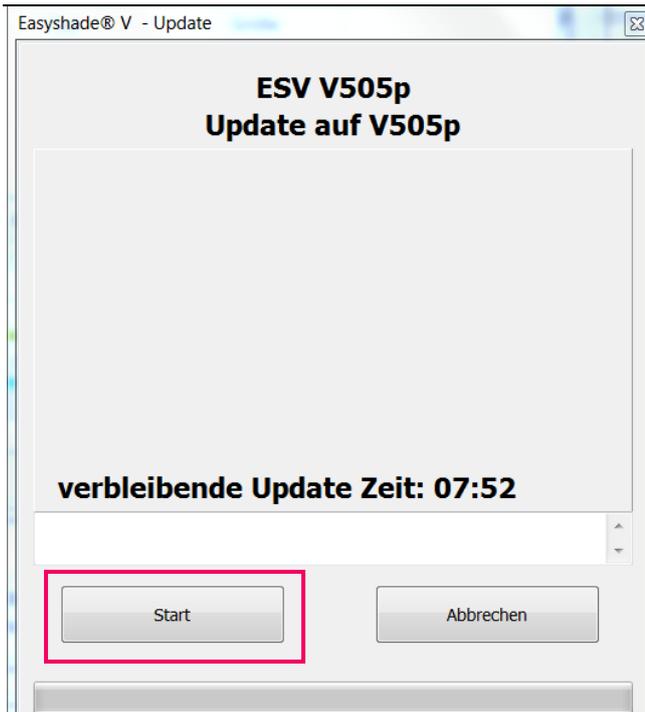

Al termine dell'aggiornamento chiudere il programma. Riavviare VITA Easyshade V.